

座位が長時間で、なおかつご自身で除圧動作ができない方におすすめします。

# エアチェアモービル

- 車いす用のエアクッションです。
- エアの交互変換により、一定の箇所に圧力が集中し続けるのを防ぎ、褥瘡を予防します。




価格 367,500円  
(本体価格 350,000円)

※車いすは別売りです。




## 体圧分散の比較

- 自動的に空気圧を調整し、お尻にかかる圧を減少します。

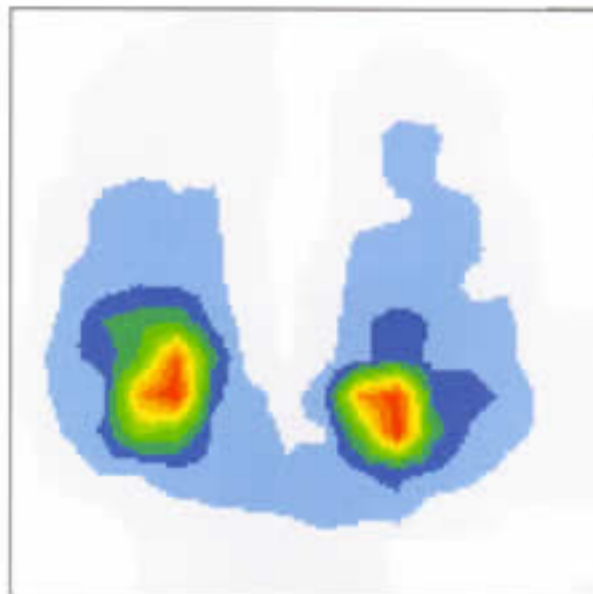

エアチェアモービルなしの時の体圧分散の様子(キャンバス上)

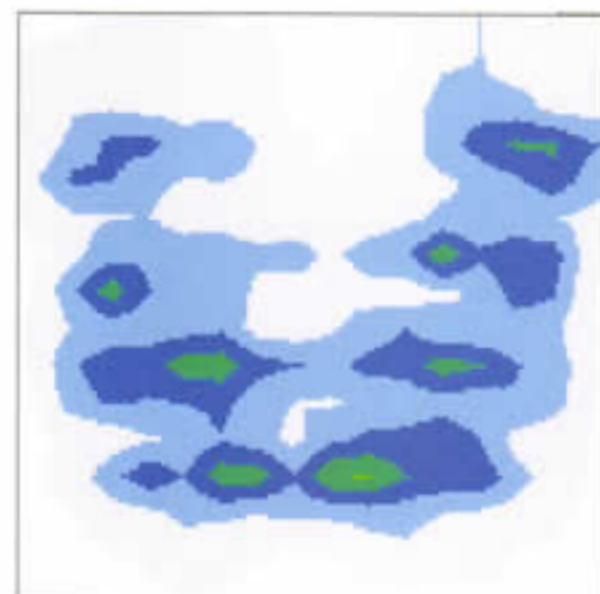

エアチェアモービル使用時の体圧分散の様子

## 移動中でも使用可能

- コントローラー部にバッテリーが内蔵されているので、車いすに乗せて移動しながらお使いいただけます。
- 1回の充電で約20時間バッテリーで稼働します。
- 低バッテリー時には、アラームでお知らせします。



## 簡単設定のコントロールボックス



- 空気圧の変換間隔は2~4分です。(設定体重によります)
- 交互変換と全面的一圧の切替が可能です。
- セル内圧を調整できます。(交互変換時40~80mmHg、全面的一圧時25~80mmHg)
- 対応体重は23~136kgです。
- バッテリーの寿命は約半年です。(1日10時間稼働にて)

### ●サイズ

クッション部 幅430×奥行430×前端厚さ140×後端厚さ70 (mm)  
重量800g  
エアセル10本(高さ50mm)

コントロールボックス

ウレタンフォーム



エアセル(10本)

- カバー素材は、透湿性・防カビ・防バクテリア・防水の素材です。

コントローラー部 幅230×奥行200×高さ100 (mm)  
重量3.3kg