




移乗ボード のせかえくん


らくらく水平移乗

ベッドからの移乗時、抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけで、楽に・簡単に・安全に移乗ができます。
看護・介護する方の腰痛を防止し、負担を軽減します。

(写真はコンバー2 体重計付)

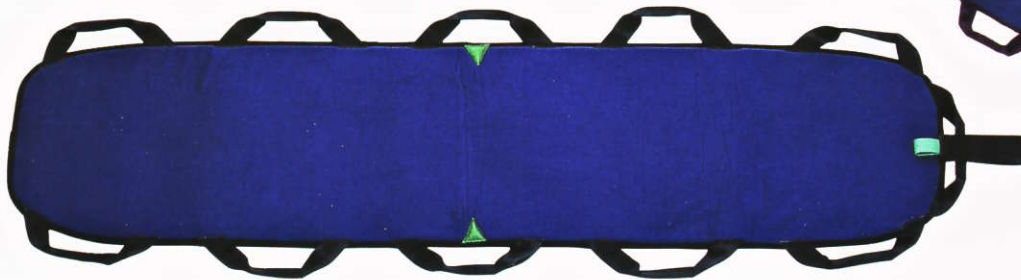

▲のせかえくん 表面

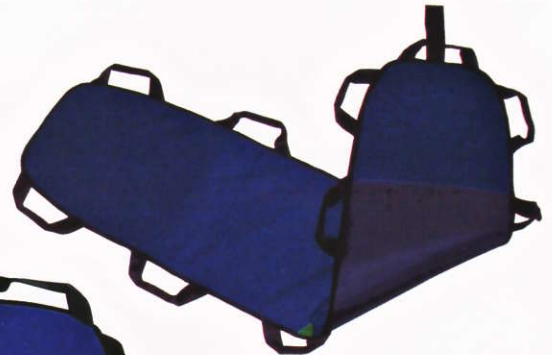

表面には防水加工布、裏面には特殊加工布を使用しております。

のせかえくんによる水平移乗の方法 (例 コンバー2への場合)



1 寝ている方を側臥にして、移乗ボード“のせかえくん”をしきこみます。



2 コンバー2をベッドに横付けし、ベッドの高さを調整し、ロックします。



3 移乗ボード“のせかえくん”の取っ手を2ヶ所もちます。



4 取っ手をひきよせ、コンバー2に移乗させます。

※コンバー2からベッドへの移乗も同じように行います。

のせかえくん【仕様】

サイズ	幅×長さ (mm)	価格
Sサイズ	400×1720	21,000円 (本体 20,000円)
Mサイズ	550×1720	24,150円 (本体 23,000円)

- 本仕様、価格は予告なく変更することがあります。
- カラーは印刷のため、実物と異なって見える場合があります。

体位変換型車いす
コンバーダブルウィールチェア
コンバー2



(写真はAタイプ)

■お問い合わせ

心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks

タカノ株式会社 健康福祉部

■オフィス

〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137
TEL0265-85-3153 FAX0265-85-5177

<http://www.takano-hw.com>