



Functional

自立・移動・調整・座る・収納の多様な機能を持つキャリーナウォーカー。

■座る



いす機能で一休憩できます。

■自立



自立するので、収納にも便利です。

■移動



キャリーとしても使えます。

Operation

■ペダル操作



ペダル操作でいす・自立・キャリー・ウォーカーに変換。

■ブレーキ



後輪キャスターにブレーキがかかります。

■ストッパー



フックをかけると、後輪キャスターがロックします。(片方でも両方ロックします。)

■調整



グリップ・ボタン操作で高さを調整できます。

Variation

本体 カラーバリエーション



■専用バック(オプション)



製品仕様【品番:本体 TW-700/バックTW-750】TAISコード:00297-000067

寸	全高	ウォーカー時 790mm~910mm	いす時 830mm~960mm	折りたたみ自立時 800mm~930mm
		(ハンドル高さ4段階調節)		
法	全幅	515mm		460mm
	奥行	575mm		330mm
	座面高	-	420mm	-
	座面サイズ	-	幅205mm×奥行195mm	
	キャスター径	前輪:126φ 後輪:76φ		-
	重量	7.0kg		
	耐荷重	80kg		
	材質	本体:アルミ、スチール、PP		
	バック(オプション別売)	幅260mm×奥行120mm×高さ340mm/材質ナイロン、PVC		

価格

本体	¥39,900 (本体価格¥38,000)
バック(オプション別売)	¥5,040 (本体価格¥4,800)

- このキャリーナウォーカーは高齢者を対象とした歩行補助車です。自立歩行が困難な方につきましては適さない場合があります。
- 本仕様、価格は予告なく変更することがあります。
- カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。



タカノ株式会社 健康福祉部
 ■オフィス
 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137
 TEL0265-85-3153 FAX0265-85-5177
 http://www.takano-hw.com
 E-mail:fukushi@takano-net.co.jp



再生紙を使用
しております
08.11 Vol.1



Carry-na Walker

キャリーナウォーカー



シルバーカーは格好いい。

C a r r i n a - W a l k e r S t o r y



持つ喜びが生まれます。

「歩行補助車」を使うのは抵抗がある、そんな方に持っていただきたい「キャリーナウォーカー」。
歩行を補助する機能を重視しながら、アルミ素材を中心に直線と曲線で構成された美しいフォルム。
お洒落な方にお使いいただいても違和感のないスタイリッシュさを実現しました。
持つことに喜びとステータスを感じていただけます。

歩く喜びを感じていたい。

スタイリッシュなデザインとともに機能も充実。外出するのが楽しくなります。
自然と行動範囲がひろがり、ご家族との散歩などもゆっくり楽しんでいただけます。
休憩や持ち運びにも考慮して、いすの機能やコンパクトにたためる工夫もしています。
「散歩に、買い物、少し遠出もしてみたい・・・」自然と歩くことが楽しくなります。
自分の時間を、いつでも、どこでも自由にお使いいただけるように。

出逢う喜びを新たに。

四季の自然にふれあう、街の季節を感じる。外出が楽しくなると行動範囲が広がります。
今までより少し遠くまで散歩してみたり、コンパクトになり、旅行先でもストレス
なく歩くことを楽しんでいただけます。
新しい発見に出逢い、新しい楽しみを集めてください。

歩くことをもっと楽しみたい。

ハンドルに軽く体重をかけると自然に前に進む感覚。ハの字型に構成された車輪によって、より安定した歩行が可能です。ブレーキもレバー操作で簡単・確実です。

歩く・座る。自由自在に使える

足元ペダルを踏み、ハンドル部分を前におこすと いすが使えるようになります。ちょっとした休憩にお使いください。

コンパクトに、そして自由に。

足元ペダルで、簡単に折りたたみが可能です。もちろんこの状態で本体が自立し、そのまま持ち運びもできます。車のトランクにもらくらく納まります。

