

# バンビーナposi 本体

# バンビーナposi 背部

TSS-841

(S)TSB-841/(M)TSB-842

## 取扱説明書

保証書付

### ごあいさつ

このたびはタカノ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項および組み立てかたについて記載しています。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに保管してください。

### バンビーナposiとは

タカノ商品において長い間ご愛顧いただいている「バンビーナチェア」、それに連なるシリーズラインナップとして、「バンビーナposi」が増えました。

バンビーナシリーズの暖かみあるデザインを活かしつつも、

使っていただくお客様の座位をしっかりと保持し、さらに使いやすく、多機能に進化しました。



「posi」には「positioning (ポジショニング)」「positive (ポジティブ)」

といった意味を含めています。この商品に関わる多くの方々が、

その意味を感じ取っていただければ幸いです。

背部 S サイズ TSB-841  
Mサイズ TSB-842

本体 TSS-841

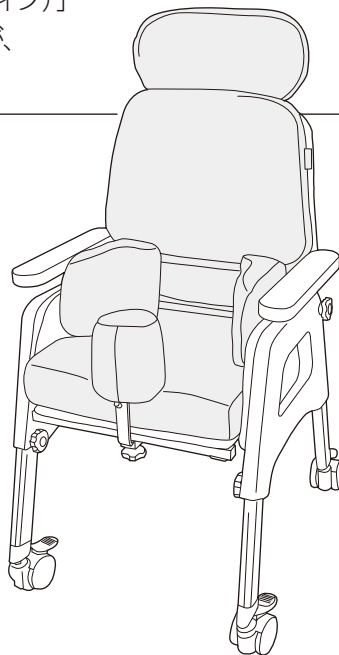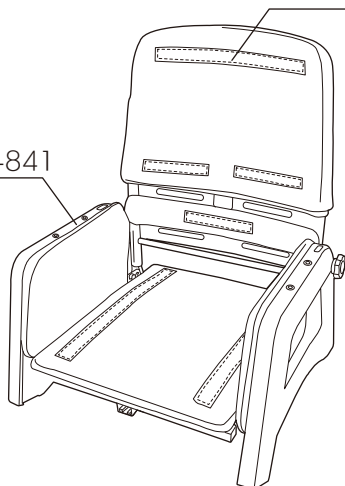

心を形にするテクノロジー、あります。

TAKANO HeartWorks.

# 1. 目次・お使いになる前に


## も く じ

1. 目次・お使いになる前に .....	1
2. 商品の特徴 .....	2
3. 各部の名称 .....	3
4. 安全上のご注意 .....	4
5. 各部の調節方法 .....	6
6. 日常のお手入れとご注意・お問い合わせ .....	9
7. 仕 様 .....	10
8. 品質保証書・保証規定 .....	11

## お使いになる前に

バンビーナposi本体・背部を取り出して、梱包内容に漏れや破損がないことを確認してください。

□本体・背部

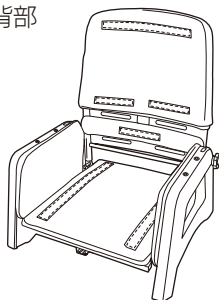


□取扱説明書  
(本紙)




※以下の部品が本体・背部に付いています。

3ページ「3.各部の名称」と照らし合わせてご確認ください。

□固定グリップ×3    □フット固定グリップセット

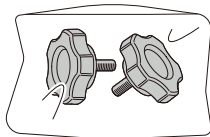

□座固定グリップ×2 . . .

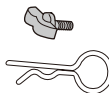


□スナップピン×2 . . .



□背受カラー×2 . . . . .



※フット固定グリップは袋から出して、  
下図の位置に取り付けてください。

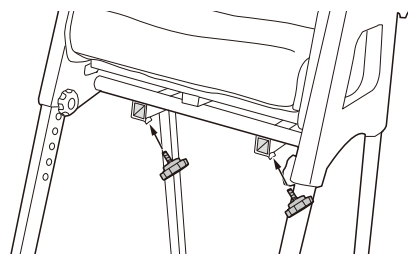


※背の取り外し作業を行う場合は、六角レンチ(短辺4mm・5mm)が必要になる部品がございます。7～8ページ「6.各部の調節方法」をご確認いただき、該当の工具をご用意ください。  
※万一、梱包内容に不足や破損部品がありましたら、使用せず9ページ下のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

## 2. 商品の特徴

この説明書は、「バンビーナposi本体(TSS-841)・背部(TSB-841/842)」のみの説明書となります。  
当商品は各オプションと組み合わせて使用することが前提となっていますのでご注意ください。  
各オプションの詳細については別冊の「バンビーナposiオプション取扱説明書」をご確認ください。

### バンビーナposi組合せ一例


本体・背部(Sサイズ)にオプションを取り付けた例

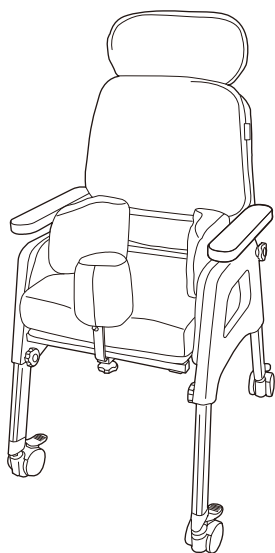

#### 【オプション】

- ・クッション(背・座・ランバー) (Sサイズ)……………X1
- ・内転防止パッド(Sサイズ) (奥行調節可) ……X1
- ・骨盤パッド(内外調節可) ………………X2
- ・体幹パッド(内外・傾き・高さ調節可)……………X2
- ・脚パイプ(Sサイズ) (高さ調節可) ………………X4
- ・アームサポート(高さ調節可) ………………X2
- ・ヘッドサポート(高さ調節可) ………………X1

#### オプション名称

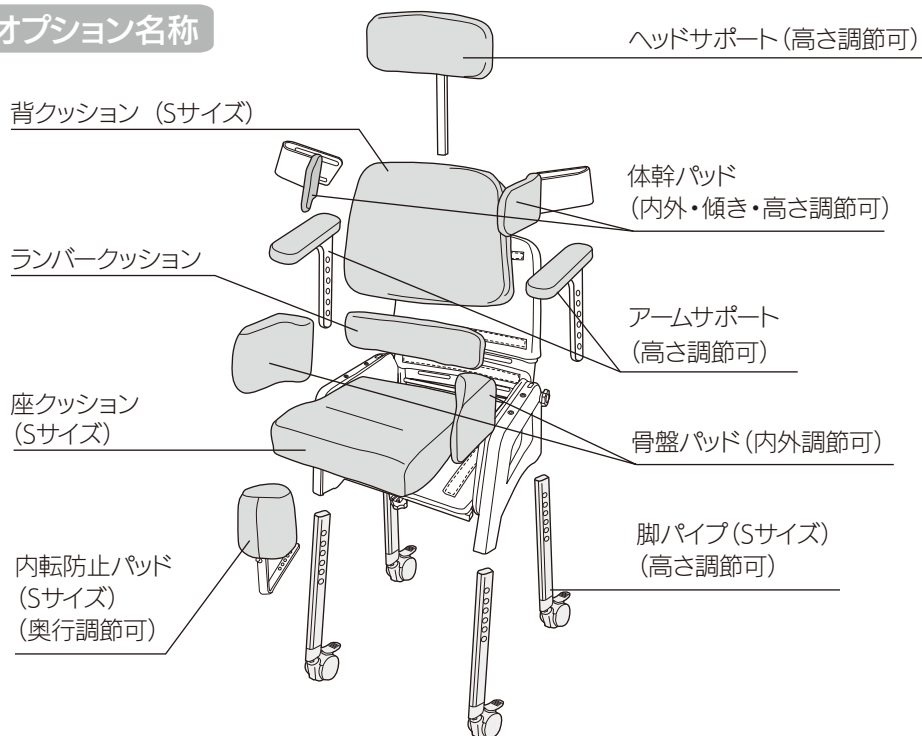


### 3. 各部の名称

#### 本体・背部分離図

背部S/Mサイズ TSB-841/842

本体 TSS-841

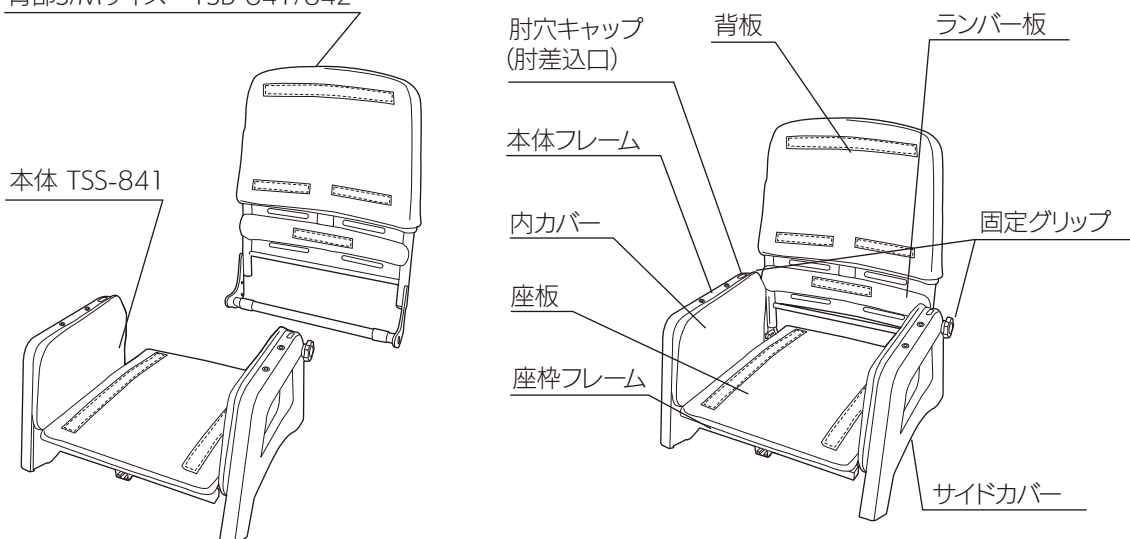

#### 下面図

フットサポート差込口

座固定グリップ

座枠フレーム


内転防止パッド  
差込口

座受け金具

脚差込口

スナップピン

背受けカラー

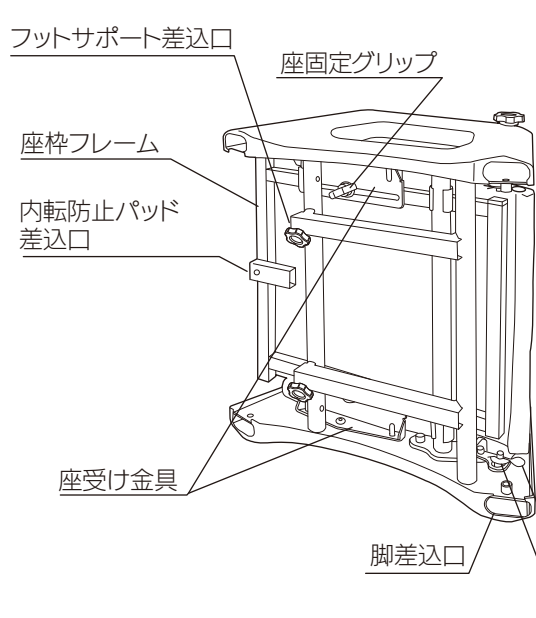

#### 裏面図

ヘッドサポート差込口

固定グリップ

背カバー


背裏カバー

背角度調整金具

背フレーム

スナップピン

背受けカラー

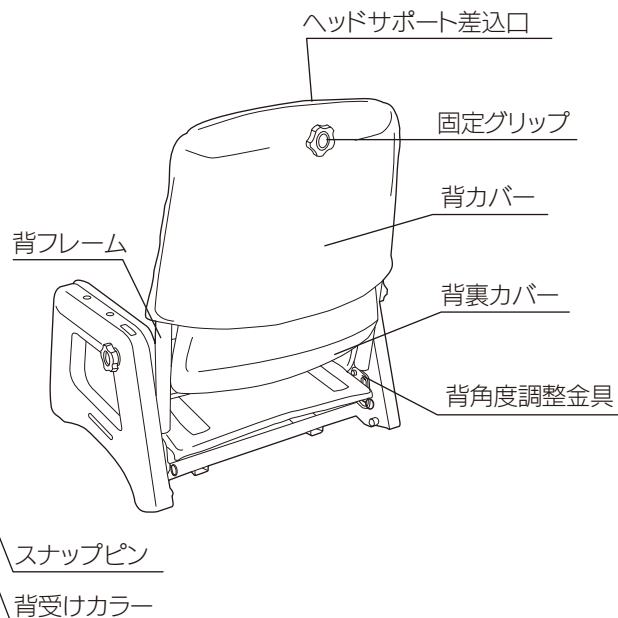

## 4. 安全上のご注意

製品を使用する上でご理解いただきたい警告があります。ここに記載した内容を無視した場合、使用者に重大な損害を被る恐れがあります。よくお読みの上、商品をご使用ください。



### 警告

取り扱いを誤ると、重大な事故につながる恐れがあります。  
このような使い方はしないでください。

適応体重は S サイズ：25kg 以下、M サイズ：40kg 以下となります。  
適応体重以上の方のご使用は製品の破損の恐れがありますのでご使用はおやめください。

椅子の上に立ったり、不安定な姿勢で腰掛けしないでください。転倒の恐れがあります。

使用前に、固定グリップやねじ類のゆるみがないか確認してください。

緊張等により反り返りが激しいお子様は転倒の危険がありますので、オプションの  
転倒防止パイプを取付の上、使用中はお子様から目を離さないで下さい。

- 本商品は、お子さまの体位をサポートする為のいすです。遊具や乗り物・踏み台など、座る目的以外の使い方は絶対にしないでください。転倒や事故・破損の原因となります。
- 商品を破棄するときは、焼却しないでください。有害なガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。
- いすの上に立ったり、飛び跳ねたり、不安定な姿勢で腰掛けしないでください。  
転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- 傾斜面では使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- この商品は一人用です。二人以上、同時に座らないでください。転倒や事故・破損の原因となります。
- ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- 固定グリップやスナップピンなどは専用のものを適正な本数で取り付けてください。  
取付数が少ないと、破損等の原因となります。
- 本商品は車いすではありません。お子さまを座らせたまま長距離を移動させないでください。  
転倒や事故・破損の原因になります。
- お子さまを座らせたまま段差を乗り越えないでください。転倒や事故・破損の原因になります。
- お子さまが座っている時や乗り降り時など、移動時以外は確実にキャスター全てをロックしてご使用ください。  
ロックをせずに使用すると転倒や事故・破損の原因になります。
- フットサポートの上に座らないでください。転倒する恐れがあります。
- 各固定グリップやスナップピンなどは最後までしっかりと取り付けてください。使用中に外れて転倒する恐れがあります。
- 脚の高さは揃えてお使いください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- キャスターもしくは脚キャップが全て接地するようにお使いください。転倒や事故・破損の原因となります。
- 誰も座っていない状態でキャスターロックしてください。転倒や事故・破損の原因となります。
- フットサポートと脚は当たらないようにご使用ください。転倒や事故・破損の原因となります。
- 座クッションは前に出過ぎないように取り付けてください。フレームが無いところに座り転倒する恐れがあります。


## 4. 安全上のご注意



### 注意

取り扱いを誤ると、傷害を負ったり故障の原因となる恐れがあります。ご使用の際にはご注意ください。



- 各サイズの対象者目安は「7.仕様」に記載しています。適正以上の体重・身長の方が座りますと転倒や事故・破損の原因となりますのでお控えください。
- 本商品は屋内用です。屋外でのご使用は、転倒や事故・破損の原因になります。
- 各部の調整をするときは、手や指を挟まないように操作してください。ケガの原因になります。
- 固定グリップやネジ、金具類はガタツキ、グラツキがないかを使用前に点検してください。必要に応じて締め直してください。適正に固定されていないと転倒や事故・破損の恐れがあります。
- 肘や背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- 肘、座面、背もたれに物を載せないでください。転倒や、落下してケガや床面のキズの恐れがあります。
- 商品には、強い衝撃を与えないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 座った状態でいすを傾けないでください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- 幼児一人では、使用させないでください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- 座らせたままでの調整はしないでください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。
- 動かす際は本体フレームを持ってください（下図参照）。背などを持つと緩みの原因となります。
- 直射日光や雨風の当たる場所・ストーブなどの熱が直接あたる場所・湿気・乾燥の著しい場所での使用や保管は避けてください。変形や変色・眼割れ、故障や破損の原因となります。
- 水などが付いた場合はすぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと故障やさび・変色の原因となります。
- 床面の平らな場所に置いてください。転倒や事故・破損の原因となります。
- キャスターをロックした状態で押さないでください。タイヤが摩耗すると同時にフロアの床にキズや汚れが付く恐れがあります。
- 各固定グリップにものを引っ掛けしないでください。転倒や破損の原因になります。
- マットやじゅうたんの上で、取り付け・調節作業を行ってください。床を傷つける恐れがあります。
- 使用中または使用後に肌荒れ、発疹、発赤などの異常が表れた場合は使用を中止し、専門医に相談して指示に従ってください。
- 固定用グリップは3種類あります。それぞれ指定箇所に使用してください。誤った箇所に取り付けると、部品が外れてケガをする恐れがあります。
- Sサイズの脚にMサイズの背を組み合わせた場合、バランスが悪くなり転倒の恐れがあります。異なるサイズの組み合わせはおやめください。
- 脚を外した状態で座椅子として使用しないでください。バランスを崩し、転倒の恐れがあります。又、床を傷つける恐れがあります。

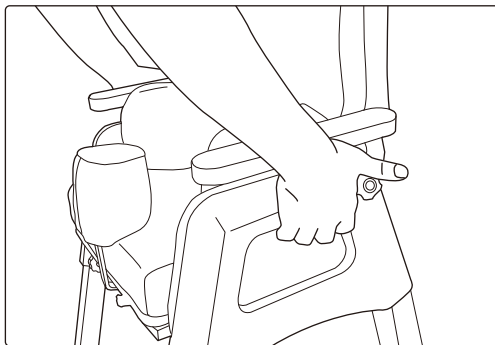


## 5.各部の調節方法

### 背の角度調節

- ①左右のスナップピンを外してください。
- ②左右の背受カラーを取り外してください。
- ③背角度を調整してください。
- ④左右の背受カラーを調整穴にはまるように入れ直してください。
- ⑤左右のスナップピンを入れ直してください。

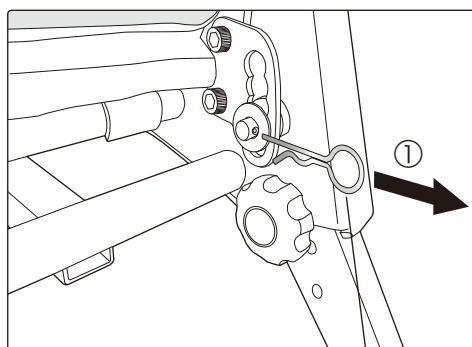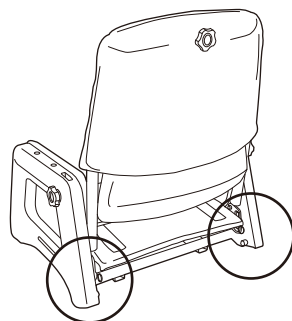

スナップピン

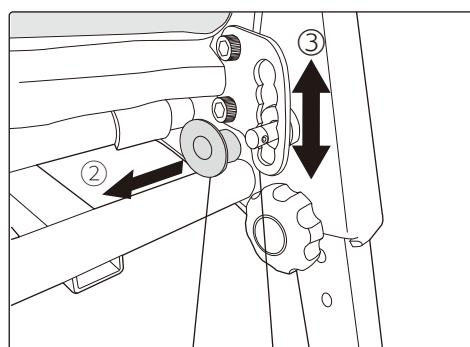

背受カラー

背角度調整金具






### 注意

背受けカラーを外すと背が動きますので、指を挟まないように必ず背を支えた状態で背受けカラーの取り外しから差込みまでを行ってください。

### 座の奥行調節

- ①左右の固定グリップを緩めてください。  
(緩めすぎると固定グリップが外れますのでご注意ください。)
- ②座面の位置を確認しながら前後に調整してください。
- ③左右の固定グリップを締めてください。

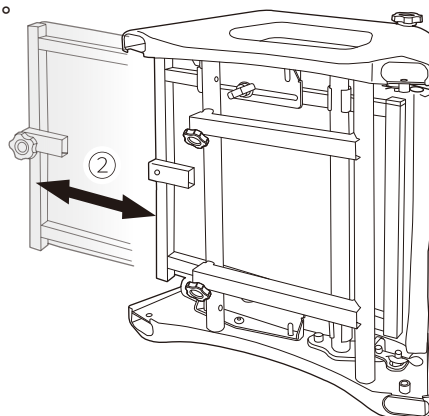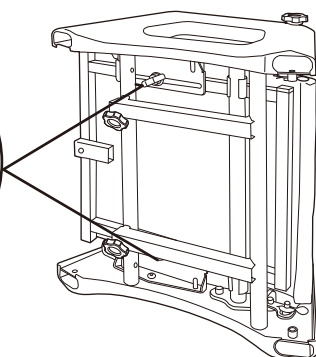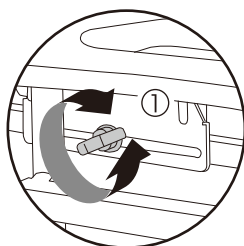

### 注意

固定グリップを緩めすぎると固定グリップが脱落します。  
脱落した際は、座枠裏にあるねじ部に取り付けなおしてください。(7ページ参照)




## 5.各部の調節方法


### 3.座枠フレームの取外し・取付方法(サイズ変更の前準備)

注:オプションのランバー、座クッションは事前に取外してください。


①座面裏の固定グリップとワッシャーを取り外してください。

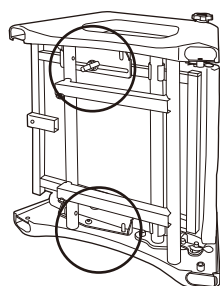

ワッシャー  
固定グリップ

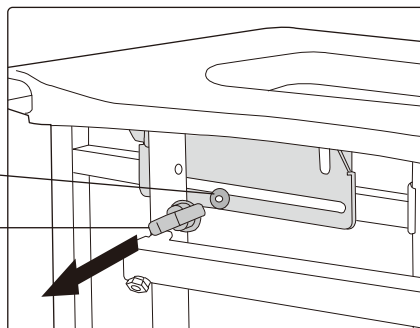


②座部を取り外してください。

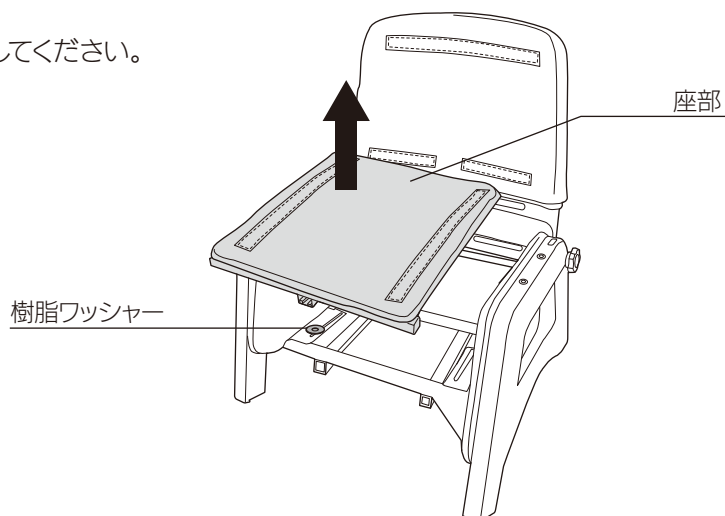

③取付ける際は、座受金具を挟んで上側に樹脂ワッシャー、座部、下側にワッシャー、固定グリップとなるよう順番に固定グリップで留めてください。

座部は、取り付け穴に入るよう、座受金具は調節穴に入るよう注意してください。


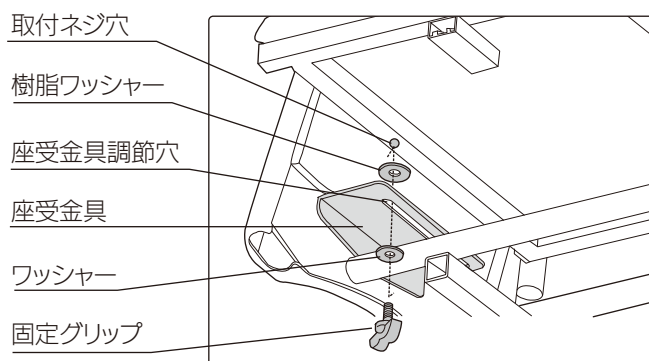





## 背部の取外し・取付方法(背のS⇄Mサイズ切替など) 用意する工具:六角レンチ(4番・5番)

注:ランバー、座クッション、座枠フレームは事前に取外しておいてください。



①スナップピンと背受カラーを取り外してください。

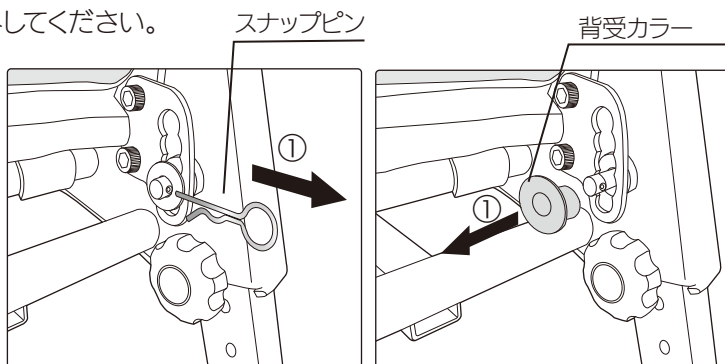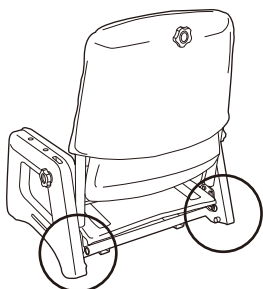


②背角度調整金具を六角穴ボルトと一緒に取外してください。

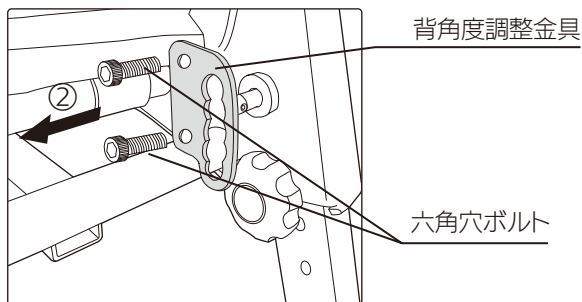

③本体と背部をつないでいる六角穴ボルト・カラーを取外してください。

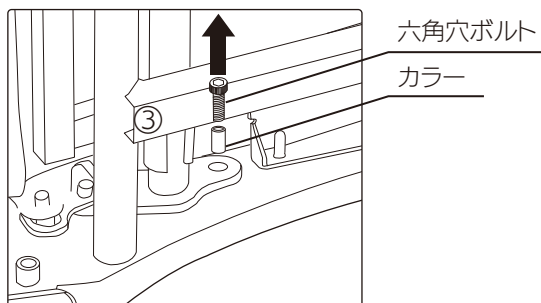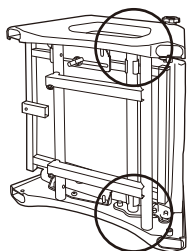

④背部を後ろ側に引き抜いて取外してください。

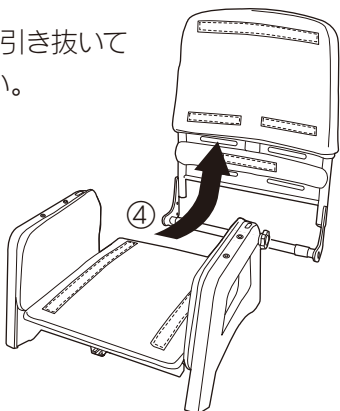

### 背部の取付方法

⑤取付けは逆の手順で行ってください。  
背部のサイズを変える場合は別のサイズの背部を取付けてください。

## 6. 日頃のお手入れと注意・お問い合わせ

### 〈汚れを落とすときの注意〉

- 水にぬれたまま放置しないでください。
- シンナー等の有機溶剤の使用は絶対にしないでください。目割れや変色の原因になります。

### 1. クッション部

本製品のクッション部はカバーごと洗濯機に入れて洗うことができます。カバーのみを洗濯する場合は、ファスナーを閉じて洗ってください。液温30℃以下にて中性洗剤でソフト洗いしてください。ねじって絞ったりせずに短時間で脱水してください。乾燥後は形を整えて日陰で平干しの上、完全に乾かしてください。乾燥機にもそのまま入れていただけます。クッションが固定されないサイズの乾燥機でご使用ください。施設等での消毒はオゾン消毒やアルコール消毒等を行い、家庭での消毒はアルコールを含ませた布等で拭いてください。頻繁な消毒は避け、月に一度ほどとしてください。カバーのわずかな汚れは柔らかい布に中性洗剤を含ませ、軽く拭きとってください。



#### 注意

クッションの中身のみで洗わないでください。変形・劣化の恐れがあります。アイロンがけはしないでください。ドライクリーニングや塩素系の漂白はしないでください。

### 2. 木部・金属部・樹脂部

日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。(化学ぞうきんなどは使用しないでください)  
万一汚れたときは、中性洗剤を3～5%位にぬるま湯で薄め、柔らかい布をひたし、固く絞って表面をたたくように拭き取ってください。その後水でひたした布を固く絞って洗淨液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いたあと、自然乾燥させてください。

### 3. 上張り地・布/レザー部

日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。(化学ぞうきんなどは使用しないでください)

### 4. 長期保管場所

高温・多湿の場所には保管しないでください。カビやシミ、ワレの原因になります。

また、直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、乾燥の著しい場所での保管も避けてください。変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。



#### 注意

使用前に、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は工具等で締め付けてください。

仕様の詳細や調節方法、お手入れのやり方、アフター部品など不明な点は、お買い求めいただいた販売店、または下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

タカノお客様ご相談窓口



フリー  
ダイヤル

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

※混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからおかけ直してください。

# 7. 仕 様

(単位 mm)


		バンピーナposi			
測定箇所		Sサイズ	Sダイニング	Mサイズ	Mダイニング
①	全幅(肘付) ※1	445(450)		445(450)	
②	全奥行 ※2・3	440~500【無段階】	620~780【無段階】	500~560【無段階】	620~780【無段階】
③	全 高 ※3・4	535~635【 $\frac{20\text{mm}}{\times 6\text{段階}}$ 】	800~900【 $\frac{20\text{mm}}{\times 6\text{段階}}$ 】	715~815【 $\frac{20\text{mm}}{\times 6\text{段階}}$ 】	880~980【 $\frac{20\text{mm}}{\times 6\text{段階}}$ 】
④	座の幅	340		340	
⑤	座の奥行	220~320【無段階】		250~350【無段階】	
⑥	座の高さ ※3・5	250~350【 $\frac{20\text{mm}}{\times 6\text{段階}}$ 】	500~600【 $\frac{20\text{mm}}{\times 6\text{段階}}$ 】	350~450【 $\frac{20\text{mm}}{\times 6\text{段階}}$ 】	515~615【 $\frac{20\text{mm}}{\times 6\text{段階}}$ 】
⑦	キャスター部高さ	70		70	
⑧	座前と座後の厚みの差	20		20	
⑨	座後面から肘の高さ	130~230【 $20\text{mm} \times 6\text{段階}$ 】		115~215【 $20\text{mm} \times 6\text{段階}$ 】	
⑩	座後面から背上の高さ	320		385	
⑪	背もたれの角度	90°~110°【5°×5段階】		90°~110°【5°×5段階】	
⑫	内転パッドの差込量	80【 $10\text{mm} \times 9\text{段階}$ 】		50【 $10\text{mm} \times 6\text{段階}$ 】	
⑬	内転パッドUタイプの調節量	70【 $14\text{mm} \times 6\text{段階}$ 】		70【 $14\text{mm} \times 6\text{段階}$ 】	
⑭	骨盤パッド幅	140~290【無段階】		140~290【無段階】	
⑮	体幹パッド幅 ※6	130~270【無段階】		130~270【無段階】	
⑯	座面から体幹パッド上の高さ ※7	215~260【無段階】		295~340【無段階】	
⑰	体幹パッド角度	-20°~20°(垂直に対して)【無段階】		-20°~20°(垂直に対して)【無段階】	
⑱	背上からヘッドサポート上の高さ	140~240【無段階】		140~240【無段階】	
⑲	フットサポートの引き出し量	95【無段階】		95【無段階】	
⑳	フットサポートから座前面の高さ ※8	215~395【 $20\text{mm} \times 10\text{段階}$ 】		230~410【 $20\text{mm} \times 10\text{段階}$ 】	
㉑	フットサポートのレッグ角度	-40°~40°(水平に対して)【20°×5段階】		-40°~40°(水平に対して)【20°×5段階】	
㉒	フットサポート角度	-40°~40°(水平に対して)【20°×5段階】		-40°~40°(水平に対して)【20°×5段階】	
●	重量 ※9	11kg~15.5kg	12.8kg~19.3kg	12kg~16.5kg	13.3kg~19.8kg
対象者目安 ※対象者目安は座面の高さを基準として当てはめております。あくまでも目安としてご覧ください。					
■ 身長/体重		~125cm/~25kg		~145cm/~40kg	

※1：キャスター回転範囲は除く ※2：ダイニングはフットサポートの可動含む ※3：背を一番立てた状態

※4：ヘッドサポートを除く ※5：座前の寸法 ※6：パッドの位置が最上位、垂直の場合

※7：パッドの位置が最狭、垂直の場合 ※8：フットサポートが水平の場合 ※9：最軽量は、パッド類なし

※寸法表には、転倒防止パイプは含まない。 ※体幹パッド、骨盤パッドは3次元形状の為、調整範囲は目安とする。

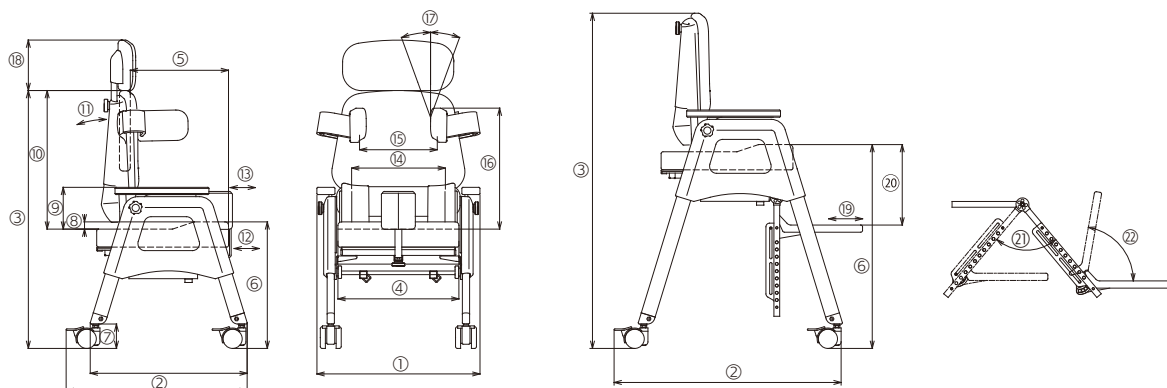

# 品質保証書

本商品については上面記載の「保証規定」により正常な使用状況において故障が生じた場合に限りお買上げの日より「1年間」無償にて修理いたします。

機 種			
お 客 様	ご住所	〒 TEL.	
	(フリガナ) お名前		
お買上げ日		年 月 日	保 証 有効期間 お買上げ日より (保証の規定による) 1年間
取扱販売店名・住所・電話番号			
製造元	 <b>タカノ株式会社</b> タカノハートワークス オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331 TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203		

## 保証規定

### I. 保証の範囲

1. 保証期間中に品質の不完全に基づく故障を生じた場合はこの保証書により無料で修理いたします。
  2. 保証期間はお買上げ後1年間です。
  3. 但し、次の場合は保証中でも有料になります。
    - (a) 使用方法の誤り、重大な不注意、手入れ不良による故障の場合。
    - (b) 製品に改造を加えた場合の故障。
    - (c) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変等、ならびに公害による故障または損傷。
    - (d) 保証書にお買上げ店名の記載、捺印のない場合。
    - (e) 保証書のご提示がない場合。
    - (f) 消耗品(キャスター等)は保証期間対象外となります。
- 以上の保証は本製品を国内に設置した場合に限りです。  
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### II. サービスのご用命

保証期間中、万一故障が生じた場合はお買上げの販売店へ保証書を添えてお申し出下さい。

### III. ご注意

保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- ・保証書は、記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
- ・保証期間中に故障が発生した場合は、製品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼下さい。お買上げ年月日、販売店名など必ずご確認ください、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。
- ・転居・贈答品などでお買上げの販売店に修理を依頼できない場合は、タカノ(株)までお問い合わせください。
- ・保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。



見やすいユニバーサル  
デザインフォントを  
採用しています。



心を形にするテクノロジー、あります。

**TAKANO HeartWorks. タカノ株式会社** タカノハートワークス

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331 TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203  
 URL <http://www.takano-hw.com/> <http://www.takano-net.co.jp/>