

学童いす用クッション LAPS kids


TC-LK-10 延長ベルト 取扱説明書



この度は、タカノ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 本書は「LAPS kids」の延長ベルトをお使いいただきための注意事項と使用方法を記載しています。
- ご使用前によくお読みの上、大切に保管して下さい。
- お求めいただきました商品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。
- 「LAPS kids」の取扱説明書の内容も合わせてご確認の上、ご使用ください。

仕様

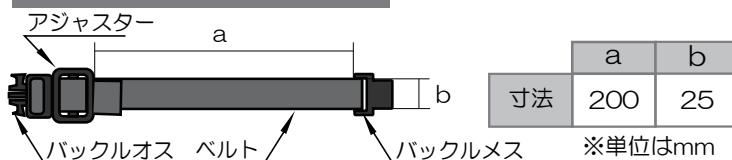

ベルト：ポリプロピレン

バックル：ポリアセタール

使用上の注意

- ベルトを強く引っ張りすぎないでください。
- ベルトをLAPS kidsのいす等への取り付ける目的以外で使用しないでください。
- ベルトをストーブなど熱源の近くに置かないでください。
- ベルトはa部の寸法が200mmを超えないようお使いください。
- ベルトはねじれないよう伸びてからお使いください。


お手入れ方法

- ネットに入れて液温30°C以下にて中性洗剤で洗濯してください。
- 乾燥機の使用もできます。



使用方法

- LAPS kidsのベルトに延長ベルトを取り付けてください。
- バックルでベルトの長さを調節していくすなどに取り付けてください。
- 図はLAPS kidsの背側ですが、座側のベルトも同様に取り付けられます。

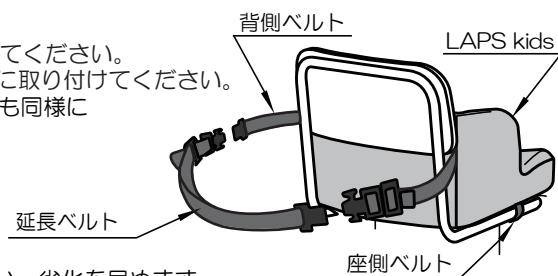

保管方法

- 直射日光の当たる場所で保管しないでください。劣化を早めます。

お問い合わせ



タカノ株式会社

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331

TEL 0265 72 3157 FAX 0265 72 3203

お客様
ご相談窓口

0120-825-845

受付時間：土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00
※混雑時はつながりにくい場合があります。時間をおいてからお掛け直しください。

Rev.1 (2019.06.07)