

SOCOTTO 本体部

TS-851

脚 部

TS-852

サポートベルト

TS-853

取扱説明書


ごあいさつ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この説明書は、この商品の使い方と使用上の注意事項および組み立て方について記載しています。

ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも確認できるところに保管してください。

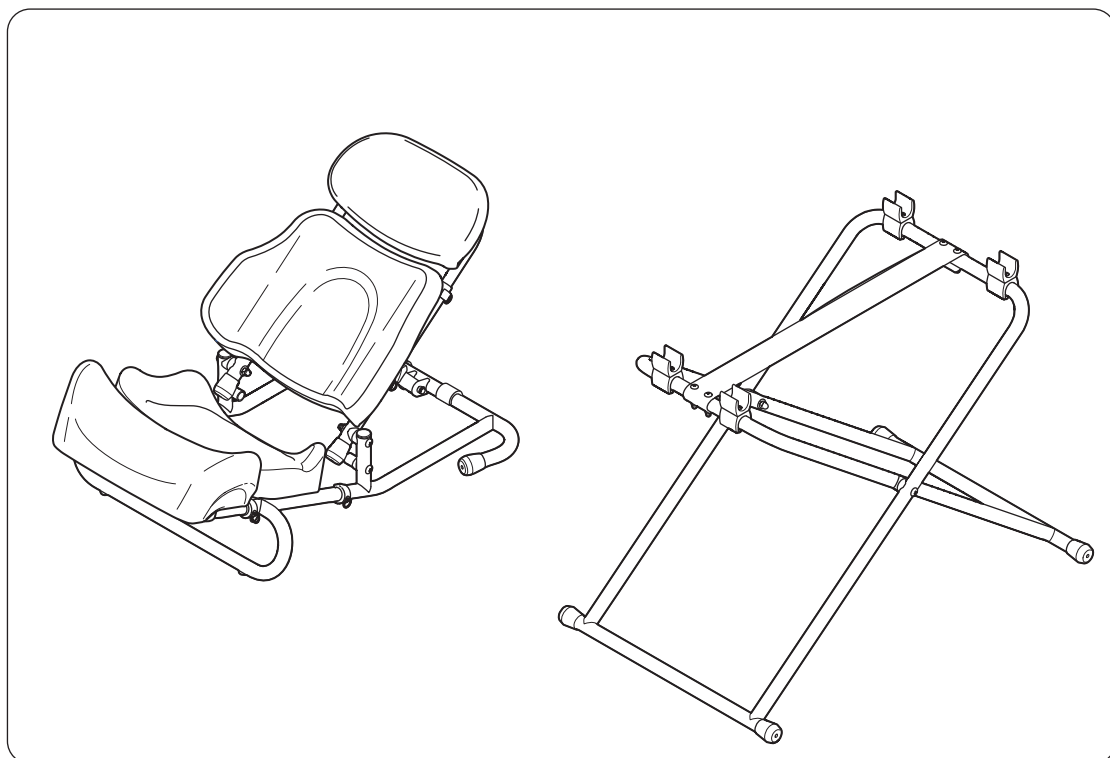


もくじ

1. 購入品と梱包品の確認	1
2. 各部の名称	2
3. 安全上のご注意	3
4. ご使用の前に	5
5. 各部の調節方法	7
6. 脚部の使い方	8
7. サポートベルトの使い方	9
8. お手入れの方法	10
9. 困ったときには	12
10. 仕様	13

1. 購入品と梱包品の確認

ご購入の商品を取り出して、梱包品が揃っているか確認してください。

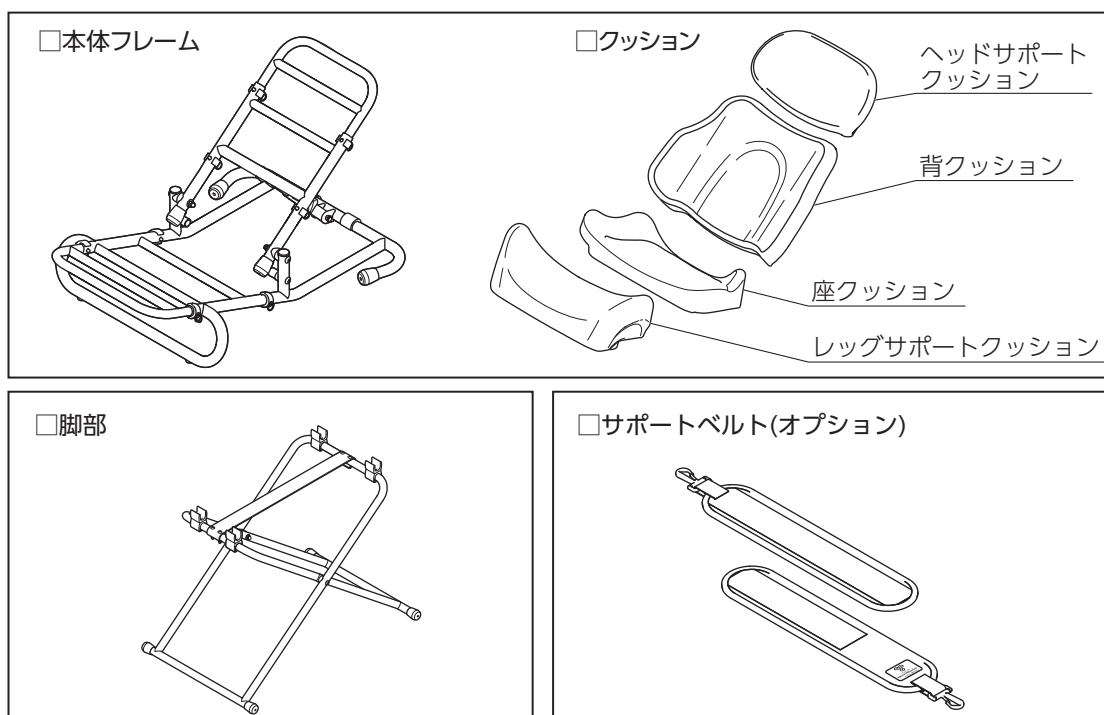

万一、梱包内容に不足や破損があった場合や不明な点は、お買い求めいただいた販売店、または下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

タカノお客様ご相談窓口



フリー
ダイヤル

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話からでもご利用いただけます。)

※混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからおかけ直してください。



2. 各部の名称

本体部

ヘッドサポートクッション

背クッション

座クッション

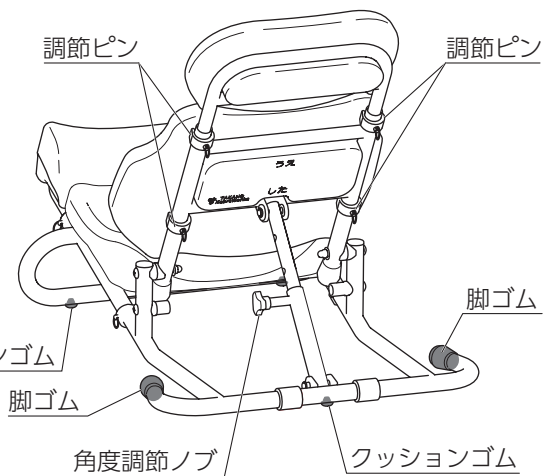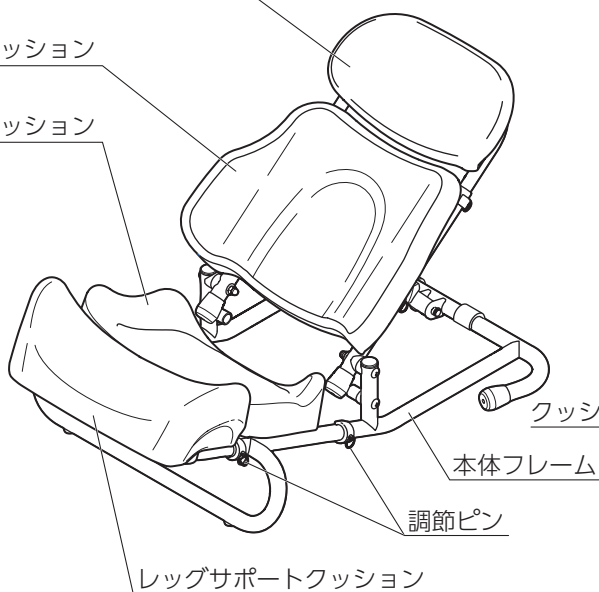


脚部

パイプキャッチ (4箇所)

外れ防止ベルト

ベルト

外れ防止ベルト

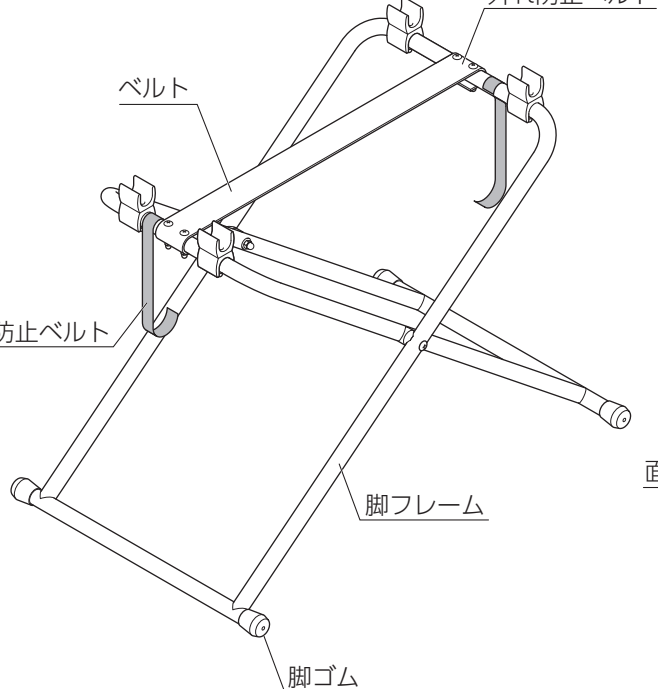


サポートベルト (オプション)

サポートベルト右

面ファスナー (メス)

面ファスナー (オス)

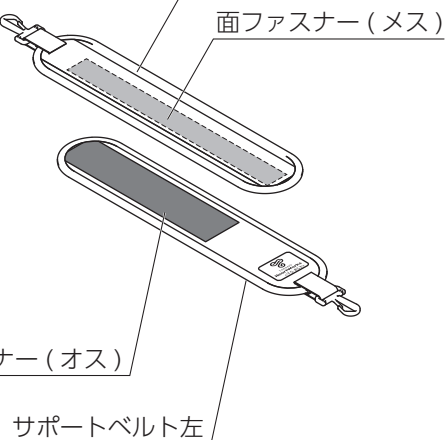

3. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った使い方をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

- ・操作は必ず大人の方が行ってください。
- ・使用前に、調節ピンの外れや、ネジ類のゆるみがないか確認してください。
- ・お子様以外は使用しないでください。
- ・体重 40 kg を超えるお子様は使用しないでください。
本体が破損するなど、けがの原因になります。
- ・不安定な場所での使用はしないでください。
やわらかいマット、すのこ、排水溝といった段差の上で使用すると設置が不安定となり、けがの原因になります。
- ・本製品の上に立ったり、不安定な姿勢で座らないでください。
転倒の恐れがあります。
- ・お子様を座らせた状態で本製品を移動させたり、調節をしたりしないでください。
本体が破損したり、転落やけがの原因になります。
- ・お子様を乗せたままの放置はしないでください。
誤って転倒したり、けがや破損の恐れがあります。
- ・緊張等により反り返りが激しいお子様は転落の危険がありますので、オプションのサポートベルトを取り付けの上、使用中はお子様から目を離さないでください。
- ・二人以上で同時に乗らないでください。
転倒や事故・破損の原因になります。
- ・踏み台として使用など、他の用途での使用はしないでください。
- ・改造や分解をしないでください。



注意

誤った使い方をすると、「軽傷(打撲、すり傷、切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される」内容を示しています。

- ・ 脚部を折りたたむときは、ものの挟み込みがないか確認してください。
- ・ 折りたたんだ脚部を開くときに、製品が周囲に当たらないように注意して操作してください。
- ・ 可動部に手や指を入れないでください。
スキマに手や指をはさみ、けがの原因になります。
- ・ 倒したり、衝撃や無理な力を加えないでください。
製品の破損や、壁・床・ドアなどを傷つける原因になります。
- ・ 持ち運ぶ場合は、周囲に注意してください。
製品の破損や、壁・床・ドアなどを傷つける原因になります。
- ・ お子様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じることがあります。
そのような場合は直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

● お手入れ・保管時の注意

- ・ クッションの端部を持って無理やりはがさないでください。
製品の破損の原因になります。
- ・ 屋外に放置したり、直射日光に当てたりしないでください。
劣化および変色の原因になります。
- ・ ストーブなどの火気に近づけて使用しないでください。
火災や変形、変色の原因になります。
- ・ 温泉水や入浴剤の入ったお湯をかけてのお手入れはしないでください。
製品が劣化し、けがの原因になります。
- ・ 次にあげるものではお手入れしないでください。
 - ・ シンナー、クレゾール
 - ・ 酸、アルカリ性洗剤
 - ・ 塩素系薬剤(洗剤)
 - ・ 磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの
- ・ 本製品はよく乾かしてから保管してください。
製品の劣化の原因になります。

4. ご使用の前に



各部クッションの取り付け

! 注意

- ・取り付け前に、クッションの状態を確認してください(ワレ、裂け、ヒビ等)。
- ・製品の特性上、表面に気泡が生じている場合がありますが、使用上問題はありません。

1. 背のクッションを、向きを確認して本体フレームに取り付けます。

- ・クッションの形状および凸部の表記を確認してください。

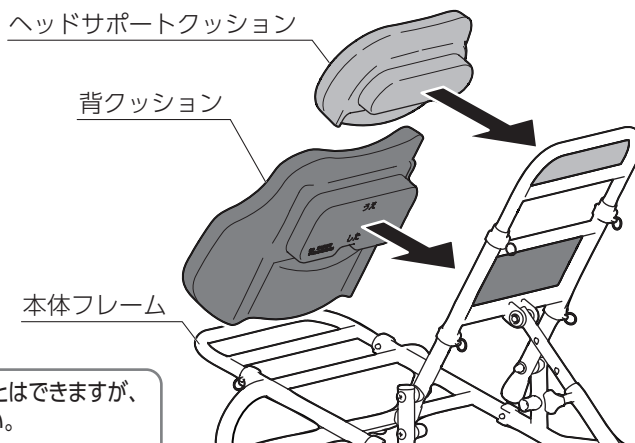
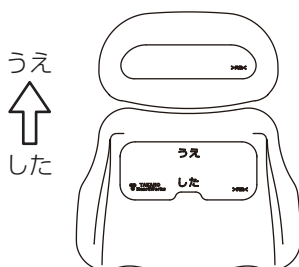


! 注意

背クッションは上下反対に取り付けることはできませんが、必ず方向の指示に従ってご使用ください。転落・けがの原因となります。

2. 座のクッションを、向きを確認して本体フレームに取り付けます。

- ・クッションの形状および凸部の表記を確認してください。

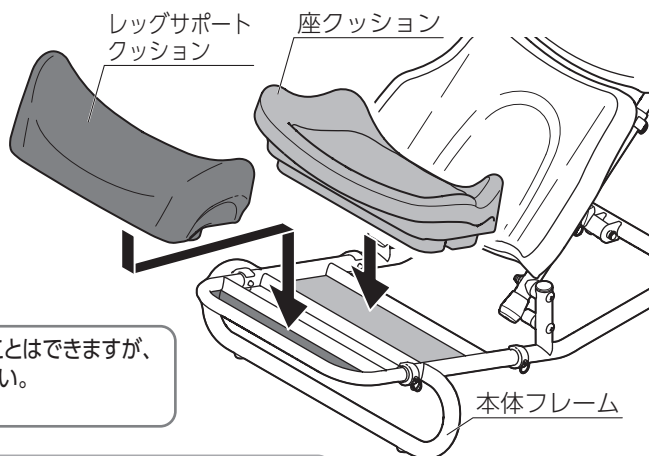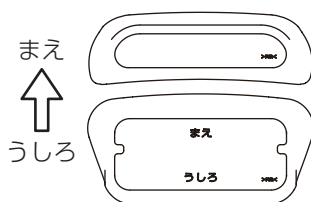


! 注意

座クッションは前後反対に取り付けることはできませんが、必ず方向の指示に従ってご使用ください。転落・けがの原因となります。

3. 各部クッションがしっかり固定されているか確認します。

- ・クッション裏面の凸部が本体フレームのパイプに合い、上からしっかり押さえられているか確認します。

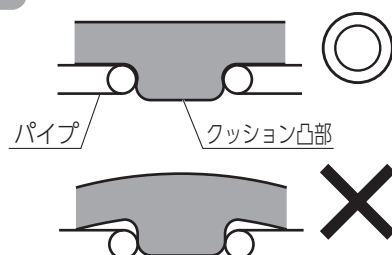


! 注意

- ・クッションがしっかりはまっているか確認してください。使用中に外れて、転倒・けがの原因になります。
- ・クッション部のみを掴んで持ち上げたり、移動させたりしないでください。故障の原因になります。

ヘッドサポートの高さ調節

- ①左右の調節ピンを、手で樹脂部を押し広げながら外します。
※出荷時ヘッドサポートは一番低い位置にセットされています。
初回セットの際は、下部の調節ピンも外して調整してください。
なお、出荷位置以外でご使用の場合、下部調節ピンでの調整は不要です。
- ②ヘッドサポート部の高さは5段階で調節できます。(4cmピッチ)
- ③調節ピンの向きを確認し、『パチン』とはまるまで差し込んでください。

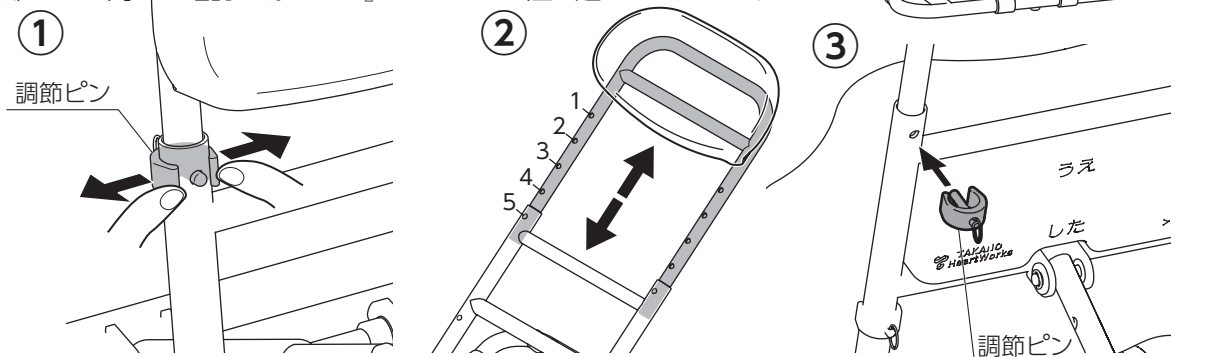


⚠ 注意

- ・調節ピンのリング部を引っ張って外さないでください。
調節ピンが破損し、けがの原因になります。
- ・調節ピンが左右しっかりと固定されているか確認してください。
本体が不安定となり、転倒・けがの原因になります。

レッグサポートの長さ調節

- ①レッグサポートクッションを取り外します。
- ②左右の調節ピンを、手で樹脂部を押し広げながら外します。
- ③レッグサポート部の長さは6段階で調節できます。
(2cmピッチ)
- ④調節ピンの向きを確認し、『パチン』とはまるまで差し込んでください。

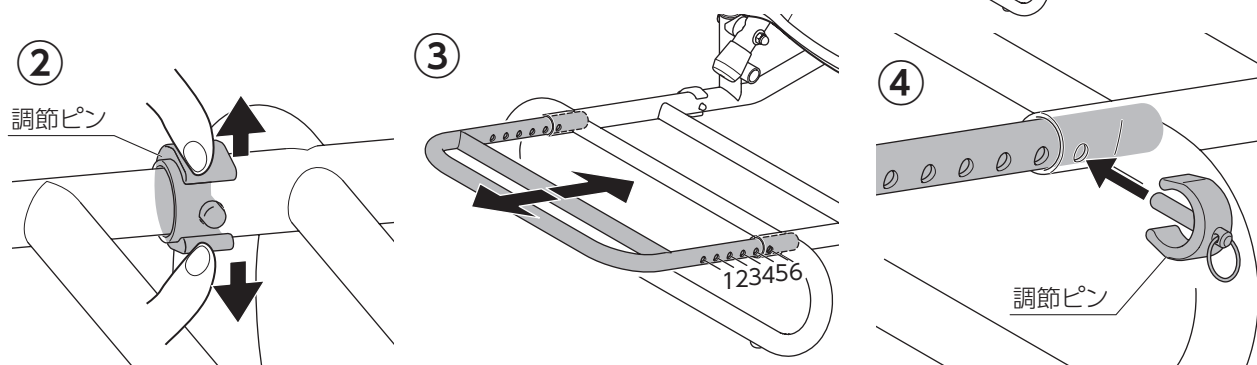

5. 各部の調節方法


背の角度調節

①手で背部を支えながら、角度調節ノブを手で引きます。

②パイプをスライドさせ、穴に合わせてください。

背角度は2段階で調節できます。(120°・140°)

③確実に角度調節ノブが入っていることを確認してください。

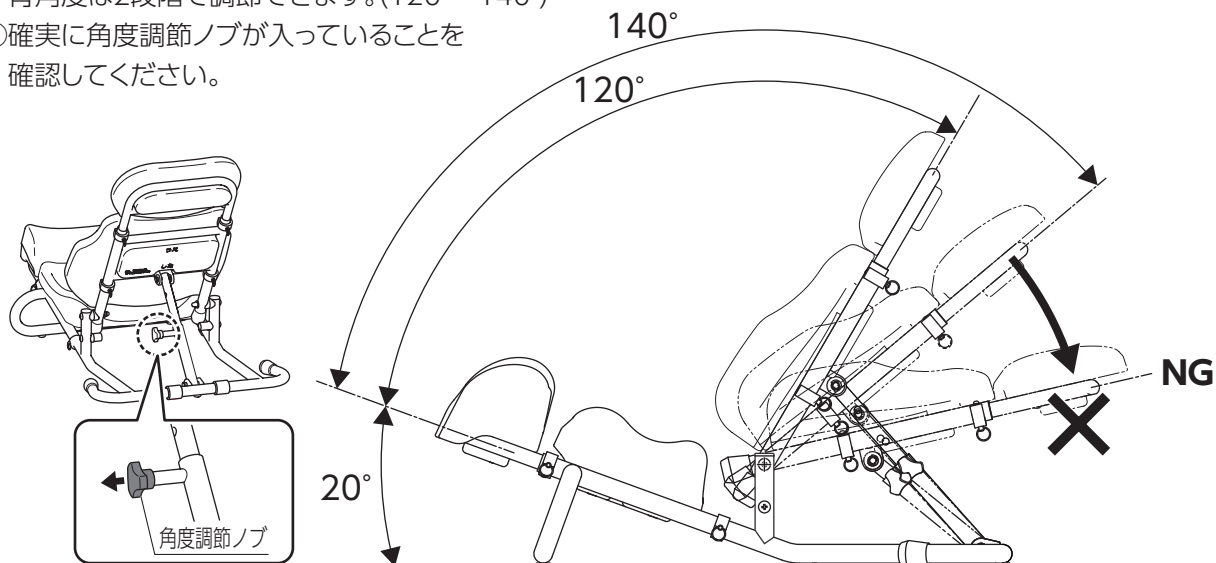


注意

- ・調節後は、背を動かしてみてもしっかり固定されていることを確認してください。調節ピンが破損し、けがの原因になります。
- ・背はフラットの状態で使用しないでください。製品の破損や転倒につながり、けがの原因になります。

ご使用になる前の点検

- ・各部の調節ピンが、確実に固定されていることを確認してください。
- ・背の角度の動きが、スムーズに行えることを確認してください。
- ・ネジのゆるみがないことを確認してください。

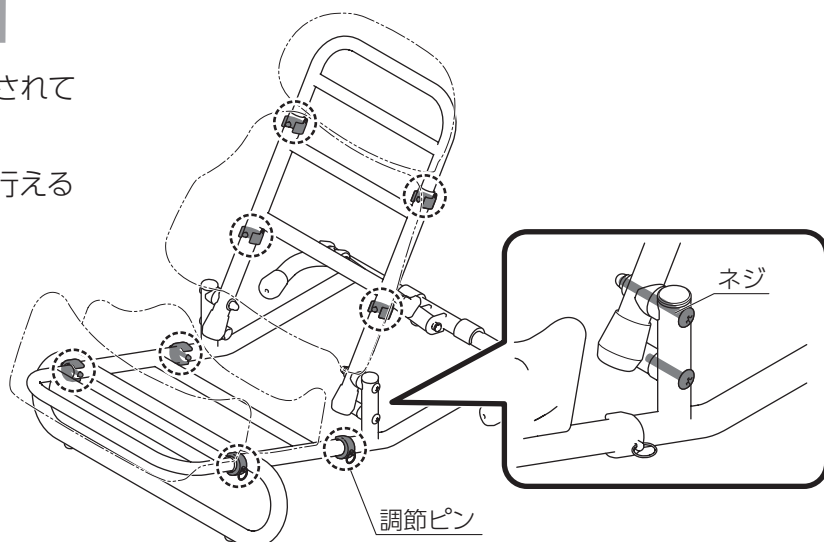

6. 脚部の使い方


開きかた

- ①外れ防止ベルトを外します。
- ②フレームを広げてください。


本体との取り付け

- ①本体と脚部の位置決めシールを確認し、前後を合わせます。
(脚部の「うしろ」シールを確認してください)
- ②パイプキャッチにはめこみます。(4箇所)
- ③外れ防止ベルトで、本体と脚部を留めます。(前後)


【正面側】

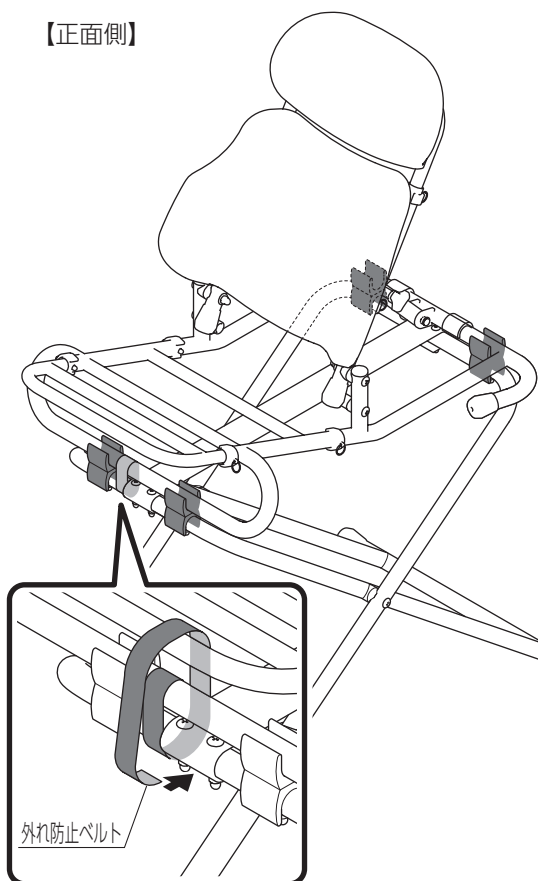

【背面側】

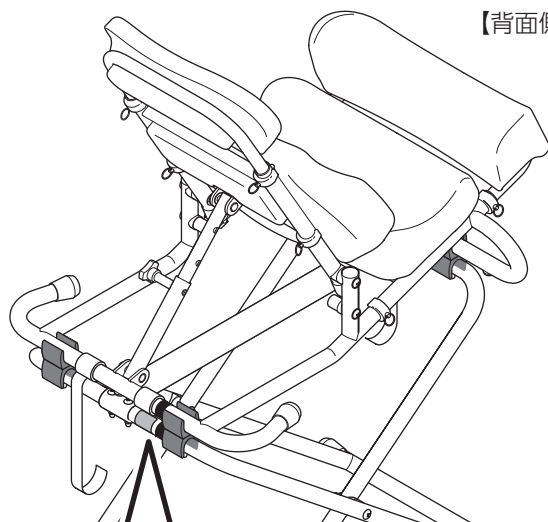

【背面図】

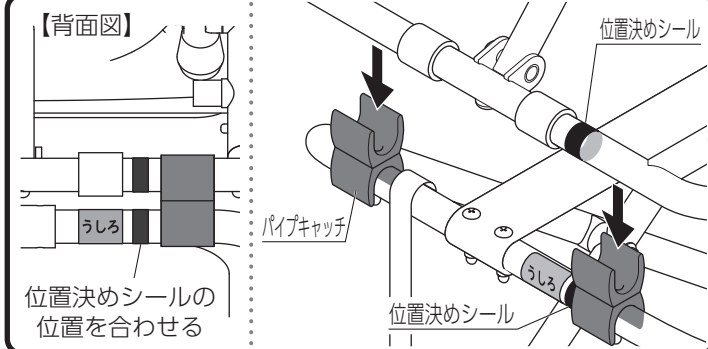


注意

取り付け後は、動かしてみてもっとしっかり固定されていることを確認してください。
本体が外れ、転倒し、けがの原因になります。

7. サポートベルトの使い方

本体への取り付け

- ①ベルトのフックを、ピンのリングに留めます。(外側から)
- ②お子様の身体に合わせ、サポートベルトの長さを調節します。
取り付け箇所(胸部、腹部、大腿部、下腿部)

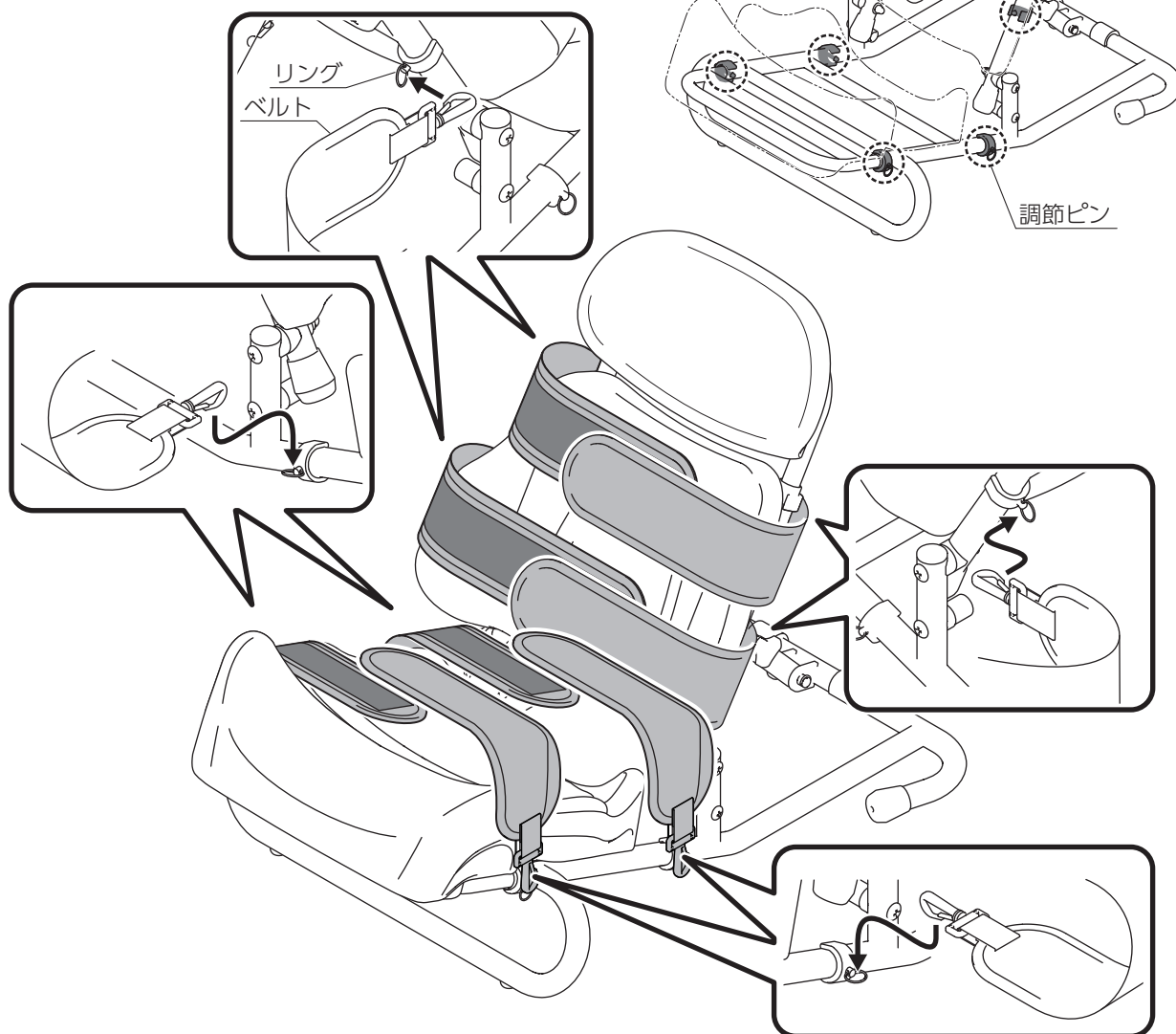

⚠ 注意

- ・取り付け後は、動かしてみてしっかり固定されていることを確認してください。ベルトが不意に外れ、転倒し、けがの原因になります。
- ・ベルトを交差させてのご使用はお控えください。思わぬ事故・けがの原因になります。

8. お手入れの方法



注意

次にあげるものでは、お手入れをしないでください。

- ・シンナー ・クレゾール ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系薬剤（洗剤）
- ・磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの

アルコール以外で消毒しないでください。

クッションの取り外し

ヘッドサポート・背・座・レッグサポートの裏面から凸部を押すと、取り外しができます。



注意

- ・クッションの端部を持って無理やりはがさないでください。製品の破損の原因になります。



フレーム部およびクッションの洗浄のしかた

中性洗剤をうすめて、スポンジかやわらかい布に含ませ汚れをとったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、かげ干しか、乾いた布で拭き取ってください。

※十分なお手入れをしても、使用環境によりカビが発生する場合があります。

※製品の特性上、側面や背面の成形跡が経年劣化によって変色をしてくる場合がありますが、使用上問題はありません。

消毒を行う場合は、消毒用エタノール(76.9～81.4%)を使用してください。

※脚部のお手入れも同様に行ってください。

サポートベルトのお手入れ

水、もしくは、ぬるま湯（40度以下）で手洗いしてください。

形崩れしないよう、洗濯後すぐに形を整えて手でしぼるなどをしてから陰干しして、しっかり乾燥させてください。

※ 洗濯機、乾燥機は使用しないでください。

※ 蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。

8. お手入れの方法

カビの発生予防のしかた

使用後、製品に熱いお湯をかける(カビの栄養素を洗い流す)

ご使用になった製品に熱めのお湯 (40～60℃くらい) をかけ、
せっけんの洗い残しなどの、カビの栄養素を洗い流します。
※やけどには十分にお気をつけください。

冷たい水をかける(温度を下げる)

次に、冷たい水をかけて、熱気がこもらないように冷やします。

水気をとり乾燥させる(湿度を下げる)

最後に製品の水気をとり、直射日光をさけて風通しのよい場所で乾燥させます。

本体または脚部に水が入った場合の、水抜きのみかた

製品を傾け、かるく揺らして水を抜いてください。

保管のみかた


高温・多湿の場所には保管しないでください。カビやシミ、ワレの原因になります。
また、直射日光が当たらないところで保管してください。
変色や変形・そり などの原因になります。

立てて保管するとき

右図のように平坦で本体が安定する場所以外に置かないでください。
本体が転倒し、製品が破損する原因になります。

横にして保管するとき

本体の上に重いものを載せたり、強い衝撃を加えないでください。
本体が破損、または外れる原因になります。

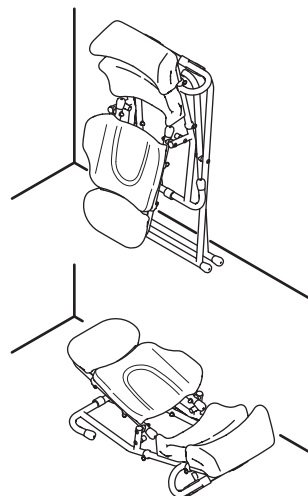

9. 困ったときには

交換部品

ヘッドサポートクッション・背クッション・座クッション・レッグサポートクッション・調節ピン・外れ防止ベルト・脚ゴム・クッションゴムは消耗品ですので、汚れたり、破損した場合はお買い求めになった販売店または当社にご相談ください。

保証とアフターサービス

商品のご購入に関するお問い合わせ、ご相談は…お買い求めの販売店へ

商品の仕様等に関するお問い合わせ、ご相談は…下記お客様ご相談窓口へ

不具合が発生したとき

● 保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にお申し出ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理によって使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

部品供給、または修理対応期間はメーカー製品廃番後5年となります。

ただし、期間内であっても破損箇所によっては、部品供給、または修理できないケースがございますのでご了承ください。

タカノお客様ご相談窓口



フリー
ダイヤル

0120-825-845


(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話からもご利用いただけます。)

※混雑時にはつながりにくい場合があります。時間を置いてからおかけ直してください。


10. 仕様

商品寸法図

本体部


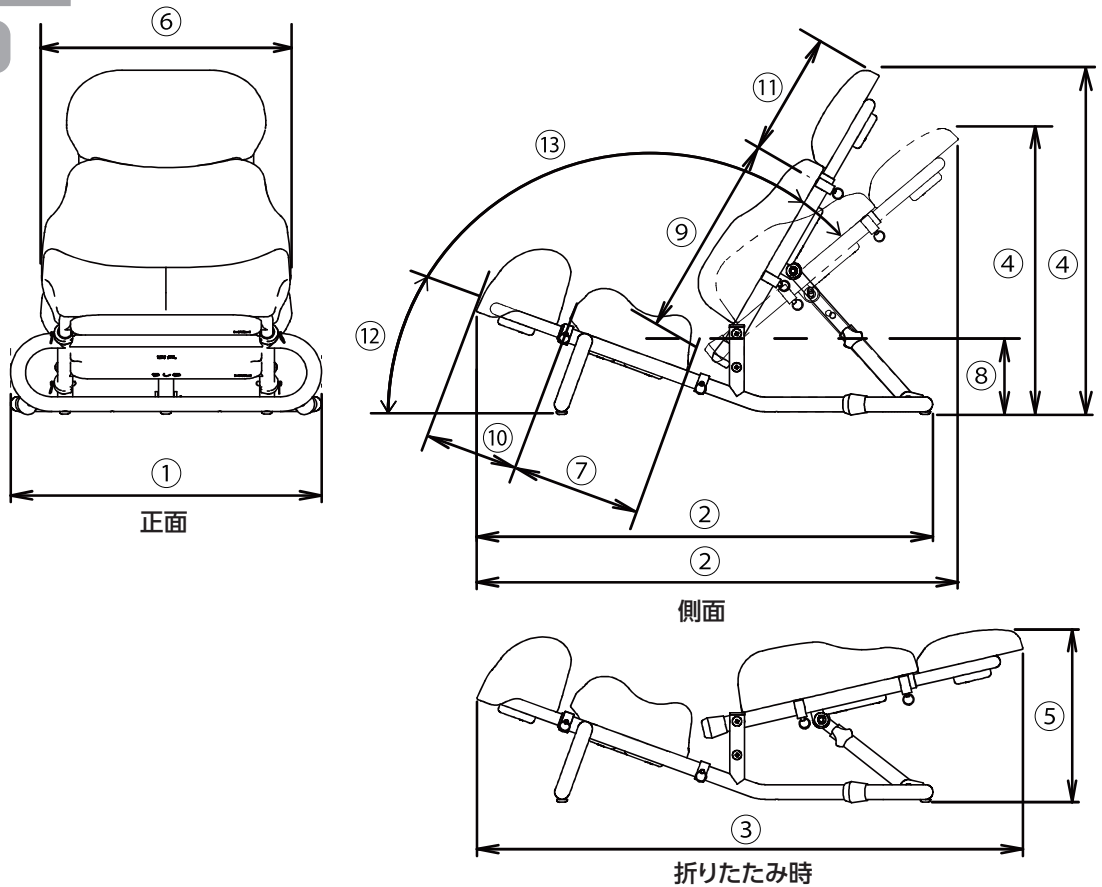


脚部

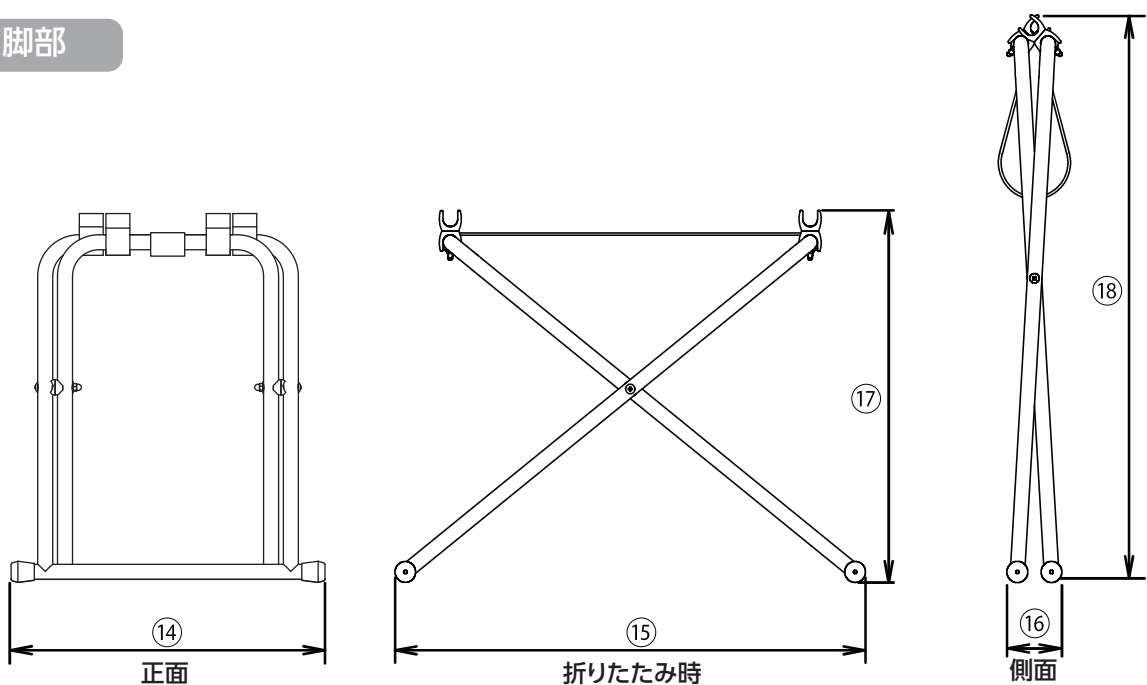

10. 仕様

サポートベルト

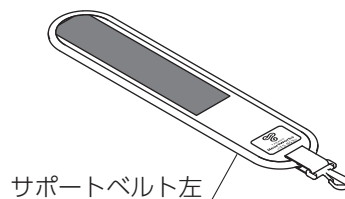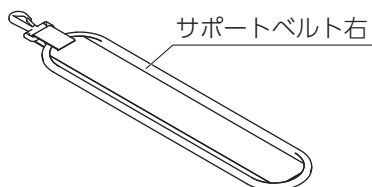


仕様一覧

(単位 mm)

品番		TS-851		TS-852	
品名		本体部		脚部	
全幅		①	465	⑭	460
全奥行	使用時	②	685～940	⑮	710
	折りたたみ時	③	815	⑯	90
全高	使用時	④	430～655	⑰	550
	折りたたみ時	⑤	255	⑱	835
座の幅		⑥	375	-	
座の奥行		⑦	190	-	
座の高さ		⑧	100 ※脚部装着時は 620	-	
背もたれの長さ		⑨	340	-	
レッグサポートの長さ		⑩	135～235 【20mm×6段階】		
ヘッドサポートの長さ		⑪	175～335 【40mm×5段階】		
座の角度		⑫	20°		
背もたれの角度		⑬	120°、140° 【2段階】		
重量		4.2 kg		1.8 kg	
対象者目安 ～145cm / ～40kg					
材質	本体部、脚部	アルミニウム			
	脚ゴム	EPDM			
	調節ピン	ポリプロピレン、スチール			
	クッション	ポリウレタン			

品番	TS-853
品名	サポートベルト
全幅	80
全長	370
厚み	5
材質	クロロプレンゴム、ナイロン、POM

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

心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks®

U R L <https://www.takano-hw.com/>

Rev.1 (2023.07.19)