

にこにこAGクッション 取扱説明書

ごあいさつ このたびは、タカノ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


- ・この説明書にはにこにこAGクッションを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。
- ・ご使用前によくお読みの上、正しく安全な取り扱い方法を十分理解されてからお使い下さい。
- ・この説明書は、いつでも出して見ることができるよう、大切に保管して下さい。
- ・お求めいただきました商品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。

1. 特徴


- ・このクッションは、通気性と水分透過性に優れた素材のクッション材と、カバーを使用しています。そのためムシにくく、洗濯も容易で、いつでも清潔にお使いいただけます。
- ・クッション内部に特殊なカットをしており、座位保持と体圧分散性の優れたクッションです。
- ・クッションとカバーは、抗菌防臭加工を施しており、菌の繁殖を抑制します。
- ・繰り返しの洗濯にも耐えうる持続抗菌性、人や環境に安全な抗菌剤を使用しています。

2. 仕様

タイプAG1・AG2

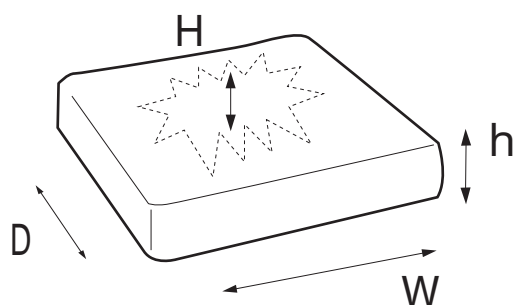

- にこにこAGクッションはクッションに特殊なカットをしているため、上下前後があります。クッション座面の前表記を確認し、正しくお使いください。

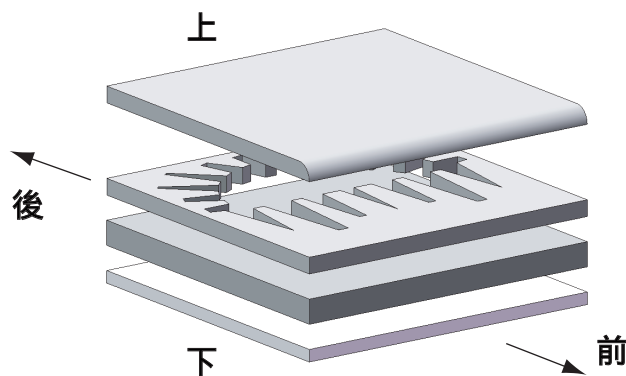

4層構造のクッション

- ・ 素材：クッション ポリウレタン、ポリエステル
カバー ポリエステル
(裏面滑り止め軟質アクリル樹脂加工)

タイプ	品番	W	D	H	h	重量
AG1	TC-AG1	400	400	70	90	600g
AG2	TC-AG2	400	400	55	70	500g

※Hはカット部分を除いた座る部分の高さ

3. ご使用方法

- カバー底面の滑り止め加工面を必ず下にして車いす上に置いて使用して下さい。
- 底面の前表示がある側を前方向（膝側）にして置いて下さい。

⚠ 注意

- ・クッションを折り曲げて使用しないで下さい。
- ・車いすに使用する場合は、底面が高くなります。アームサポート、フットサポート等の高さをご確認下さい。また必要に応じて作業療法士、理学療法士、ケアマネージャー等の専門家のアドバイスを受けて下さい。
- ・クッションを置く向き、方向を確認してから使用して下さい。
- ・クッションの上で飛び跳ねたりしないで下さい。
- ・カバーのファスナーを閉じる際に、中身のクッション材にファスナーがかまないように軽く押し込みながら閉じて下さい。
- ・車いす等に挟まった状態で、取っ手を強く引っ張らないで下さい。
- ・火気には近づけないようにして下さい。

4. お手入れ方法

- にこにこAGクッションは、そのまま丸洗いができます。

- ・クッションの中身をださずに、液温30℃以下にて中性洗剤でソフト洗いしてください。汚れがひどい場合には浸け置きするか、直接洗剤を塗布して洗濯をして下さい。
- ・脱水は、ねじって絞ったりはせずに短時間で脱水して下さい。
- ・乾燥後は、形を整えて平干しして下さい。
- ・カバーのみを洗濯する場合は、ファスナーを閉じて洗ってください。
- ・乾燥機にもそのまま入れていただけます。
- ・施設等での消毒は、オゾン消毒やアルコール消毒等を行い、家庭での消毒は、アルコールを含ませた布等で拭いて下さい。頻繁な消毒は避け、月に一度位として下さい。
- ・カバーのわずかな汚れは柔らかい布に中性洗剤を含ませ、軽く拭きとって下さい。

⚠ 注意

- ・クッションの中身のみで洗わないで下さい。クッションの変形・劣化の恐れがあります。
- ・乾燥の際は、クッション内部が固定されないサイズの乾燥機をご使用下さい。
- ・アイロンがけはしないで下さい。
- ・ドライクリーニングや塩素系の漂白はしないで下さい。
- ・取っ手を使って干さないで下さい。

5. 抗菌防臭加工について

- ・抗菌防臭加工とは、細菌の付着や繁殖を抑制し防臭するための加工を施したものです。
- ・日本イオン株式会社のナノシルバー分散液を使用しています。



袋: PE



説明書・ダンボール

■お問い合わせ先

 心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks **タカノ株式会社**
〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331
TEL. 0265-72-3157 FAX. 0265-72-3203

タカノ お客様ご相談窓口  フリーダイヤル **0120-825-845**

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

※混雑時にはつながりにくい場合があります。 時間をおいてからお掛け直してください。