

乗換ボード のせかえくん TB-501・502


取扱説明書

ごあいさつ

このたびはタカノ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・ この説明書は、「乗換ボードのせかえくん」を安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。
- ・ ご使用前に、よくお読みの上、正しく安全な取扱い方法を十分理解されてからお使いください。
- ・ この説明書は、いつでも出して見ることができるよう、大切に保管してください。
- ・ お求めいただきました商品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。


1.各部の名称

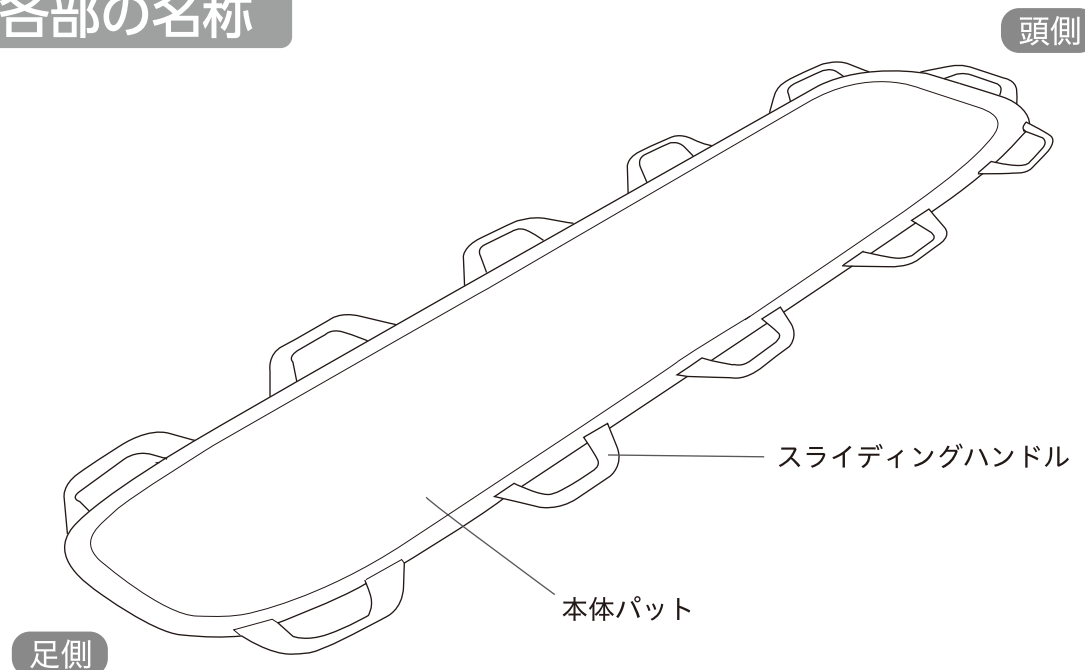

2.ご使用方法


手順 1

寝ている方を側臥位にして、
「移乗ボード」の「せかえくん」を、
敷きこみます。

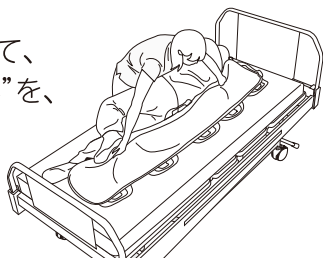


手順 3

「のせかえくん」の
スライディングハンドルを
2ヶ所持ちます。

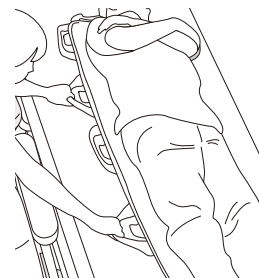


手順 2

移乗させる機器をベッドに
横付けし、ベッドの高さを調節
(ベッドの高さを2~3cm高く)
し、機器のキャスターをロック
します。

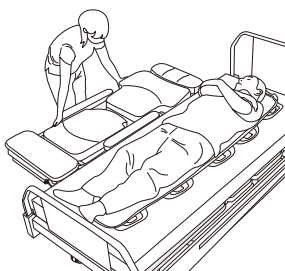

手順 4

スライディングハンドルを
ゆっくり引き寄せ、機器の
中心に移乗させてください。

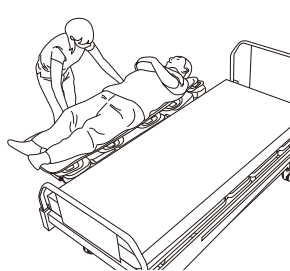

- 本製品は、スライディングハンドルを用いて、水平移乗や持ち上げての使用が可能です。
- 人を完全に持ち上げて使用する場合は、必ず4人で8ヶ所のスライディングハンドルを持って、ご使用ください。



警告

スライディングハンドル1ヶ所に、極端な負荷をかけないでください。スライディングハンドルが外れ、重大な事故につながる恐れがあります。



注意

人を乗せて移乗または持ち上げる際は、乗られた方が製品中央にいることを必ず確認してから使用してください。

3.洗濯方法

- 液温30℃以下にて、中性洗剤で手洗いしてください。



注意

ドライクリーニングや塩素系の漂白はしないでください。また、洗濯機や乾燥機の使用は、おやめください。

4.仕 様

	S サイズ(TB-501)	M サイズ(TB-502)
全幅 X 全長 X 厚さ ※注 1)	400X1740X10	550X1740X10
重 量	750g	900g
耐 荷 重	100Kg	
材 質	防水加工布・ナイロン・ウレタンフォーム	
色	ダークブルー	

単位：mm (注 1：スライディングハンドル部分を除く)



タカノ株式会社 健康福祉部

オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331
TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203

タカノお客様ご相談窓口



フリー
ダイヤル

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

※混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからおかけ直してください。