


バンビーナチェア TS-821~823・828

バンビーナダイニング TS-824・825

バンビーナムーブ TS-826・827

# 取扱説明書

保証書付

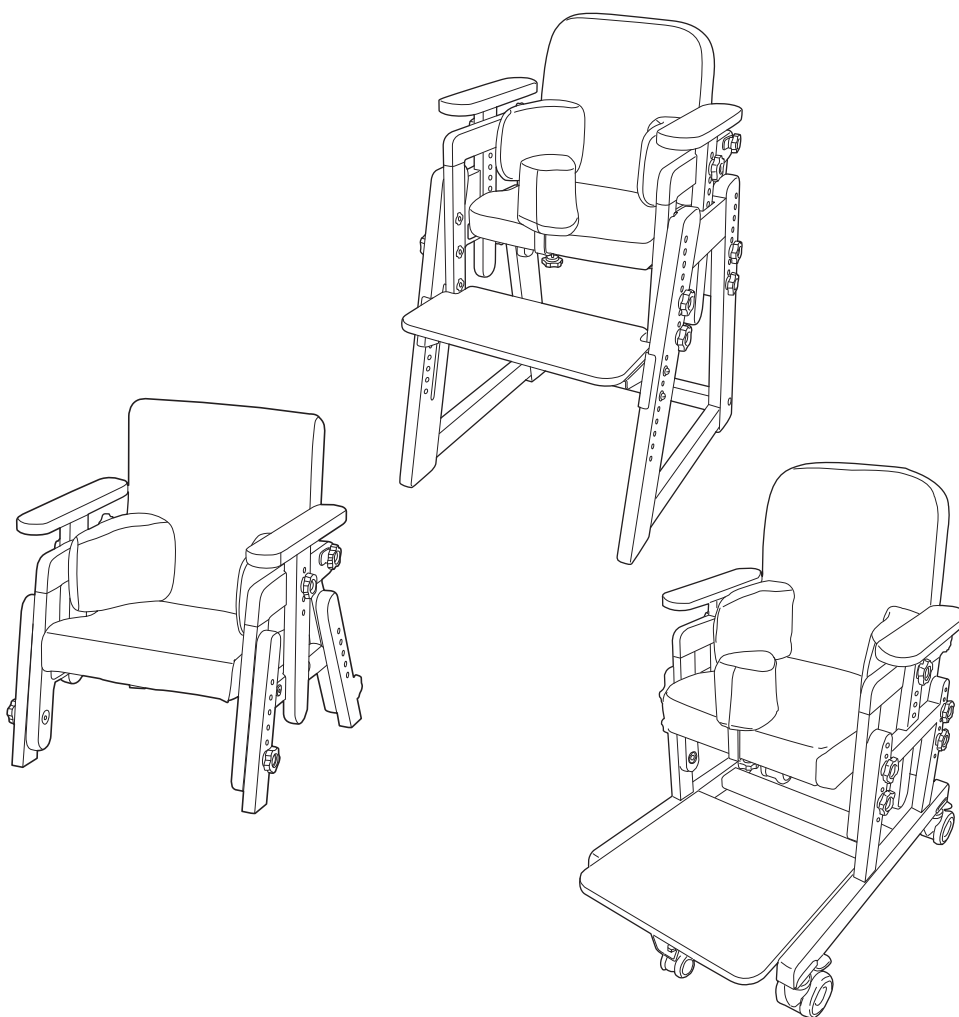

# 1. ごあいさつ・もくじ

## ごあいさつ

このたびはタカノ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項および組み立て方について記載しています。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。


お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## も く じ

1. ごあいさつ・もくじ	1
2. お使いになる前に	2
3. 安全上のご注意	3
4. 各部の名称   バンビーナチェアS/M/Lスリム/L(TS-821・822・828・823)	5
バンビーナチェアダイニングS/M(TS-824・825)	6
バンビーナムーブS/M(TS-826・827)	7
5. 商品の特徴	8
6. 各部の調節方法	9
7. キャスターロックのやり方   バンビーナムーブS/M(TS-826・827)	11
8. Sサイズ～Mサイズへの変更方法	12
9. バンビーナチェアダイニングS/M(TS-824・825)・ムーブS/M(TS-826・827) ダイニング脚～キャスター脚の変更方法	13
10. 仕 様       バンビーナチェアS/M/Lスリム/L(TS-821・822・828・823)	14
バンビーナチェアダイニングS/M(TS-824・825)	15
バンビーナムーブS/M(TS-826・827)	16
11. 日常のお手入れとご注意・お問い合わせ	17
品質保証書・保証規定	18

## 2. お使いになる前に

バンビーナチェアを取り出して、梱包内容に漏れや破損がないことを確認してください。

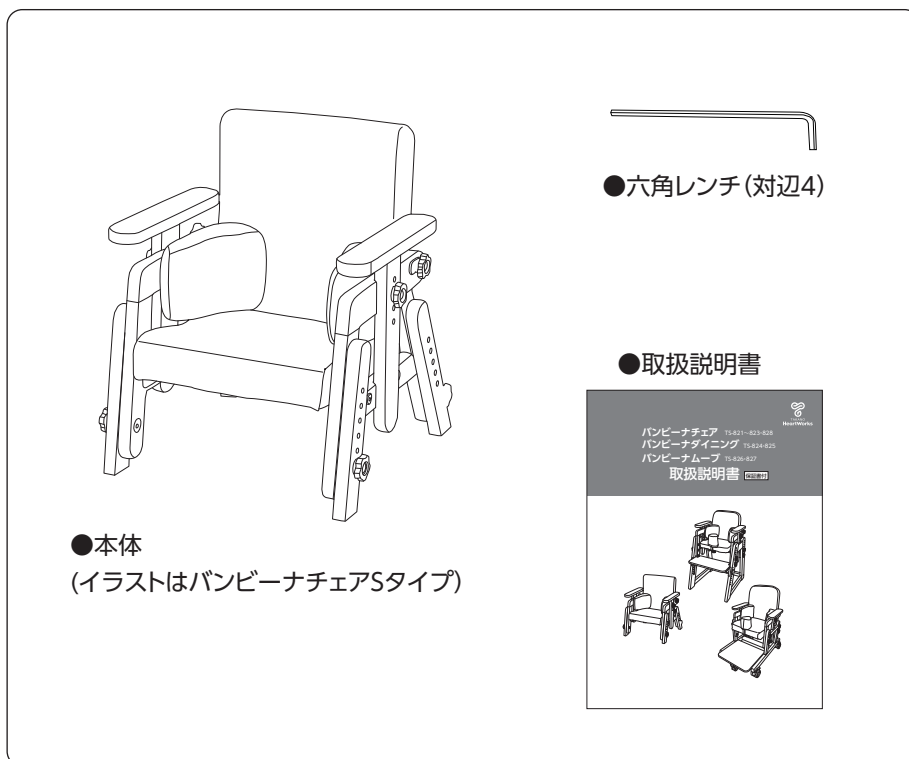

※部品調整では、付属の六角レンチ以外に⊕ドライバー(No3)、スパナ(呼び10)が必要になる部品もございます。  
10～11ページ「7.各部の調整方法」をご確認いただき、付属品以外の工具はご用意ください。

万一、梱包内容に不足や破損があった場合や不明な点は、お買い求めいただいた販売店、または下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

タカノお客様ご相談窓口  フリーダイヤル **0120-825-845**

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

※混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからおかけ直してください。

### 3. 安全上のご注意

製品を使用する上でご理解いただきたい警告があります。ここに記載した内容を見逃した場合、使用者に重大な損害を被る恐れがあります。よくお読みの上、商品をご使用ください。



#### 警告

取り扱いを誤ると、重大な事故につながる恐れがあります。  
このような使い方はしないでください。



#### 注意

取り扱いを誤ると、障害を負ったり故障の原因となる恐れがあります。ご使用の際にはご注意ください。



#### 警告

- 本商品は、お子さまの体位をサポートする為のいすです。遊具や乗り物・踏み台など、座る目的以外の使い方は絶対にしないでください。転倒や事故・破損の原因となります。
- 商品を破棄するときは、焼却しないでください。有害なガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。
- いすの上に立ったり、飛び跳ねたり、不安定な姿勢で腰掛けしないでください。  
転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- 傾斜面では使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- この商品は一人用です。二人以上、同時に座らないでください。転倒や事故・破損の原因となります。
- ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- 固定グリップは専用のものを適正な本数で取り付けてください。  
取付数が少ないと、破損等の原因となります。
- 本商品は車いすではありません。お子さまを座らせたまま長距離を移動させないでください。  
転倒や事故・破損の原因になります。(バンビーナムーブ TS-826/827)
- お子さまを座らせたまま段差を乗り越えないでください。  
転倒や事故・破損の原因になります。(バンビーナムーブ TS-826/827)
- お子さまが座っている時や乗り降り時など、移動時以外は確実にキャスター全てをロックしてご使用ください。  
ロックをせずに使用すると転倒や事故・破損の原因になります。(バンビーナムーブ TS-826/827)
- 本商品の特性上、お客さまで改造をされることがあるかもしれませんが、改造をした場合は弊社の責任範囲外になります。お客さまの責任で改造等を行ってください。
- 骨盤パッドを取り外して使用しないでください。背の取り付け強度が下がります。




## 注意




- 各サイズの対象者目安は「11.仕様」に記載しています。適正以上の体重の方が座りますと転倒や事故・破損の原因になりますのでお控えください。
- 本商品は屋内用です。屋外でのご使用は、転倒や事故・破損の原因になります。
- 各固定グリップにものを引っ掛けないでください。転倒や破損の原因になります。
- 各部の調整をする時は、手や指を挟まないように操作してください。ケガの原因になります。
- 固定グリップやネジ、金具類はガタツキ、グラツキがないかをときどき点検してください。必要に応じて増し締めをしてください。適正に固定されていないとケガや破損の恐れがあります。
- 肘や背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- 肘、座面、背もたれに物を載せないでください。  
転倒や、落下してケガや床面のキズの恐れがあります。
- 商品には、強い衝撃を与えないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- キャスターロックをした状態で押さないでください。タイヤが磨耗するのと同時にフロアの床にキズや汚れが付く恐れがあります。(バンビーナムーブ TS-826・827)
- 木製脚の裏やキャスターにごみや汚れが付着し、床にキズ等をつける恐れがあります。  
ご注意ください。
- 座った状態で、いすを傾けないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- 幼児一人では、使用させないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 座らせたままでの移動はしないでください。ケガや破損の恐れがあります。  
(バンビーナチェア・バンビーナダイニングTS-821～825・828)
- 座らせたままでの調整はしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。
- 動かす際は、本体フレームを持ってください、背等を持つと緩みの原因となります。
- 直射日光や雨風の当たる場所・ストーブ等の熱が直接あたる場所・湿気・乾燥の著しい場所での使用や保管は避けてください。変形や変色・目割れ、故障や破損の原因となります。
- 水などが付いた場合はすぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと故障やさび・変色の原因になります。
- 床面の平らな場所に置いてください。転倒や商品の変形の原因になります。
- レザー仕様については、色移りにご注意ください。新聞紙や印刷物、ビニール製品や塗料を使用しているものと長時間接触すると変色や変質する恐れがあります。

## 4.各部の名称 バンビーナチェア S/M/Lスリム/L TS-821・822・828・823

Sサイズ TS-821・Mサイズ TS-822



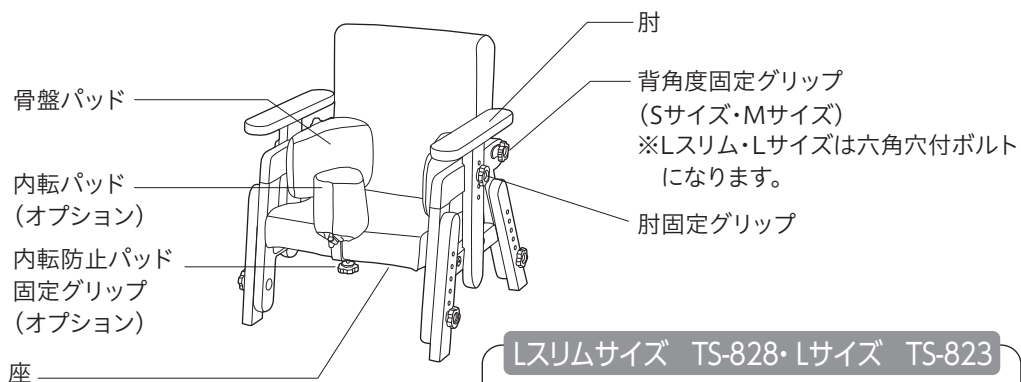


Lスリムサイズ TS-828・Lサイズ TS-823

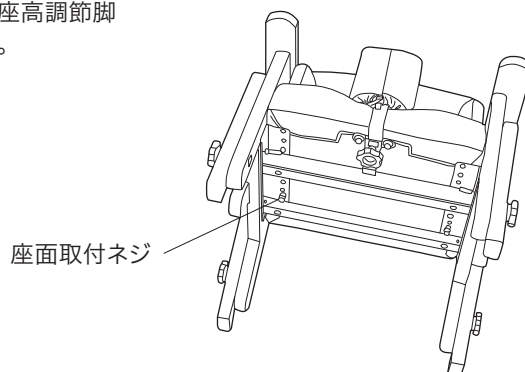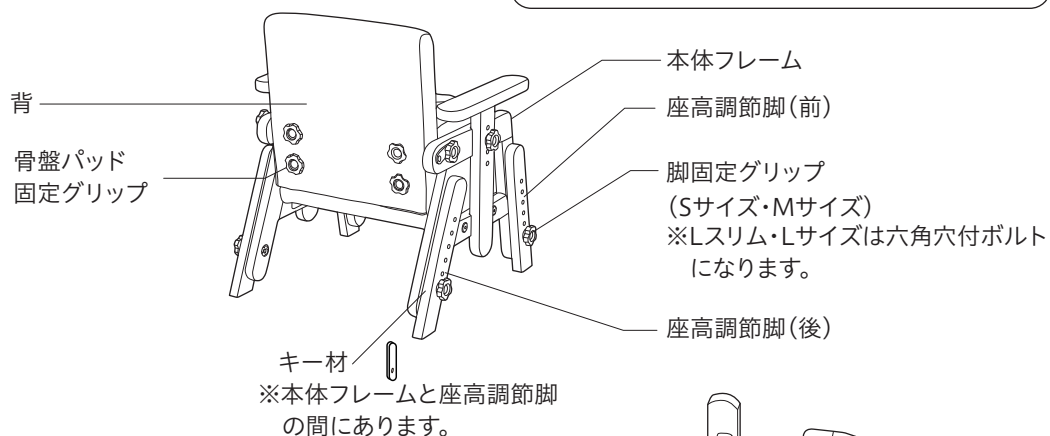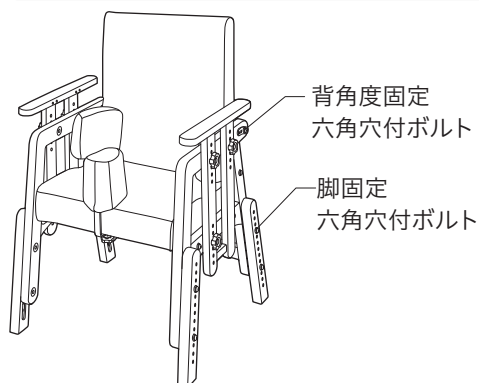


## 4.各部の名称 バンビーナチェアダイニング S/M TS-824・825

Sサイズ TS-824・Mサイズ TS-825

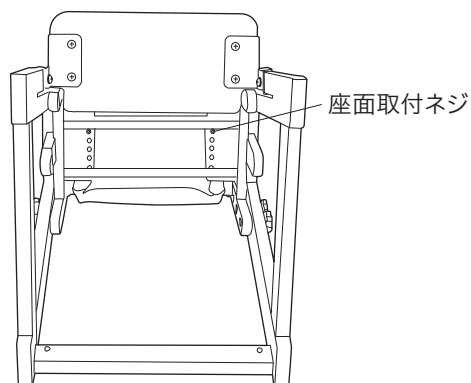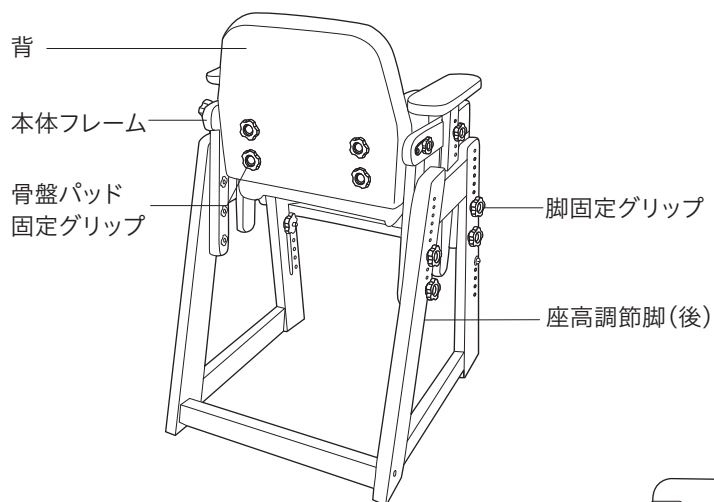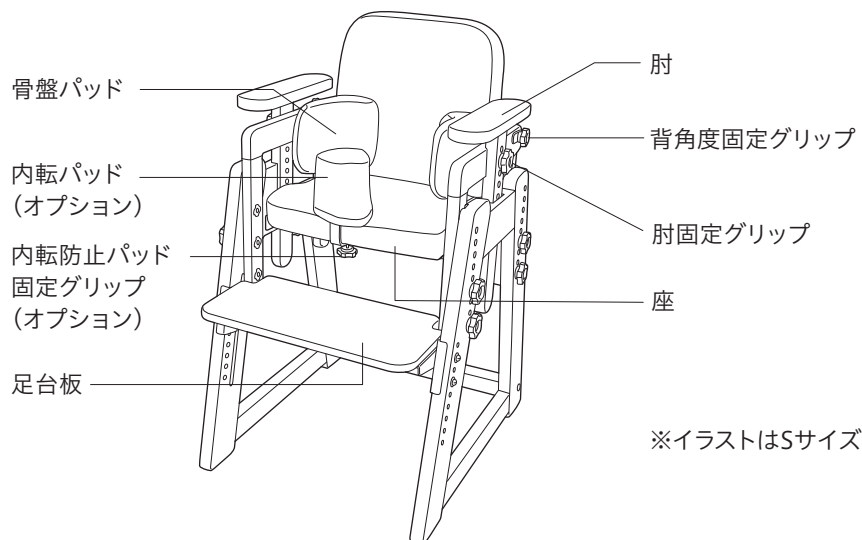

## 4.各部の名称 バンビーナムーブ S/M TS-826・827

Sサイズ TS-826・ Mサイズ TS-827

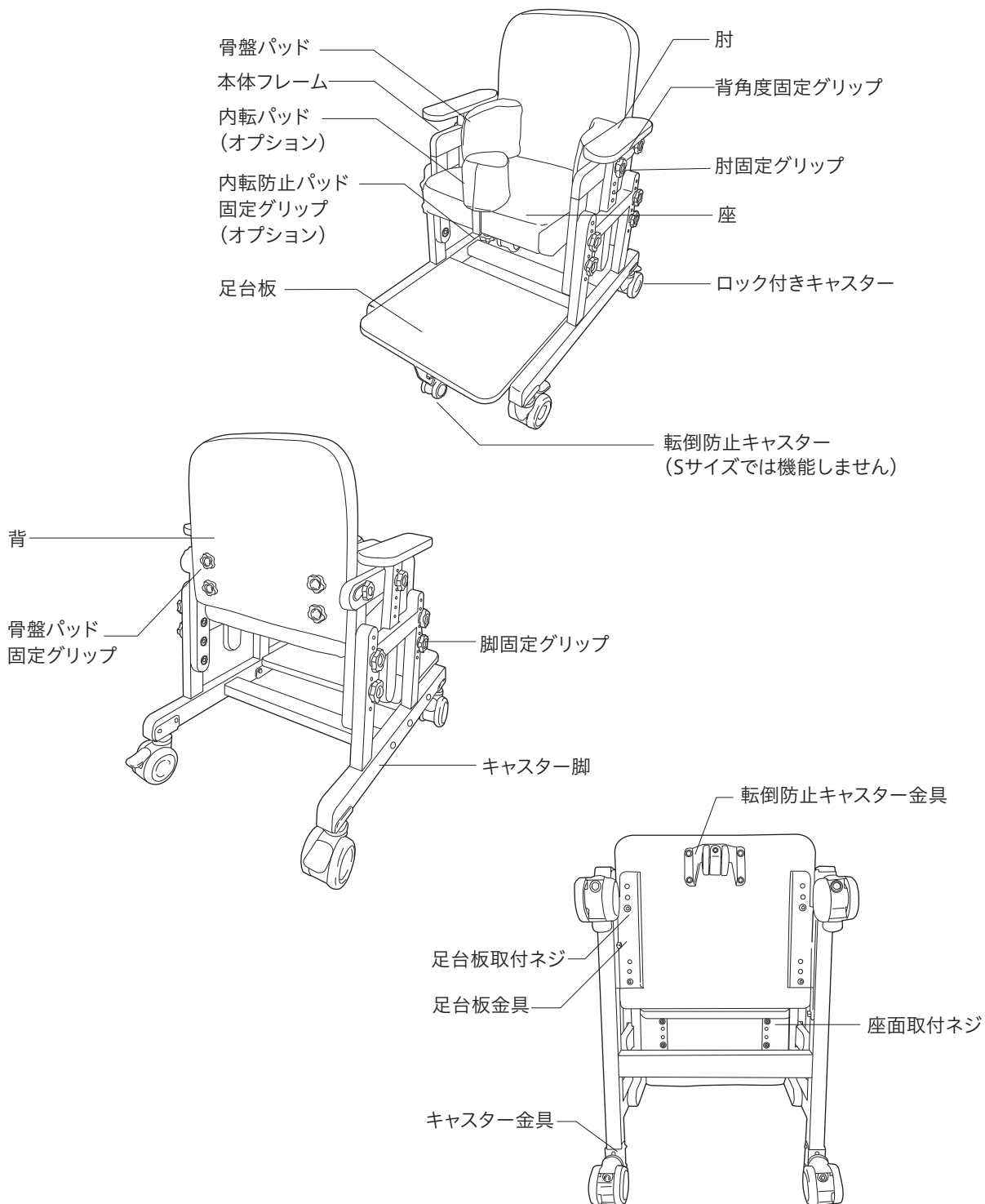



## 5.商品の特徴


バンビーナチェアシリーズは、お子さまの成長に合わせ各部位を調節することができます。

### 全シリーズ共通

●骨盤パッド  
内外に調節できます。

●内転防止パッド  
(オプション)  
前後方向に調節  
できます。

●座面  
座面の奥行きを調節  
することができます。  
※④ドライバー(No.3)  
をご用意ください。

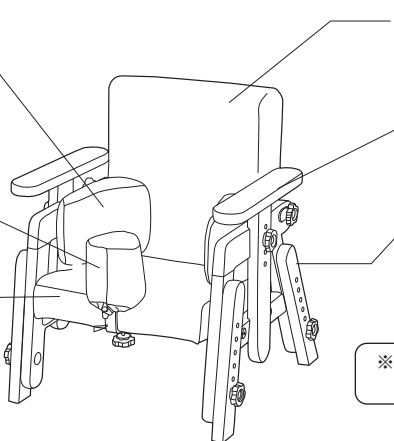

●背  
角度調節できます。

●肘  
座面から肘の高さが調節できます。

●脚  
全体の高さを調節することができます。


※上記図はSサイズ・Mサイズになります。  
Lスリム・Lサイズは形状が若干異なります。



### 警告

骨盤パッドを取り外して使用しないでください。背の取り付け強度が下がります。


### ダイニング

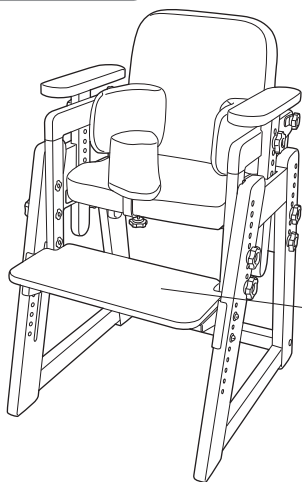

●足台板  
前後方向に調節する  
ことができます。  
※付属の六角レンチ(対辺4)  
をご使用ください。

●足台板  
上下方向に高さを調節  
することができます。  
※付属の六角レンチ(対辺4)  
をご使用ください。

### ムーブ

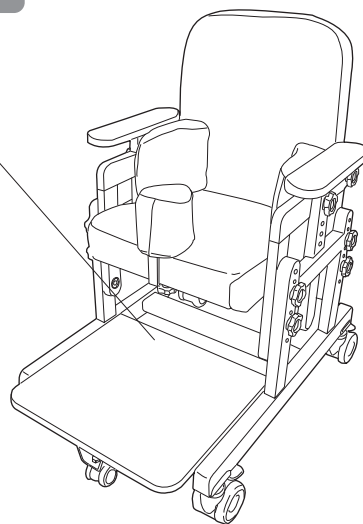

※調節範囲などの詳細は15～17ページ「11.仕様」をご確認ください。  
調節のやり方は10～11ページ「7.各部の調節方法」をご確認ください。



### 注意


上記調節以外での調節や改造をしての使用については、弊社の責任範囲外になります。  
お客様の責任で改造等を行ってください。

## 6. 各部の調節方法

### 1. 座の高さ


- バンビーナチェアS/M 脚固定グリップを各脚1個ずつ(計4個)取り外し、左右前後の座高調節脚を同じ穴の数だけ移動し、脚固定グリップにて固定してください。
- バンビーナチェアスリム・L 六角レンチにて、六角穴付ボルト(計8個)をゆるめ、高さを調節してからしっかりと六角レンチにて固定して下さい。
- バンビーナダイニング・ムーブS/M 脚固定グリップを左右合計8個取り外し、高さを調節してからグリップをしっかりと固定します。

※ムーブ・ダイニング以外は、本体フレームと調節脚の間にキー材があります。座高調節の際に、キー材を紛失しないようご注意ください。

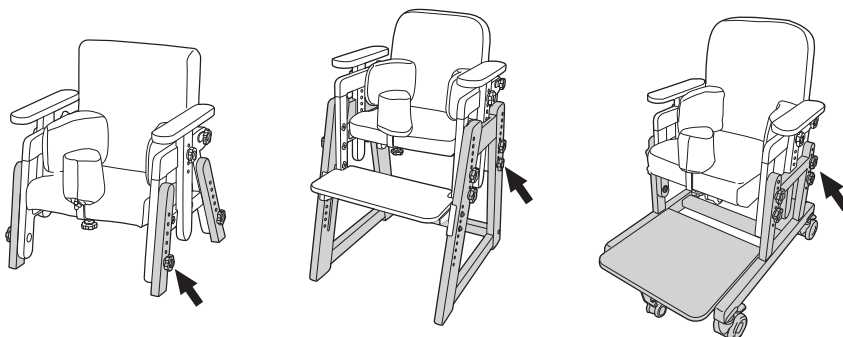


### 2. 座の奥行き

座裏面に取り付けてあるネジ4個を、⊕ドライバー(No.3)にてはずし、座を移動して穴を合わせてネジで固定してください。

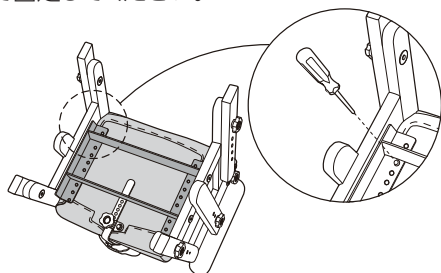


### 3. 肘の高さ

肘固定グリップの片側(Lサイズは3ヶ所)をはずし、肘の高さを調節し穴を合わせて固定グリップで固定してください。

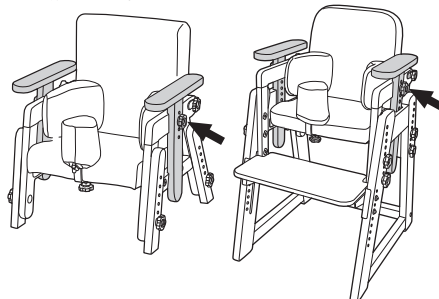

### 4. 骨盤パット

骨盤パッド固定グリップを左右各2個ずつ(計4個)取り外し、骨盤パッドの位置を調節し穴に合わせて固定グリップで固定してください。

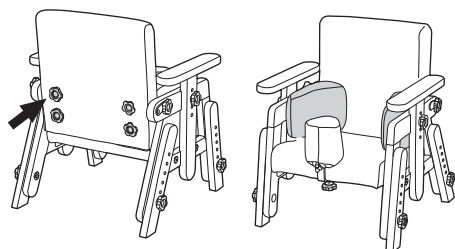

### ! 注意

商品の組立は、記載している手順・方法通りに行ってください。誤った手順・方法で組み立てますと、ケガや破損の恐れがあります。

### ! 注意


固定グリップは、適切な数を取り付けてください。少ない数で取り付けると脚部と座部が外れる可能性があります。

## 6. 各部の調節方法

### 5. 背の角度


背角度固定グリップ左右合計2個を外し、背の角度を調節後、位置決め金具の穴に合わせて固定グリップで固定してください。

Lサイズは六角穴付ボルトになります。付属の六角レンチにてゆるめ、調節してからしっかりと六角レンチにて固定して下さい。

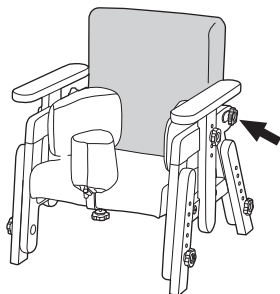


### 6. 足台板の高さ TS-824・825

付属の六角レンチにて、六角穴付ボルト左右合計4個をゆるめ、高さを調節してからしっかりと六角レンチにて固定して下さい。

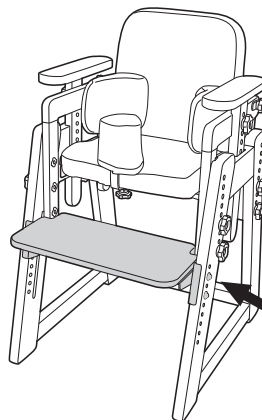


### 7. 足台板の奥行き TS-826・827

足台板の裏にある足台板金具に取り付いているネジ4個を、付属の六角レンチにてゆるめ、調節してからしっかりと六角レンチにて固定してください。

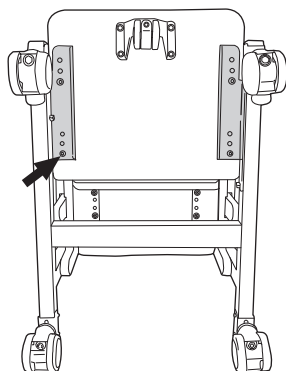

### 8. 内転パッド(オプション品)

内転パッド固定グリップを緩め、位置を調節し固定グリップで固定してください。

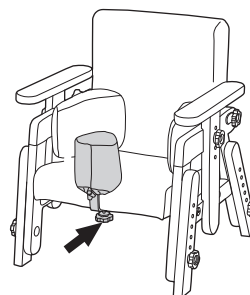

固定グリップは適切な数を取り付けてください。少ない数で取り付けると脚部と座部が外れる可能性があります。




商品の組立は、記載している手順・方法通りに行ってください。誤った手順・方法で組み立てますと、ケガや破損の恐れがあります。

## 7. キャスターロックのやり方

バンビーナムーブS/M TS-826・827

バンビーナムーブS/M(TS-826・827)には、2種類のキャスターがついています。

- ・ロック付きキャスター…製品を移動するためのロック付きキャスター
- ・転倒防止キャスター… 足台板に乗り降りの際に、製品が前に大きく傾くことを防ぐキャスター (Mサイズのみ機能) ※ロック機構はありません

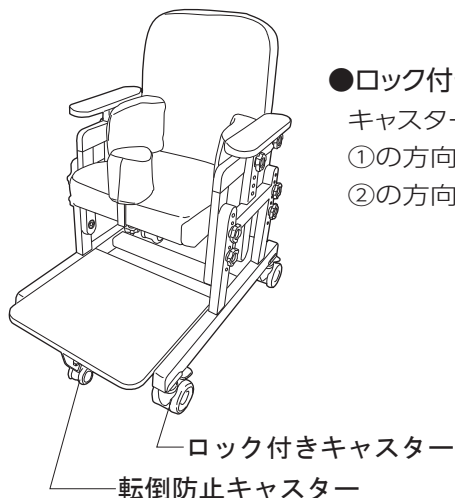


### ●ロック付きキャスターのロックのやり方

キャスターについているペダルを

①の方向に押し下げるとロックします。

②の方向に押し下げるとロックが解除されます。

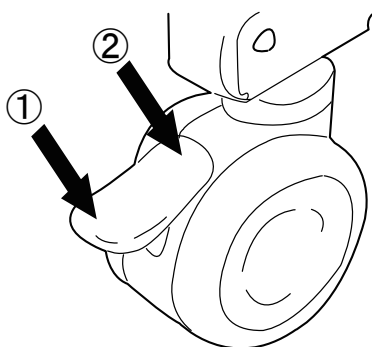

### 注意

キャスターロックをする際は、キャスターを外側に向けてください。内側に向けてロックをすると転倒しやすくなります。



### 注意

キャスターロックは、手で行ってください。足で強く踏み込むと破損する恐れがあります。



### 注意

移動時以外は確実にキャスター全てをロックしてご使用ください。ロックをせずに使用すると、転倒や事後・破損の原因になります。



### 注意

お子さまを座らせての長距離の移動はお控えください。また、お子さまを座らせて傾斜や段差のある場所で動かすのはお控えください。転倒・ケガの恐れがあります。

※転倒防止キャスターは、Mサイズのみ機能します。Sサイズ時は使用されません。

Sサイズ時は、キャスターが床から離れています。Mサイズ時でも5mm程度床から浮いています。

## 8. SサイズからMサイズへの変更方法

バンビーナチェアダイニングS/M TS-824・825 バンビーナムーブS/M TS-826・827

お子様の身体の成長に合わせてSサイズをMサイズにすることが出来ます。

(バンビーナチェアダイニング・バンビーナムーブのみ)

交換したいサイズの背座シートセット(オプション)をご購入のうえ、


手順に従い交換してください。

### ●手順(1)背・座の取り外し

①Sサイズの座下部のネジ4個を、⊕ドライバー(No3)を使い取り外し、座を取り外します。


②背と本体フレームを留めているグリップ左右合計2個を外し、ネジ左右合計2個を付属の六角レンチを使い取り外します。

骨盤パッド、内転パッドの取り外しは、  
「7.各部の調節方法」ご確認ください。

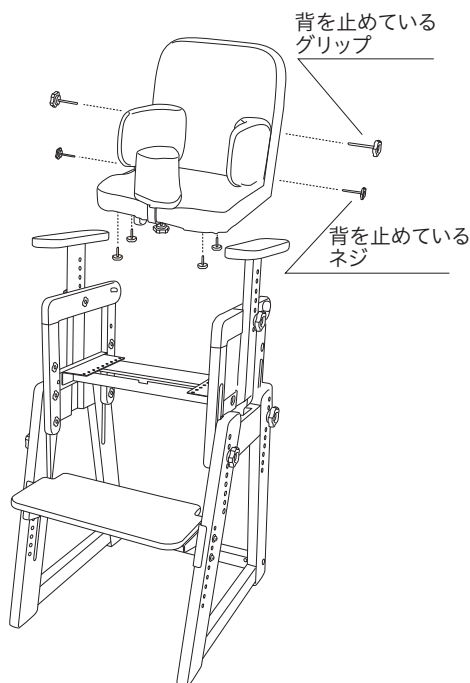

### ●手順(2)

手順(1)を参考にして、Mサイズ用の座(内転パッド)、背、骨盤パッドを固定グリップとネジで取り付けます。

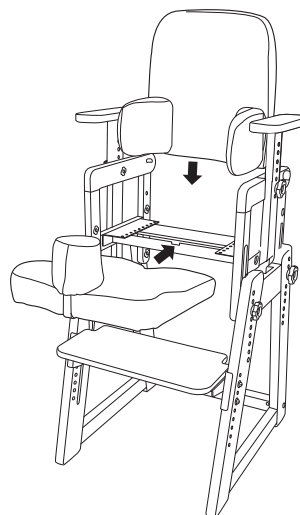

※バンビーナムーブのSサイズからMサイズへの変更の際は、  
足台板の位置をMサイズの位置へ調節してください。  
調節方法は「6.初期調整」をご確認ください。



### 注意


商品の組立は、記載している手順・方法通りに行ってください。  
誤った手順・方法で組み立てますと、ケガや破損の恐れがあります。

## 9. ダイニング脚～キャスター脚への変更方法

バンビーナチェアダイニングS/M TS-824・825 バンビーナムーブS/M TS-826・827

ご使用用途に合わせて、バンビーナチェアダイニングの脚部をバンビーナムーブの脚部に交換することができます。

交換したいタイプの脚部セット(オプション)をご購入のうえ、手順に従い交換してください。

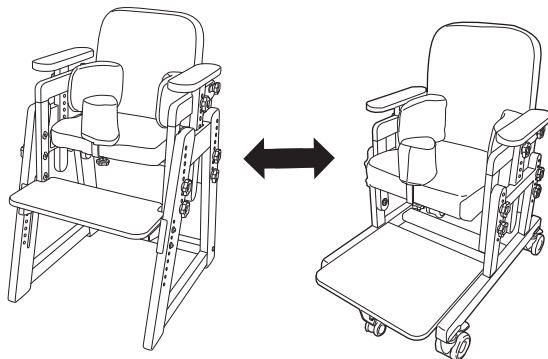


### ●手順(1)

バンビーナチェアダイニング脚部の場合は高さ調整脚・バンビーナムーブ脚部の場合はキャスター脚を留めている固定グリップ左右合計8個を外し、本体フレームから脚部を外します。

### ●手順(2)

交換する脚部を本体に合わせ、適正な位置で固定グリップを左右合計8個留めます。

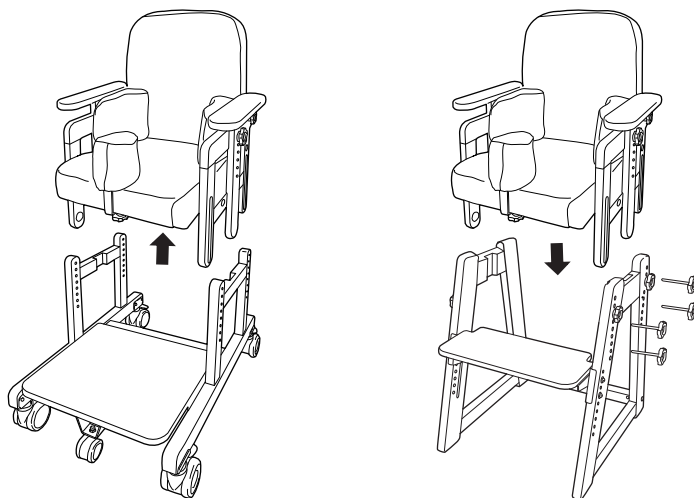

### 注意

固定グリップは適切な数を取り付けてください。  
少ない数で取り付けると脚部と座部が外れる可能性があります。



### 注意

商品の組立は、記載している手順・方法通りに行ってください。  
誤った手順・方法で組み立てますと、ケガや破損の恐れがあります。


# 10.仕様 バンビーナチェア S/M/Lスリム/L TS-821・822・828・823

(単位 mm)

	測定箇所	Sサイズ(TS-821)	Mサイズ(TS-822)	Lスリムサイズ(TS-828)
①	全 幅	410	460	540
②	全奥行(座の可動含む)	380~480	450~530	515~575
③	全 高 ※1	470~570	610~710	790~910
④	座の幅	300	350	400
⑤	座の奥行 ※1	220~300(20mm × 5段階)	270~350(20mm × 5段階)	300~420(20mm × 7段階)
⑥	座の高さ ※2	200~300(20mm × 6段階)	270~370(20mm × 6段階)	340~460(20mm × 7段階)
⑦	座面から肘の高さ ※3	150~210(20mm × 4段階)	175~275(20mm × 6段階)	200~300(20mm × 6段階)
⑧	背もたれの角度(後方)	90~105°(5° × 4段階)	90~105°(5° × 4段階)	93~108°(5° × 4段階)
⑨	骨盤パッドの最狭幅 ※4	150	200	250
⑩	骨盤パッドの調節量	片側30(15mm × 3段階)	片側30(15mm × 3段階)	片側30(15mm × 3段階)
⑪	内転パッドの調節量	80(10mm × 9段階)	80(10mm × 9段階)	80(10mm × 9段階)
●	重 量	6.2kg	8.4kg	13.4kg
対象者目安 ※対象者目安は、座面の高さを基準としてあてはめております。あくまでも目安としてご覧下さい。				
■	身長/体重	~122(cm)/~24(kg)	~143(cm)/~37(kg)	~170(cm)/~62(kg)

(単位 mm)

	測定箇所	Lサイズ(TS-823)
①	全 幅	590
②	全奥行(座の可動含む)	515~575
③	全 高 ※1	790~910
④	座の幅	450
⑤	座の奥行 ※1	300~420(20mm × 7段階)
⑥	座の高さ ※2	340~460(20mm × 7段階)
⑦	座面から肘の高さ ※3	200~300(20mm × 6段階)
⑧	背もたれの角度(後方)	93~108°(5° × 4段階)
⑨	骨盤パッドの最狭幅 ※4	300
⑩	骨盤パッドの調節量	片側30(15mm × 3段階)
⑪	内転パッドの調節量	80(10mm × 9段階)
●	重 量	13.8kg
対象者目安 ※対象者目安は、座面の高さを基準としてあてはめております。あくまでも目安としてご覧下さい。		
■	身長/体重	~170(cm)/~62(kg)

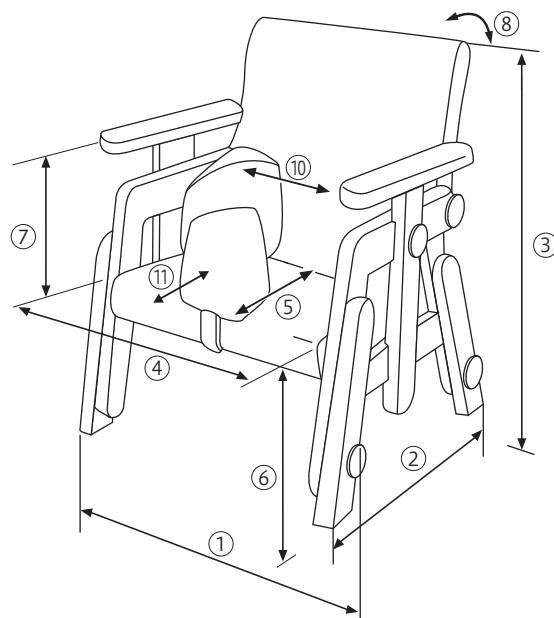

●フレーム(ブナ材) ●クッション(ウレタンフォーム) ●張り地(ポリエステル・ウレタンフォーム/レザー)

※寸法・重量に内転パッドは含まれません。

※表で示した調整範囲以上に調整可能な部品もありますが、各部品と総合的な連動を考慮し、この調整範囲内を推奨しています。

※ メーカー側の何の責務も伴わずに、改良のため仕様等を変更することがありますのでご承知ください。

※1: 背を一番立てた状態 ※2: 座先端 ※3: 座面奥からの高さ ※4: 3次元形状のためあくまでも目安として ※5: 足台板の可動含む



# 10.仕様 バンビーナチェアダイニング S/M TS-824・825

(単位 mm)

	測定箇所	Sサイズ(TS-824)	Mサイズ(TS-825)
①	全 幅	470	490
②	全奥行 ※5	555～610	555～610
③	全 高 ※1	775～875	870～970
④	座の幅	300	350
⑤	座の奥行 ※1	210～310(20mm × 6段階)	270～370(20mm × 6段階)
⑥	座の高さ ※2	510～610(20mm × 6段階)	525～625(20mm × 6段階)
⑦	足台板から座の高さ ※2	150～485	165～500
⑧	座面から肘の高さ ※3	150～270(20mm × 7段階)	135～255(20mm × 7段階)
⑨	背もたれの角度(後方)	90～105°(5° × 4段階)	90～105°(5° × 4段階)
⑩	骨盤パッドの最狭幅 ※4	150	200
⑪	骨盤パッドの調節量	片側30(15mm × 3段階)	片側30(15mm × 3段階)
⑫	内転パッドの調節量	80(10mm × 9段階)	80(10mm × 9段階)
●	重 量	12.7kg	13.7kg
対象者目安 ※対象者目安は、座面の高さを基準としてあてはめております。あくまでも目安としてご覧下さい。			
■	身長／体重	～122(cm)／～24(kg)	～143(cm)／～37(kg)


●フレーム(ブナ材) ●フッション(ウレタンフォーム) ●張り地(ポリエステル・ウレタンフォーム/レザー)

※寸法・重量に内転パッドは含まれません。

※表で示した調整範囲以上に調整可能な部品もありますが、各部品と総合的な連動を考慮し、この調整範囲内を推奨しています。

※メーカー側の何の責務も伴わずに、改良のため仕様等を変更することがありますのでご承知ください。

※1：背を一番立てた状態 ※2：座先端 ※3：座面奥からの高さ ※4：3次元形状のためあくまでも目安として ※5：足台板の可動含む

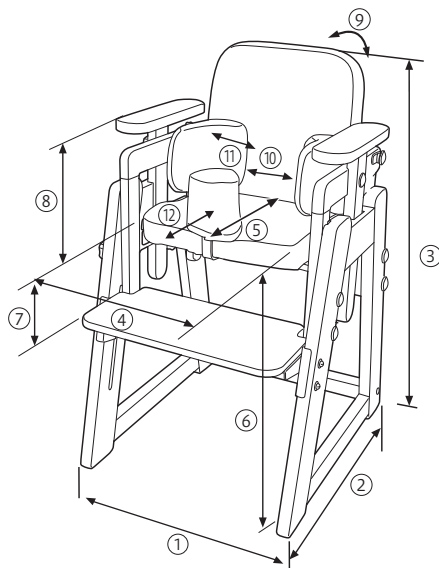



# 10.仕様 バンビーナムーブ S/M TS-826・827

(単位 mm)

	測定箇所	Sサイズ(TS-826)	Mサイズ(TS-827)
①	全 幅	470 ※6	490 ※6
②	全奥行 ※5	625～665 ※6	685～725 ※6
③	全 高 ※1	645～745	780～880
④	座の幅	300	350
⑤	座の奥行 ※1	205～285(20mm × 5段階)	270～350(20mm × 5段階)
⑥	座の高さ ※2	365～465(20mm × 6段階)	420～520(20mm × 6段階)
⑦	足台板から座の高さ ※2	200～300(20mm × 6段階)	270～370(20mm × 6段階)
⑧	座面から肘の高さ ※3	150～270(20mm × 7段階)	135～255(20mm × 7段階)
⑨	背もたれの角度(後方)	90～105°(5° × 4段階)	90～105°(5° × 4段階)
⑩	骨盤パッドの最狭幅 ※4	150	200
⑪	骨盤パッドの調節量	片側30(15mm × 3段階)	片側30(15mm × 3段階)
⑫	内転パッドの調節量	80(10mm × 9段階)	80(10mm × 9段階)
●	重 量	13.6kg	14.3kg
対象者目安 ※対象者目安は、座面の高さを基準としてあてはめております。あくまでも目安としてご覧下さい。			
■	身長/体重	～122(cm)/～24(kg)	～143(cm)/～37(kg)

●フレーム(ブナ材) ●クッション(ウレタンフォーム) ●張り地(ポリエステル・ウレタンフォーム/レザー)


※寸法・重量に内転パッドは含まれません。

※表で示した調整範囲以上に調整可能な部品もありますが、各部品と総合的な連動を考慮し、この調整範囲内を推奨しています。

※メーカー側の何の責務も伴わずに、改良のため仕様等を変更することがありますのでご承知ください。

※1：背を一番立てた状態 ※2：座先端 ※3：座面奥からの高さ ※4：3次元形状のためあくまでも目安として

※5：足台板の可動含む ※6：キャスター回転範囲は省く

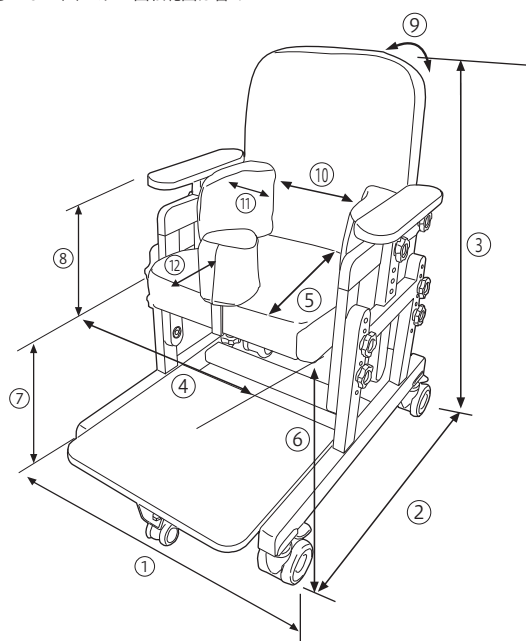

# 11. 日頃のお手入れと注意・お問い合わせ

## 〈汚れを落とすときの注意〉

- 水にぬれたまま放置しないでください。
- シンナー等の有機溶剤の使用は絶対にしないでください。目割れや変色の原因になります。

万一汚れた時は、中性洗剤を3～5%位にぬるま湯で薄め、柔らかい布をひたし、軽く絞って表面をたたくように拭き取ってください。その後水でひたした布を固く絞って洗浄液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いたあと、自然乾燥させてください。

注) 張り地は洗濯をすると収縮しますので取付できなくなる恐れがあります。

## 1. 木部・金属部・樹脂部

日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。(化学ぞうきんなどは使用しないでください)  
万一汚れたときは、中性洗剤を3～5%位にぬるま湯で薄め、柔らかい布をひたし、固く絞って拭き取ってください。その後水でひたした布を固く絞って洗浄液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いたあと、自然乾燥させてください。

## 2. 上張り地・布/レザー部

日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。(化学ぞうきんなどは使用しないでください)

## 3. 長期保管場所

高温・多湿の場所には保管しないでください。カビやシミ、ワレの原因になります。  
また、直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、乾燥の著しい場所での保管も避けてください。  
変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。

## 4. 上張り地の交換

張り地は交換が可能です。販売店又は専門の業者へご相談ください。



### 注意

ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は工具等で締め付けてください。

仕様の詳細や調節方法、お手入れのやり方、アフター部品など不明な点は、お買い求めいただいた販売店、または下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

タカノお客様ご相談窓口



フリー  
ダイヤル

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからご利用いただけます。)

※混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからおかけ直してください。

# 品質保証書

本商品については上面記載の「保証規定」により正常な使用状況において故障が生じた場合に限りお買上げの日より「1年間」無償にて修理いたします。

機種			
お客様	ご住所	〒 TEL.	
	(フリガナ) お名前		
お買上げ日		年 月 日	保証有効期間 お買上げ日より (保証の規定による) <b>1年間</b>
取扱販売店名・住所・電話番号			
製造元	 <b>タカノ株式会社</b> タカノハートワークス オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331 TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203		

## 保証規定

### I. 保証の範囲

- 保証期間中に品質の不完全に基づく故障を生じた場合はこの保証書により無料で修理いたします。
  - 保証期間はお買上げ後1年間です。
  - 但し、次の場合は保証中でも有料になります。
    - 使用方法の誤り、重大な不注意、手入れ不良による故障の場合。
    - 製品に改造を加えた場合の故障。
    - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変等、ならびに公害による故障または損傷。
    - 保証書にお買上げ店名の記載、捺印のない場合。
    - 保証書のご提示がない場合。
    - 消耗品(キャスター等)は保証期間対象外となります。
- 以上の保証は本製品を国内に設置した場合に限りです。  
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### II. サービスのご利用

保証期間中、万一故障が生じた場合はお買上げの販売店へ保証書を添えてお申し出下さい。

### III. ご注意

保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 
- ・保証書は、記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
  - ・保証期間中に故障が発生した場合は、製品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼下さい。お買上げ年月日、販売店名など必ずご確認ください、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。
  - ・転居・贈答品などでお買上げの販売店に修理を依頼できない場合は、タカノ(株)までお問い合わせください。
  - ・保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
-



見やすいユニバーサル  
デザインフォントを  
採用しています。



心を形にするテクノロジー、あります。  
**TAKANO HeartWorks。**

**タカノ株式会社** タカノハートワークス

長野県伊那市西春近下河原5331  
TEL 0265-72-3157 FAX 0265-72-3203

U R L <http://www.takano-hw.com/>  
<http://www.takano-net.co.jp/>

Rev.7 (2021.04.05)