



タカノの 車いすクッション

総合カタログ



大切な人にこそ、使ってほしい。



vol.
31



大切な人にこそ、使ってほしい 車いすクッションのすすめ

車いす生活は快適ですか？

車いすは毎日座ったり、移動したり、


生活を支えてくれるパートナーです。

何か悩みや気になることがあれば早めに改善して、

毎日元気に快適に過ごしたいですよね。

大切な人にこそ、使ってほしい。

そう思えるクッションをご提案します。

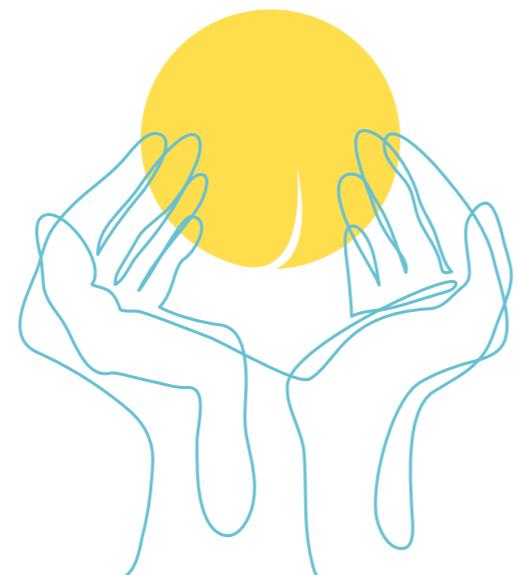

目次 contents

車いす生活でのお悩み&トラブル	3
車いすクッション選定の目安	4
にこにこクッション	5
タカノクッション wipeR	6
タカノクッション R	7
タカノクッション MOLA	9
座位保持クッション LAPS	11
ジェルセルシリーズ	13
SSP シーティングサポートパッド	15
イーコレ・ベーシック	17
子ども用車いすクッション	18
学童いす用クッション LAPS kids	18
キュッキュツ	19
ペチカ・スマート フリース仕様	20
レグぽか&レグぽか・スリム	20
車いすクッションのお話	21

車いす生活、こんな悩みはありませんか？

傾いてしまう



臥床姿勢（仰向け）や端座位では横に崩れないのに、車いすでは右や左に身体が傾いてしまう状態です。

前屈したまま



円背（脊椎が丸まるように湾曲すること）、亀背（脊柱の胸椎部が後方へ曲がっていること）で、背中が丸くなっています。

前にずれてしまう



背もたれによりかかることにより、お尻が前にずれていき、姿勢が崩れていく状態です。

ずっこけ座り（仙骨座り）



お尻が座面の奥につかず、背中を背もたれに押し付けるように座った状態です。

駆動しにくい



足こぎしたり、車いすを自走していると、ずっこけた状態になり、駆動しにくい。

立ち上がりにくい



足をふんばることや、力を入れることができず、立ち上がりにくい状態です。


クッション選定の目安

車いす利用者のお悩みと座る時間から、クッションを選ぶ目安をつけましょう。

タカノのクッション ラインナップ	掲載ページ	車いす利用時のお悩み								
		姿勢保持			お尻が痛い	痩せている	蒸れる	移乗が多い	車いす調整できない	
短時間	にこにこクッション	S4	5	前ずれ	横に傾く	前に傾く			◎	◎
	S2	5	○	○	○				○	○
	S3	5							○	
	S1	5	○	○	○			○		
座る時間	タカノクッションR・wipeR	タイプ5	7						○	○
	タイプ6	7	○	○	○			○	○	
	タイプ3 wipeR3	7 6	○	○	○	○	○	○		
	タイプ4 wipeR4	7 6	○	○	○	○	○			
	タイプ2	7	○	○	○	○	○	○		
	タイプ1 wipeR1	7 6	○	○	○	○	○	○		
MOLA	フラット	9	○	○	○	○	○	○		
	センター	9	○	○	○	○	○	○		
長時間	LAPS	11	○	○	○	○	○	○		
	ジェルセルG2	13	○			○	○	○	○	
	ジェルセルG2プラス	13	○	○	○	○	○	○	○	
	ジェルセル	13				○	○	○		
	ジェルセルプラス	13	○	○	○	○	○	○		

合わない車いすが引き起こすトラブル

骨盤が歪む

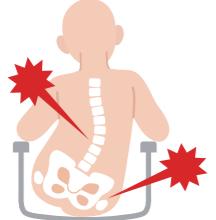

悪い姿勢でずっと座っていることにより、背骨や骨盤などのゆがみを併発します。

床ずれ（褥瘡）ができる



座り続けることで、皮膚にずれ等が生じ、床ずれが発生します。

おしりや腰が痛い



スリングシートに直接長時間座るなど、不安定な体勢でいるとき、腰や尾てい骨に負担がかかり、痛みが出ることも。

疲れてしまう



自分で体勢を変えることのできない方は、無理な体勢のままでいることで、疲れてしまいます。

タカノの車いすクッションを使ってみませんか？

トラブルが起つてからでは、状況を改善するのに時間がかかります。 そうなる前にしっかりとクッションを使って予防することをおすすめします。 右ページを参考にクッションを選んでみましょう。

おすすめクッションがわかります。▶



にこにこクッション



いつでも清潔で快適に。
そのまま丸洗いできる多面体クッション。



- ・蒸れが気になる方
- ・除圧動作が自分でできる方
- ・硬めがお好みの方

さらっと爽やか蒸れにくい

通気性が良く蒸れを防ぐポリエチル素材の多層多面体構造。丸洗いして乾燥もできる、清潔にとことんこだわったクッションです。

大腿部に沿う形状で、
座った時に位置が安定します。

※タイプS1、タイプS2のみ




車いす上でたわみにくく、
硬めのベースにしています。

ポリエチル繊維をアーモンド状に
結び付けた、通気性と弾力性に
富んだ中材で、蒸れを解消しさらっ
とした使い心地です。

体圧分散性能

多面体構造により体圧分散性にも配慮
しています。

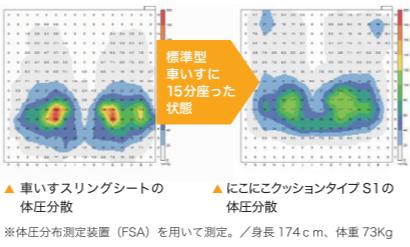

丸洗いできていつでも清潔

カバーをかけたまま洗濯機で洗濯できます。乾燥機にも対応。さらにカバーは吸湿速乾素材に抗菌防臭加工をしています。



- 30℃ 中性
- 乾燥機 OK
- 高圧滅菌・
オゾン消毒

タイプ	タイプS1	タイプS2	タイプS3	タイプS4	背用					
品番	TC-S1	TC-S2	TC-S3	TC-S4	TC-B1					
形状		大腿部とお尻の位置を保持するコンター形状。		タイプS1の薄いタイプ。		座る面が平らなタイプ。		薄い平らなタイプ。		背もたれに置くタイプ。
価格	16,000円(税別)／17,600円(税込)	15,000円(税別)／16,500円(税込)	16,000円(税別)／17,600円(税込)	15,000円(税別)／16,500円(税込)	11,000円(税別)／12,100円(税込)					
サイズ	W400×D425×H80×h110(mm)	W400×D425×H60×h80(mm)	W400×D425×H80(mm)	W400×D425×H60(mm)	W400×D47×H400×450(mm)					
重量	655g	630g	640g	625g	340g					
TAISコード	00297-000063	00297-000070	00297-000071	00297-000072	00297-000078					
JANコード	4523725001511	4523725001528	4523725001535	4523725001542	4523725001566					
材質	本体:ポリエチル／カバー:ポリエチル、アクリル(滑り止め加工)※防炎性に優れ、有毒ガスが発生しません。(防炎協会認定基準)					本体／カバー:ポリエチル				

タカノクッション wipeR



拭くだけで、簡単消毒。
タカノクッションRの完全防水タイプ。



- ・消毒用エタノール、次亜塩素酸で消毒したい方
- ・病院、施設の備品としてクッションをおさがしの方

安心の防水カバー

防水の張り地で、失禁などによる汚染
を防ぎ、中のクッションを守ります。



さっと清拭。薬品で消毒

次亜塩素酸、消毒用エタノール等の薬品を
使用しても、変色などおきません。汚れたら
すぐに清拭で消毒、清潔に保てます。




防水ファスナー

ファスナー部分からも水分が入らない
ようになっています。



ウレタンフォームの多層構造により優れた体圧分散性

4種類の硬さの異なるウレタンフォームと
10個のパーツ(wipeR1の場合)を組み合わせ、
姿勢を保持し、体圧分散を実現しています。
長時間でも快適にお座りいただけます。

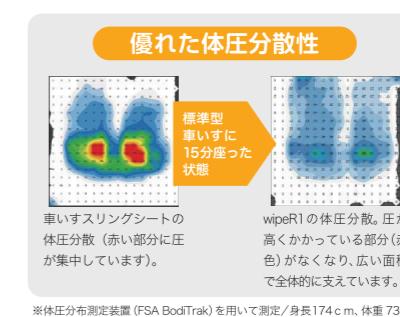

分かりやすい「うしろ」表記と名前欄

安心して使用できるよう、タグには「後」、
本体には「うしろ」表記をしています。タグ
には、お名前などを書けるスペースがあります。



タイプ	タイプS1	タイプS2	タイプS3	タイプS4	背用					
品番	TC-S1	TC-S2	TC-S3	TC-S4	TC-B1					
形状		大腿部とお尻の位置を保持するコンター形状。		タイプS1の薄いタイプ。		座る面が平らなタイプ。		薄い平らなタイプ。		背もたれに置くタイプ。
価格	16,000円(税別)／17,600円(税込)	15,000円(税別)／16,500円(税込)	16,000円(税別)／17,600円(税込)	15,000円(税別)／16,500円(税込)	11,000円(税別)／12,100円(税込)					
サイズ	W400×D425×H80×h110(mm)	W400×D425×H60×h80(mm)	W400×D425×H80(mm)	W400×D425×H60(mm)	W400×D47×H400×450(mm)					
重量	655g	630g	640g	625g	340g					
TAISコード	00297-000063	00297-000070	00297-000071	00297-000072	00297-000078					
JANコード	4523725001511	4523725001528	4523725001535	4523725001542	4523725001566					
材質	本体:ポリエチル／カバー:ポリエチル、アクリル(滑り止め加工)※防炎性に優れ、有毒ガスが発生しません。(防炎協会認定基準)					本体／カバー:ポリエチル				

タイプ	wipeR1	wipeR3	wipeR4	
品番	TC-REW1	TC-REW3	TC-REW4	
形状		コンター形状 姿勢保持と圧分散に優れています		前側を高くしたタイプ 前ずれを防止します
価格	15,000円(税別)／16,500円(税込)	14,000円(税別)／15,400円(税込)	14,000円(税別)／15,400円(税込)	
サイズ	W400×D425×H70 (mm) ※クッション厚	W400×D425×H50 (mm) ※クッション厚	W400×D425×H60 (mm) ※クッション厚	
重量	約 650g	約 500g	約 550g	
TAISコード	00297-000115	00297-000116	00297-000117	
JANコード	4523725004758	4523725004765	4523725004772	
材質	中材:ウレタンフォーム／カバー:ポリエチル、ポリウレタン			

● タカノクッションR タイプ1 (TC-R081)、タイプ3 (TC-R043)、タイプ4 (TC-R064) の替えカバーとしても使用できます。

タカノクッションR



タカノ独自の多層多面体構造を採用した
スタンダードクッション。



- ・どのクッションがいいか迷っている方
- ・初めて車いすを使用する方
- ・合うクッションがない方

タイプ1

大腿部とお尻の位置を保持するコントラ形状です。圧力分散性の高いタイプです。



対象者 座る時間が長い方、
姿勢が保持できない方

タイプ2

両サイドを高くしたタイプです。
横への傾き、脚部の外転をサポートします。



対象者 横へ傾いてしまう方、
脚が開いてしまう方

タイプ3

前側を高くしたタイプです。大腿部とお尻で圧力を分散し前ずれを防ぎます。



対象者 前ずれしてしまう方

タイプ4


座る面が平らなタイプです。ベッドなどへの移乗がスムーズです。



対象者 座る時間が長い方、
車いすの乗り降りが頻繁な方

タイプ5

4cmと薄くて平らなタイプです。
座面が高くなりすぎず違和感が少ないです。

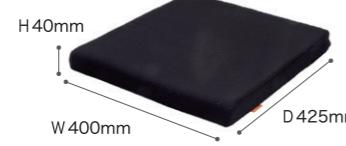

対象者 姿勢保持ができる方、
初めてクッションを使う方

タイプ6


タイプ1の薄いタイプ。座面が高くなりすぎず違和感が少ないです。



対象者 姿勢保持ができない方、
座る時間が短い方

背用

背もたれに置くタイプ。骨盤と背骨を支えて良い姿勢を保ちます。

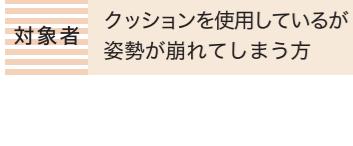

対象者 クッションを使用しているが
姿勢が崩れてしまう方



ポイント


特注サイズ、形状に対応いたします。
(別途納期と料金がかかります)

「座りやすい」をとことん追求

正しい姿勢と体圧分散を高度なバランスで実現するウレタンフォームの多層多面体構造。

タカノの技術を詰め込み、お求めやすさを実現しました。

一番上は柔らかいウレタンで
座った時に優しい感触です。

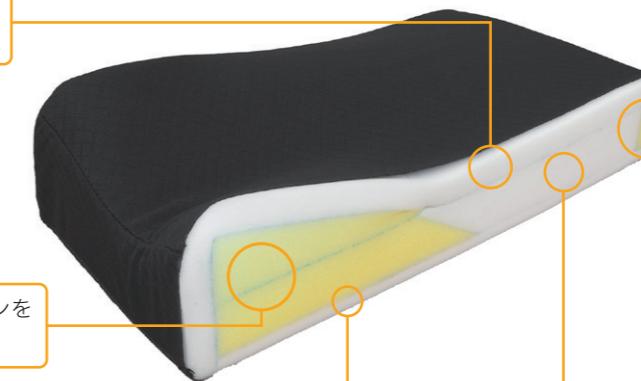

周囲の硬めのウレタンが
姿勢が崩れるのを防ぎます。

一般的なクッション タカノクッションR



大腿部はしっかりしたウレタンを
使用し、姿勢を保持します。


底面は硬めのウレタンで
底づきを防ぎます。

坐骨部分の低反発ウレタンがお尻を沈みこませて
姿勢を安定させ、体圧分散します。

体圧分散性能

硬さの異なるウレタンの多面体構造は、体圧分散性
が良く、長時間でも快適にお座りいただけます。

標準車いすに15分座った状態

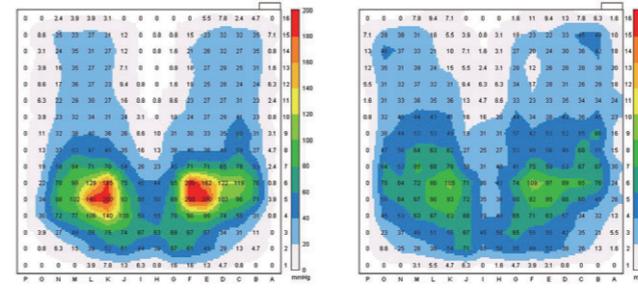

▲車いすスリングシートの体圧分散

※体圧分布測定装置(FSA)を用いて測定。/身長 174cm、体重 73Kg

使いやすさと安全性へのこだわり

取っ手に前表記があり、
向きが分かりやすい。

底面は全面滑り止め加工。

ひっかかり防止の
ファスナーカバー。

車いすの背にフィットする
カーブ形状。



カバー洗濯後に正しい
方向で入れられます。

タイプ	タイプ1	タイプ2	タイプ3	タイプ4	タイプ5	タイプ6	背用	
品番	TC-R081	TC-R082	TC-R043	TC-R064	TC-R045	TC-R046	TC-R010	
価格	11,000円(税別) 12,100円(税込)	11,000円(税別) 12,100円(税込)	10,000円(税別) 11,000円(税込)	10,000円(税別) 11,000円(税込)	9,500円(税別) 10,450円(税込)	10,000円(税別) 11,000円(税込)	9,500円(税別) 10,450円(税込)	
重量	650g	720g	500g	550g	380g	410g	330g	
TAISコード	00297-000104	00297-000105	00297-000106	00297-000107	00297-000108	00297-000109	00297-000110	
カラー				レッド				
材質	本体：ポリウレタンフォーム／カバー：ポリエステル、ポリウレタンフィルムラミネート（防水加工）、アクリル（滑り止め加工）							

●水分がこぼれたときにはすぐにふき取ってください。／カバーは水洗いできます。本体は水洗いできません。

モーラ タカノクッション MOLA




モールドウレタン+ラテックスフォームが最上位クラスの体圧分散と姿勢保持を実現。

- ・姿勢が保持できない方
- ・前ずれする方、やせている方
- ・長時間座る方
- ・合うクッションがない方


タカノクッション MOLA コンタータイプ

お尻と太ももに沿った形で、姿勢サポート力・体圧分散効果の高いコンタータイプ。

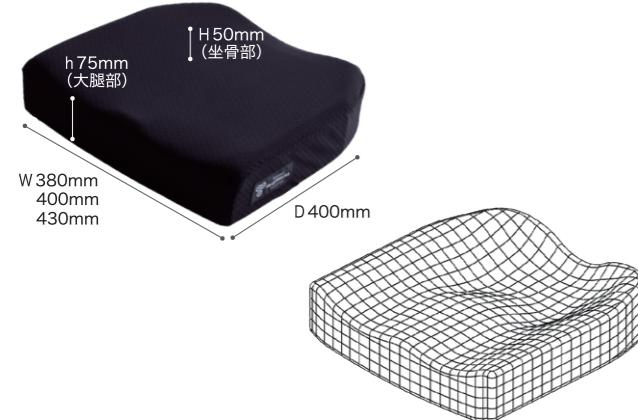

タカノクッション MOLA フラットタイプ

汎用性の高いフラットタイプ。

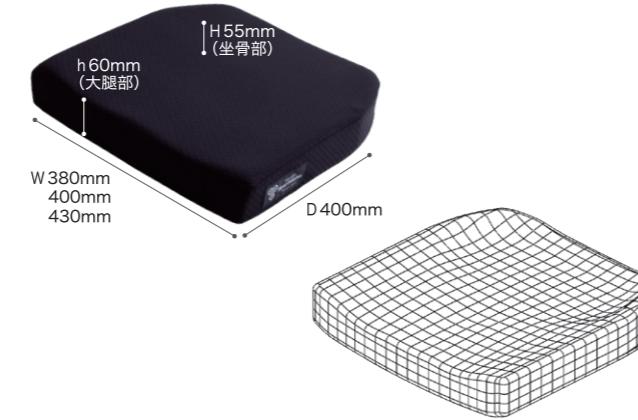

タイプ	タカノクッション MOLA コンタータイプ			タカノクッション MOLA フラットタイプ		
品番	TC-ML38C	TC-ML40C	TC-ML43C	TC-ML38F	TC-ML40F	TC-ML43F
価格	28,000円(税別) / 30,800円(税込)			25,000円(税別) / 27,500円(税込)		
重量	約 1040g	約 1100g	約 1190g	約 930g	約 980g	約 1050g
TAISコード	00297-000122	00297-000120	00297-000124	00297-000123	00297-000121	00297-000125
JANコード	4523725014153	4523725014177	4523725014191	4523725014160	4523725014184	4523725014207
オプション	アウターカバー			アウターカバー		
品番	TCOC-ML38C	TCOC-ML40C	TCOC-ML43C	TCOC-ML38F	TCOC-ML40F	TCOC-ML43F
価格	8,800円(税別) / 8,000円(税込)			8,800円(税別) / 8,000円(税込)		
オプション	インナーカバー			インナーカバー		
品番	TCIC-ML38C	TCIC-ML40C	TCIC-ML43C	TCIC-ML38F	TCIC-ML40F	TCIC-ML43F
価格	7,150円(税別) / 6,500円(税込)			7,150円(税別) / 6,500円(税込)		
材質	本体: ウレタンフォーム、ラテックスフォーム インナーカバー: ポリウレタン、ポリエチル/アウターカバー: ポリエチル、PVCレザー					


タカノクッション MOLAは 4層構造



最上位クラスの体圧分散性能

モールドウレタンとラテックスフォームで体圧分散を長時間保持。

モールドウレタンだから実現できた滑らかな体圧分散設計と、人体の表面硬度に近いラテックスフォームの組み合わせで、尾骨部・坐骨結節部に集中する圧力を分散。着座後15分経過しても理想的な体圧分散を維持しエアーキッションクラスの圧分散値を実現しました。

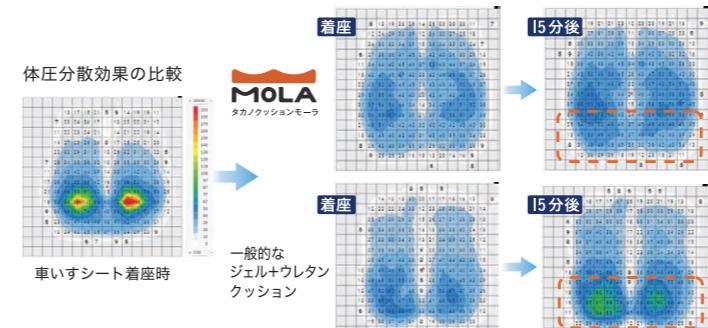


測定器: BodiTrak2Pro座シートタイプ 被験者: 160cm 50kg 女性

超快適設計

いすづくり60年、クッションづくり30年の技術とノウハウを結集。
クッションのお悩みを網羅的に解決します。

優れたサポート力 (座位保持)

モールドウレタンのみが実現できる滑らかな骨盤保持形状で高いサポート力を発揮

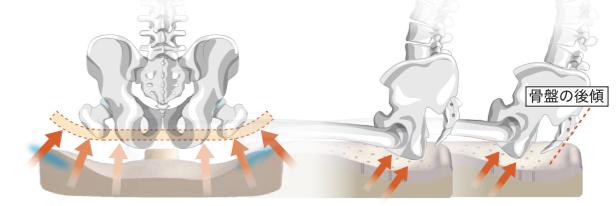

床ずれ好発部位の、尾骨部や坐骨結節部は体圧分散しながら、サポートする形状により座位を安定させます。
姿勢が安定しない方や、円背で骨盤が後傾した状態でもしっかりキャッチできるアンカーサポートとなっています。

車いすと合わせやすい

様々な車いすに適合する形状を実現。最新の車いすにも合わせやすい



底面を「船底形状」にすることでスリングシートにフィットしやすくなります。
クッションのうしろ側が「はかま形状」になっており、より多くの車いすにフィットします。

耐久性が高い

約8万回の耐衝撃試験をクリア。5年使ってもへたりが出にくい! (当社試験規格による)



高反発・高耐久素材のラテックスは、特有の弾力性と復元力により、長時間使用しても型崩れしない耐久性があります。
一つ一つ金型で発泡する製法のモールドウレタンは、密度が高く、カット面が無いため型崩れが起きにくい耐久素材です。

ラップス 座位保持クッション LAPS



Lumbar Anchor Pelvic Support
腰椎・坐骨・骨盤をサポートする極上の安定感。
シンプルな車いすが快適な座り心地に。




- ・姿勢が保持できない方
- ・前ずれする方、やせている方
- ・小柄な方（車いすにすき間がある方）
- ・円背の方



優しく包み込んで座位保持

崩れがちな姿勢を包み込むように支えます。座面だけでなく骨盤と腰椎を周囲から支えることで、今までにない安定感をご提供します。

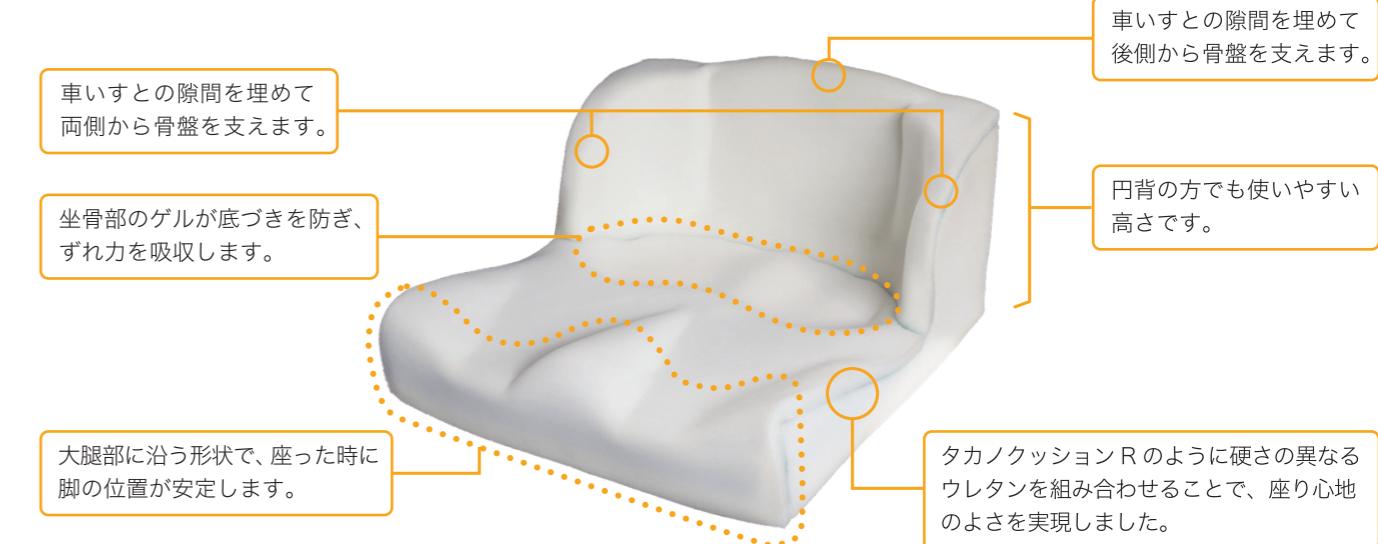

LAPS

LAPS構造で骨盤のサポートと座り心地を両立した一体型クッション。



LAP Backs

肩甲骨の動きを妨げない形状で、腰から背中へ連続するフィット感を実現します。



LAPS+LAP Backsセット

座から背までしっかりサポートします。




タイプ	LAPS	LAP Backs	LAPS+LAP Backsセット
品番	TC-L01	TC-L02	TC-LS11
価格	29,800円(税別) / 32,780円(税込)	6,800円(税別) / 7,480円(税込)	35,000円(税別) / 38,500円(税込)
重量	1130g	170g	1300g
TAISコード	00297-000102	00297-000103	00297-000111
カラー	レッド ライトブルー グレー		
材質	本体:ポリウレタンフォーム、ポリウレタンゲル カバー:ポリエステル ポリウレタンフィルムラミネート(防水加工) アクリル(滑り止め加工)	本体:ポリウレタンフォーム カバー:ポリエステル、ナイロン	-

体圧分散性能

骨盤サポートと身体に沿う形状で接触面積が広がり、優れた体圧分散を発揮。長時間でも快適にお座りいただけます。


標準車いすに15分座った状態

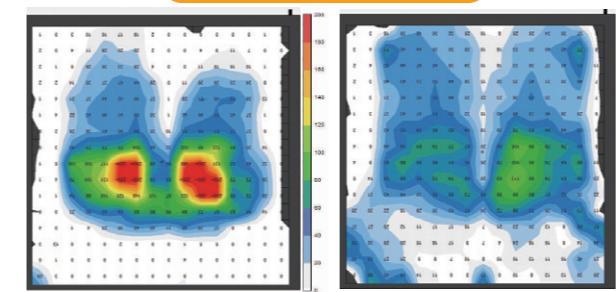

▲車いすスリングシートの体圧分散
※体圧分布測定装置(FSA)を用いて測定。／身長174cm、体重73Kg

快適なカバー

ホールド感を高める縫製で仕上げています。通気性を配慮したメッシュ素材と、食べこぼしや失禁に備えた防水生地の2枚構造です。

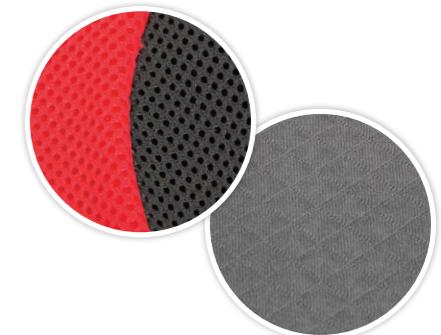

長野大学 社会福祉学部

繁成 剛教授と共同開発

多くの車いすはスリングシートを採用しているため、お尻が前にずれやすく状態が倒れる傾向があります。このような姿勢を改善し、快適に座ることができるよう骨盤から腰椎にかけてトータルに支えるクッションを開発しました。



ジェルセルシリーズ



(カバー装着状態)


エア+ジェルが高い体圧分散を実現



- ・やせている方
- ・骨突出のある方
- ・長時間座る方


ジェルセル

エアとジェルの組合せで優れた体圧分散効果を発揮。エア調整バルブ1カ所。

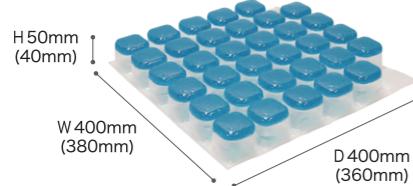

ジェルセルプラス


ジェルセルに専用ベースがついて、姿勢がさらに安定します。

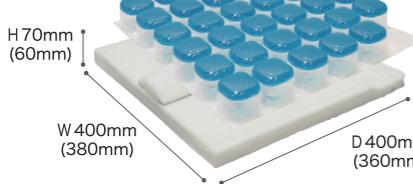

対象者 体圧分散を重視する方

ジェルセル G2

小さなセルを骨盤部分に配置し座位が安定。左右2か所のエア調整バルブで簡単にフィッティングができます。

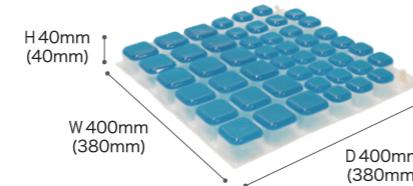

ジェルセルG2プラス

ジェルセル G2に専用ベースがついて、姿勢がさらに安定します。



対象者 姿勢保持を重視する方

タイプ	ジェルセル		ジェルセル G2		ジェルセルプラス		ジェルセル G2 プラス	
品番	TC-GC1-40	TC-GC1-38	TC-GC2-40	TC-GC2-38	TC-GC1P-40	TC-GC1P-38	TC-GC2P-40	TC-GC2P-38
価格	52,000円(税別) / 57,200円(税込)		58,400円(税別) / 64,240円(税込)					
重量	1500g	1400g	1500g	1300g	1800g	1700g	1800g	1600g
TAISコード	00297-000079		00297-000080		00297-000081		00297-000082	
JANコード	4523725002211	4523725002242	4523725002228	4523725002273	4523725002259	4523725002266	4523725002280	4523725002297
カラー	ブラック		ブラック					
材質	本体:ポリウレタンフィルム、シリコンジェル カバー:ポリエステル		本体:ポリウレタンフィルム、シリコンジェル 専用ベース:ポリエチル/カバー:ポリエチル					

エア+ジェルのW効果で体圧分散

圧力分散性能に優れるエアとジェル。表面のジェルが柔らかくお尻を支え、エアがクッション全面に均一に体重を分散します。



- ・人肌のように柔らかいジェルが変形することで、ずれ力を吸収します。
- ・温度依存性のあるジェルなので、体温をキープし冷え過ぎず暑くなりません。
- ・万が一、エア漏れの場合もジェルが底づきを防ぎます。




- ・ジェルセルは34個(G2は左右24個)の連結したセルを空気が移動することで、圧力を均一に分散します。
- ・長期間座っても一ヶ所に圧力が集中しにくいので、お尻が痛くなりにくくなります。

体圧分散性能

ジェルの柔らかさとセル間の空気の移動で優れた体圧分散性能を発揮します。

標準車いすに15分座った状態

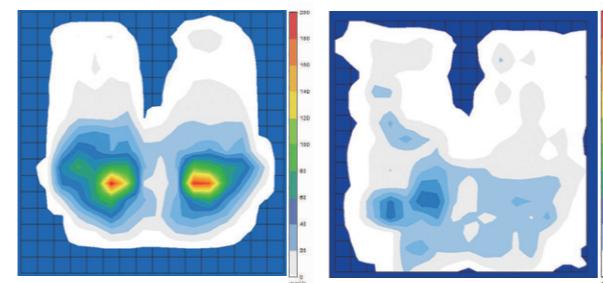

▲車いすスリングシートの体圧分散
※体圧分布測定装置(FSA)を用いて測定。/身長174cm、体重73kg

付属品



●ハンディポンプ


簡単フィッティング

所要時間はわずか10秒。難しい調整はいりません。


※定期的に空気量を確認し、調整してください。

詳しい調整方法の動画は[こちら](#)
 ジェルセル ジェルセル G2

ジェルセル(1バルブ)の場合

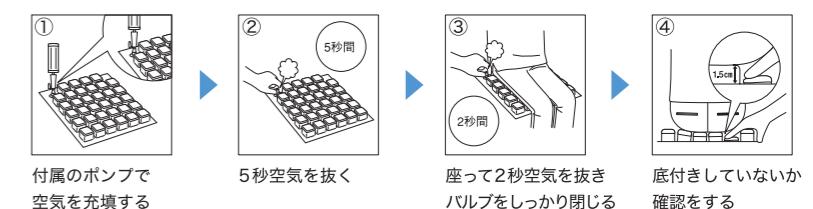

ジェルセルG2(2バルブ)の場合

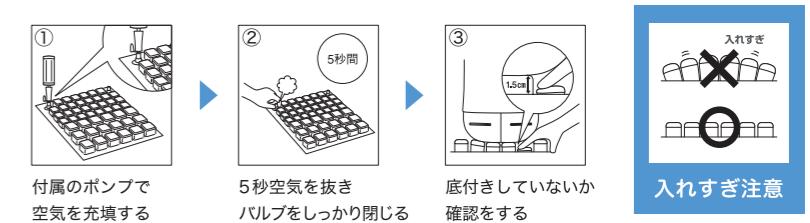

SSP シーティングサポートパッド



お使いになる方とセラピストの方、
お互いの快適さをサポートするパッドです。



- ・すきまがあいてしまう方
- ・傾いてしまう方
- ・タオルを使って調整をしている方


TC-SP01 (厚い 40)




TC-SP02 (厚い 35)




TC-SP03 (厚い 15)

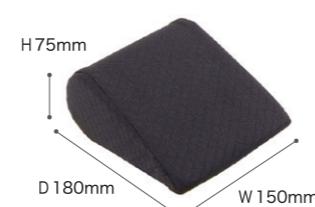


TC-SP05 (薄い 40)

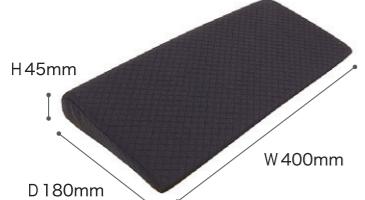

TC-SP06 (薄い 35)

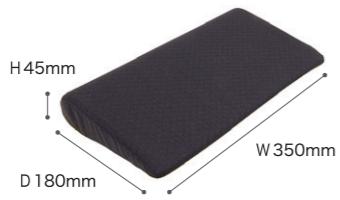

TC-SP07 (薄い 15)

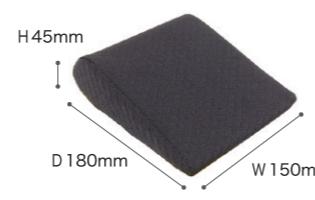

TC-SP11 (ぼこぼこ)



裏面は滑り止め加工



紐で固定できます

サイドサポートとして



腰部のサポートとして



座角調整に



マッサージ効果に



ちょっとしたすき間をうめるようにお使いいただけます。



体幹サポートに



組み合わせて姿勢サポートに



片足のサポートに




フットサポートの高さ・角度
調整に

タイプ	厚い 40	厚い 35	厚い 15	薄い 40	薄い 35	薄い 15	ぼこぼこ
品番	TC-SP01	TC-SP02	TC-SP03	TC-SP05	TC-SP06	TC-SP07	TC-SP11
数量	2個1セット	2個1セット	2個1セット	2個1セット	2個1セット	2個1セット	1個
価格	8,800円(税別) 9,680円(税込)	8,800円(税別) 9,680円(税込)	5,800円(税別) 6,380円(税込)	8,800円(税別) 9,680円(税込)	8,800円(税別) 9,680円(税込)	5,800円(税別) 6,380円(税込)	5,500円(税別) 6,050円(税込)
重量(1個)	270g	240g	120g	175g	160g	80g	150g
TAISコード	00297-000073	00297-000074	00297-000089	00297-000075	00297-000076	00297-000090	00297-000077
JANコード	4523725002013	4523725002020	4523725002037	4523725002051	4523725002068	4523725002075	4523725002112
カラー	● ブラック						
材質	本体:ポリウレタンフォーム / カバー:ポリエステル、ポリウレタンフィルムラミネート(防水加工)						本体:ポリウレタン フォーム/ カバー:ポリエステル

● 水分がこぼれたときにはすぐにふき取ってください。/カバーは水洗いできます。本体は水洗いできません。※TC-SP11は水洗いできません。

イーコレ・ベーシック 姿勢保持クッション

- ポンプで空気を抜いて固める姿勢保持材です。
- しっかり支えたい方に。

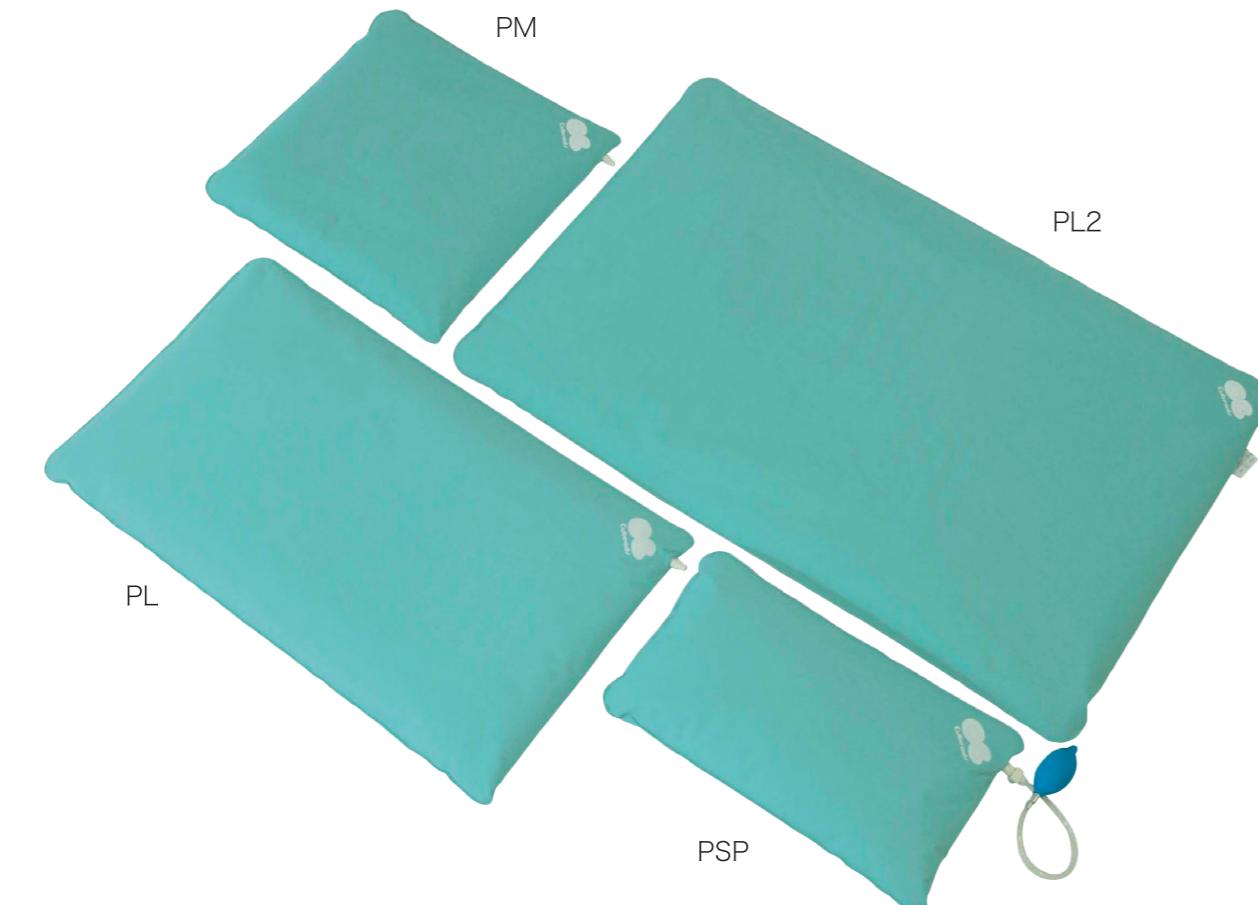

様々な使い方で
姿勢保持を助けてます。

タイプ	PSP	PM	PL	PL2
価格 ※専用ポンプ付き	16,000円(税別) 17,600円(税込)	23,000円(税別) 25,300円(税込)	31,000円(税別) 34,100円(税込)	40,000円(税別) 44,000円(税込)
サイズ	270×470×60mm	450×450×50mm	450×800×50mm	650×1000×50mm
重量	約 380g	約 510g	約 800g	約 1500g
TAISコード	01049-000004	01049-000005	01049-000006	01049-000007
JANコード	4580202231533	4580202231540	4580202231557	4580202231564
カラー	● パステルグリーン			
材質	中材:ポリエチレン/カバー:ポリエステル、ポリウレタン			

子ども用 車いすクッション

- お子様の成長に合わせたサイズ、身体をしっかりささえる安心構造。
- 姿勢保持・体圧分散性を重視しました。

※子ども用クッションは、特注サイズ・形状の製作をご対応します。(別途納期と料金がかかります)


TC-Y□□M3 シリーズ 32,000円(税別)
35,200円(税込)

内転防止のパット付タイプ。(姿勢の安定性に配慮)




TC-Y□□H2 シリーズ 32,000円(税別)
35,200円(税込)

自力で駆動される方に。(骨盤を安定させる形状)

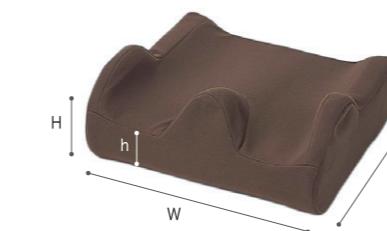

TC-Y□□シリーズ 20,000円(税別)
22,000円(税込)

障害の軽い方に。(体圧分散性重視のタイプ)

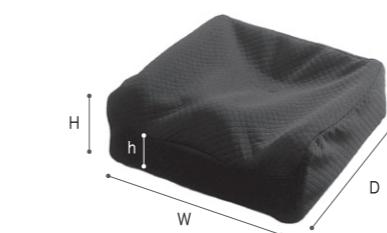

品番	サイズ	カラー
TC-Y26M3	W260×D260×H120×h80mm	● ブラック
TC-Y30M3	W300×D300×H120×h80mm	● ブルー
TC-Y32M3	W320×D320×H120×h80mm	● レッド
TC-Y34M3	W340×D340×H150×h110mm	● ブラウン
TC-Y36M3	W360×D360×H150×h110mm	
TC-Y38M3	W380×D380×H150×h110mm	

品番	サイズ	カラー
TC-Y26H2	W260×D260×H120×h40mm	● ブラック
TC-Y30H2	W300×D300×H120×h40mm	● ブルー
TC-Y32H2	W320×D320×H130×h50mm	● レッド
TC-Y34H2	W340×D340×H130×h50mm	● ブラウン
TC-Y36H2	W360×D360×H140×h60mm	
TC-Y38H2	W380×D380×H140×h60mm	

品番	サイズ	カラー
TC-Y26	W260×D260×H110×h80mm	● ブラック
TC-Y30	W300×D300×H110×h80mm	
TC-Y34	W340×D340×H150×h110mm	

学童いす用クッション LAPS kids

学校・施設でお使いの学童用いすに取り付けられ、
座位が安定するクッションです。



品番	サイズ	価格
TC-LK01 (Sサイズ)	W270×D275×H180×h35mm	16,800円(税別) 18,480円(税込)
TC-LK02 (Mサイズ)	W340×D330×H200×h50mm	18,800円(税別) 20,680円(税込)
TC-LK03 (Lサイズ)	W360×D380×H220×h60mm	19,800円(税別) 21,780円(税込)

■ カラー



キュッキュツ

ペチカ・スマート フリース仕様

キュッキュツとしっかり&やさしくサポート

- やわらかいビーズが、お使いになる方の背と腰に合わせてフィットするので、楽に座っていただけます。優しく身体を支えます。
- ちょっとしたサポートに手軽にお使いいただけます。
- 背もたれのある、どのようなタイプの椅子にもお使いいただけるように、様々なサイズをご用意しております。




厚いタイプ。いすやソファーにも。



うすいタイプ。車いすの奥行きが長い方に。

選べる3サイズ

スタンダードとスリムの他に、ロイヤルをご用意。ロイヤルは背や腰のしっかりサポートに。サポートしたい部分に合わせてお選びください。

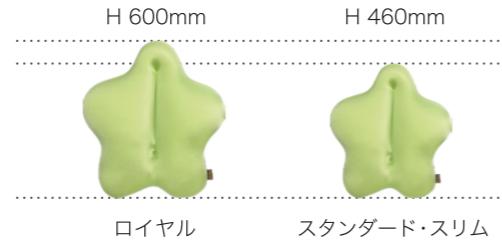

伸びる素材で優しくフィット

横にしっかり伸びるので(1.5倍)、サポート感を調整できます。




丸洗いできる

手で優しく洗ってください。

	スタンダード	スリム	ロイヤル
価格	3,300円(税別) / 3,630円(税込)	3,500円(税別) / 3,850円(税込)	5,000円(税別) / 5,500円(税込)
サイズ(W×H×D)	約400×460×130mm	約400×460×110mm	約550×600×170mm
重量	約350g	約390g	約860g
カラー	 エンジ ブルー マイカブラック ライトブルー モカ マスカット チェリー キャロット コーヒー	 エンジ×モカ コーヒー×モカ 黒×モカ ブルー×モカ チェリー マスカット マイカブラック	 エンジ ブルー マイカブラック ライトブルー モカ
材質	中材:ポリスチレン/表地:ナイロン、ポリウレタン		

- 中材の微粒子ビーズの持つ高い保温力で、足を入れるだけでいつでもぬくぬく。ご自分の体温で温かくなるので、電気もガスもいりません。
- 生地にフリースを使用することで、足を入れた瞬間、足に温かさを感じます。見た目もあったかです。

タイプ	ペチカ・スマート フリース仕様
価格	5,480円(税別) / 6,028円(税込)
サイズ(直径×H)	約380×140mm
重量	約350g
カラー	エンジ モカ
材質	中材:ポリスチレン/ カバー:ナイロン、ポリウレタン 底地:ポリエスチル、底材:ウレタンフォーム

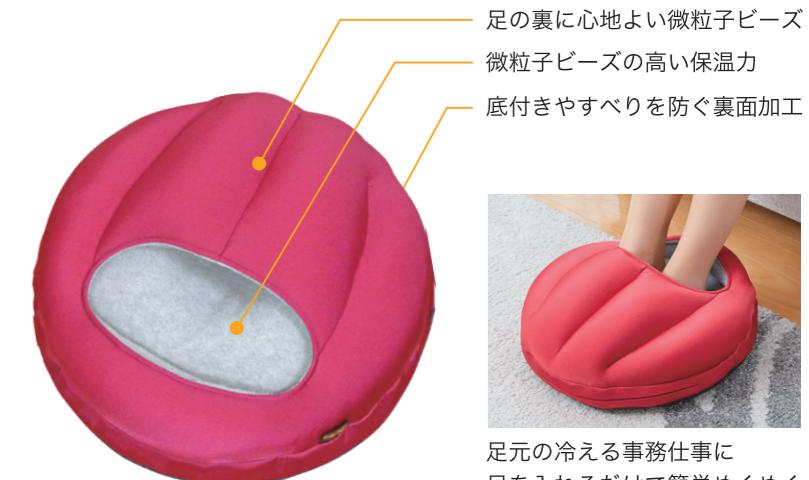

足元の冷える事務仕事に
足を入れるだけで簡単ぬくぬく

レグぽか&レグぽか・スリム

- ひざ掛けでは難しかったふくらはぎの保温にお使いいただけます。
- 車いすの方や冬の屋外、夏の冷房対策など季節を問わず活躍します。
- スリムタイプをご用意。体積を60%カット(レグぽか比)して動きやすくなりました。歩く方におすすめです。



ふくらはぎにフィットして、
しっかり保温します。

タイプ	レグぽか	レグぽか・スリム
価格	5,000円(税別) / 5,500円(税込)	5,000円(税別) / 5,500円(税込)
サイズ(W×H×D)	約400×350×サイド30/中央65mm	約300×360×30mm
重量	約360g(セット重量)	約210g(セット重量)
カラー	エンジ モカ	エンジ モカ モカ 黒
材質	中材:ポリスチレン/表地:ナイロン、ポリウレタン	



スリムは体積60%
カットですっきり
動きやすい。

オープンファスナー
採用でらくらく着脱

タカノの車いすクッションは、約60年のいすづくりのノウハウと、培ってきたシーティングの知識をあわせ、大学やリハビリテーションの専門研究機関にアドバイスをいただいてつくりあげたクッションです。

キャンプ用のいすでくつろげますか？

私たちの身の回りにあるいすの座面を見てみると、しっかりとしたフレーム（骨格）の上に、クッションがのっていることがわかります。自動車や長距離列車、映画館のいすなど、座り続ける時間が長ければ長いいすほど、クッションにはいろいろな工夫がされていることにも気がつきます。


では、よくみかける車いすはどのような構造になっているのでしょうか。まず大半の車いすは左右方向に折りたたむ機構がついているので、座面は布が1枚張ってあるだけです。背もたれも同じように布が張ってあるだけですね。このような布張りのシートのことをスリングシートと呼びますが、スリングシートのいすといえば、キャンプ用の折りたたみいすを思い浮かべることができます。皆さんの中には、車いすに長時間座った経験はなくても、肘掛けと背もたれがついたキャンプ用の折りたたみいすには座ったことがある、または所持しているという方も多くいらっしゃると思います。しかし「キャンプ用の折りたたみいすはたためて便利だから」と、普段の生活の中で使用している人はあまりいらっしゃらないのではないかでしょうか。これがどうしてなのか、ちょっと考えてみましょう。

スリングシートで支えられない骨盤や背骨。

スリングシートに座ると、座面が船底のような形になりますが、このときに座面の中心に座らないと骨盤が左右方向へ傾いてしまいます（図1）。骨盤が左右に傾いても頭は水平を保とうとしますから、その結果背骨が左右に曲がってしまい、背中や腰が痛くなります。

また背もたれがスリングシートだと、骨盤や背骨を後ろから支えることができないので、背骨が丸くなってしまって、座面前方にずれる力が強く働く（図2）結果、お尻や腰が痛くなります。

このように、スリングシートのいすは、お尻や腰が痛くなってしまって、長い時間座り続けることができない、座り続けることが不快である、ということを多くの人が経験上知っているので、普段の生活ではキャンプ用の折りたたみいすをほとんど使用しないのです。

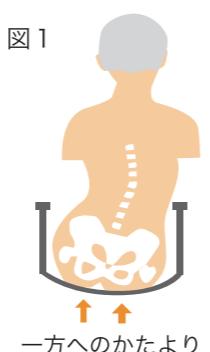

スリングシートがひきおこす二次障害。

ところがそのスリングシートに車輪がついた車いすとなるとどうでしょうか。スリングシートの車いすで食事をしたり、テレビを見たり、レクリエーション活動に参加しているなどの光景は、特別養護老人ホームやデイサービス施設などでよく目にします。座り続けるとあちこち痛くなってくるので、どうしても後にそり返って座るような姿勢になりがちで、その姿勢を自ら元に戻すことができなければ、車いすからずり落ちることになります。また、立ち上がる力のある人は、不快さから逃るために立ち上がったりすることもあるでしょう。こうして、車いすからずり落ちたり、拘束具で車いすに縛り付けられてしまう（身体拘束）という不幸な出来事がおこることもあります。また、くずれた姿勢で座り続けることで、背骨が変形してしまう、下肢の関節が固まってしまう、お尻に褥瘡（床ずれ）ができるなど、などの問題（二次障害といいます）を引き起こすこともあります。

このようにスリングシートの車いすをそのまま「いす」として使用することは、とても多くの問題を生じさせます。この問題を解決することの一つの選択肢が、車いす専用クッションを活用する、ということなのです。

スリングシートによる問題を解決するために。

車いす専用クッションを使用していないスリングシートの車いすは、送迎や運搬のために一時的に人を乗せるためのいわば「台車」としての機能が中心で、そのままでは「いす」として活用することはできないということを一人でも多くの人に知りたいと思います。車いす専用クッションを使用しないのであれば、それは居間や食堂に「運搬」するための道具としてのみ使い、食事や趣味活動に参加するときは、体格にあったいすやテーブルを使用するべきです。

車いすのまま食事をしたり、趣味活動などを行わなければならない場合は、「調整機能つき車いす」（モジュラー型車いす）や車いす専用クッションを活用することで、「台車」に無理やり（縛り付けられて）「載せられている」不幸なことが、一刻も早くなくなってほしいと願っています。

専門家に相談しましょう。

車いす専用クッションは、使う方の状態に応じて材質や形状などを適切に選定しないと逆効果になる場合があり、また調整機能付車いすを適切に身体機能にあわせるためには、専門的な知識が必要になります。理学療法士や作業療法士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

※一般社団法人福祉用具活用相談センター理事長で、理学療法士の吉川和徳さんにご執筆いただきました。

タカノクッションデモ機申し込み書

FAX 0265-72-3203

必要事項にご記入のうえ、コピーしてそのまま送信してください。

貴社名 / 貴施設名	ご担当者名
ご住所 □□□-□□□□	
都道府県	
TEL	FAX

●貸し出しを要望される項目に をしてください。(※商品によってはデモ機のご用意がないものもございます)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> にこにこクッション (タイプ、品番 |) <input type="checkbox"/> 座位保持クッションLAPS&LAP Backs |
| <input type="checkbox"/> タカノクッション wipeR (タイプ、品番 |) <input type="checkbox"/> ジエルセルシリーズ (タイプ、品番 |
| <input type="checkbox"/> タカノクッション R (タイプ、品番 |) <input type="checkbox"/> SSP (タイプ、品番 |
| <input type="checkbox"/> タカノクッションMOLA (タイプ、品番 |) <input type="checkbox"/> その他 () |

●デモ先・ご提案先

～ご要望等～ 希望貸出期間:[/ ~ /]

※送り先がご住所とちがう場合はご記入ください。

上記をご記入の上、お気軽にファックス(0265-72-3203)にてお申し込み下さい。

※所定の用紙があるお客様など、ご都合のよい方法をお選びください。

●弊社回答欄●

デモ機貸出日[/ 出荷～ / 弊社必着]

備考:

●仕様、価格は予告なく変更することがあります。 ●カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。

お問い合わせ



心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks. タカノ株式会社 タカノハートワークス



■オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331 TEL0265-72-3157 FAX0265-72-3203

お客様ご相談窓口 **0120-825-845** フリー ダイヤル 受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00
携帯電話・PHSからご利用いただけます。