

介護保険レンタル対応 TAISコード:00297-000045

移乗ボード のせかえくん

水平移乗+持ち上げての移乗が行えます！



900g

- 裏面の生地がすべりやすいので、水平移乗が楽に行えます。
- 表面は優しい肌ざわりで、厚みも1cm、クッション性があります。
- 2人もしくは4人で130kg持つ実験にクリアしました。
- 30°C以下、中性洗剤で手洗いできます。


①寝ている方を側臥位にして、のせかえくんを敷き込みます



②移乗させる機器をベッドに横づけしベッドの高さに調整します



③のせかえくんのハンドルを2ヶ所持ちます

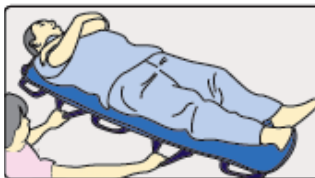

④ハンドルをゆっくり引き寄せ、機器の中心に移乗します



●人を完全に持ち上げて使用する場合は、必ず4人で8ヶ所のスライディングハンドルを持って、ご使用ください。



☆光沢のある面が裏面です。

品番 TB-502

サイズ W550mm×L1740mm×H10mm

価格 2019年10月より ¥25,000(税別)

JANコード 4523725006387

移乗ボードのせかえくん デモ品 お申し込み用紙

●FAXでお申し込みください。

FAX0265-72-3203

ご使用先: _____

ご使用場面: _____

御施設名 / 御社名		ご担当者名	
ご住所 □□□-□□□□		都道 府県	
TEL	FAX		
Eメールアドレス _____ @ _____			

●ご意見・ご要望がございましたら、ご記入ください。

ご依頼ありがとうございます。

月 日 出荷予定です。 お貸し出し期間 / ~ /
備考

●お問い合わせ



タカノ株式会社 タカノハートワークス

■オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331
TEL0265-72-3157 FAX0265-72-3203

お客様ご相談窓口 **0120-825-845**

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

http://www.takano-hw.com
E-mail:fukushi@takano-net.co.jp