

タカノクッション wipeR

取扱説明書

ごあいさつ このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ・本書はクッションを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。
- ・ご使用前によくお読みの上、正しく安全な取扱い方法を十分理解されてからお使いください。
- ・本書は、いつでも出して見られるよう大切に保管してください。
- ・お求めいただきました商品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。

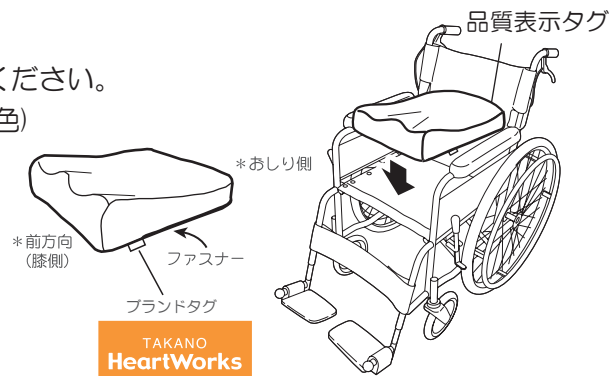
特長

- ・このクッションは、かたさの異なるウレタンフォームを組み合わせた多面構造体です。体圧分散性と姿勢保持に優れたクッションです。
- ・形状の異なるタイプで、座面用3種類をご用意しております。
- ・軽量なので、取り扱いも楽に行えます。
- ・カバーは耐薬品性と防水機能に優れた生地を使用しております。

車いすへの取り付け

- ・車いすの上に右図のようにタグに従って設置してください。
ファスナー側の面を必ず下にして、車いすの奥まで入れて使用してください。
- ・品質表示タグが後ろになります。そのとき、ブランドタグ(オレンジ色)が車いすの左側の位置になります。

- ⚠ クッションのご使用は医師や専門家にご相談のうえご使用ください。
- ⚠ クッションをご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合には直ぐに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。



お手入れ方法

- ⚠ 脱水機は使用しないでください。破損の原因となります。
- ⚠ アイロンは使用しないでください。溶解・変質・変色の原因となります。

清拭方法

- ・クッションが汚れたり、使用される方が替わる際は、必ずクッションの全面を下記の手順 (①～④) に従ってお手入れしてください。このとき、クッションを折り曲げないように注意してください。

- ①汚物があれば除去してください。(血液、便など)
- ②石鹼水(市販の石鹼、中性洗剤などを水で薄めたもの)でクッションの表面を拭き、汚れを落としてください。
- ③消毒液でクッションの表面を清拭消毒してください。

消毒液は、必ず下記の薬品を、指定の濃度を守って使用してください。
また各消毒液の指示に従って使用してください。

- ・76.9～81.4% : 消毒用エタノール
- ・0.05～0.2% : 塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)
- ・0.05～0.2% : 塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)
- ・0.05% : グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテンなど)
- ・0.1～0.5% : 次亜塩素酸ナトリウム(ピューラックスなど)

- ④清拭後、自然乾燥させてください。※天日干しはしないでください。

カバーの手入れ

- ①カバーのファスナーを完全に開け、中材を取り出してください。
- ②家庭用中性洗剤で洗濯できます。(洗濯ネットの使用をおすすめします)
- ③軽くしぼってください。 ※脱水器は使用しないでください。
- ④陰干しして完全に乾燥させてください。 ※完全に乾燥しないとカビ発生の原因となります。
- ⑤乾燥機をご使用の際は、低温設定(60℃)以下にしてください。

中材の手入れ

- ①汚れなどは、柔らかい布に中性洗剤を含ませ、軽く拭き取ってください。
- ②水分がウレタンフォームに浸透してしまった場合は、風通しの良い場所で日陰干ししてください。

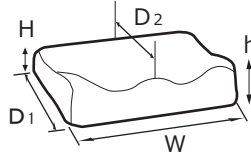
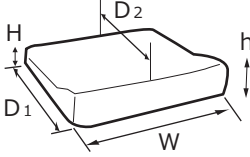
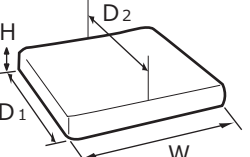
使用上の注意

- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 分解して口の中に入れたり、飲み込んだりしないでください。
- 切断したり、穴をあけたりしないでください。
- 火気や高温な場所には近づけないでください。
- クッションを折り曲げて使用しないでください。

保管方法

- 直射日光の当たる場所で保管しないでください。
劣化の原因になります。
- クッションの上に重量物を置いたまま保管しないでください。
変形・破損の恐れがあります。
- 長期保管する際は、裏面のお手入れ方法に従って、清拭を行って保管してください。

仕様

品名		wipeR1	wipeR3	wipeR4
品番		TC-REW1	TC-REW3	TC-REW4
				
サイズ (mm)	W	400		
	D1/ D2	400 / 425		
	H	70	50	60
	h	120	100	-
重量 (g)		650	500	550
素材	中材	ウレタンフォーム		
	カバー	表材：ポリエステル 60% ポリウレタン 40% 裏材：ポリエステル 60% ポリウレタン 40%		

【推奨車いすサイズ】
38～40cm

■お問い合わせ先

 心を形にするテクノロジー、あります。 **TAKANO HeartWorks タカノ株式会社**

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331
TEL. 0265-72-3157 FAX.0265-72-3203

タカノお客様ご相談窓口

 フリーダイヤル

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～ 17:00 携帯電話・PHSからでもご利用いただけます。)

※ 混雑時にはつながりにくい場合があります。 時間をおいてからお掛け直してください。



説明書