

バンビーナposi オプション


TSL-841/842/844・TSC-841/842・TSP-841・TSI-841/842/843
TST-841・TSA-841・TSH-841・TSF-841・TSFP-841

取扱説明書 保証書付


ごあいさつ

このたびはタカノ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項および組み立てかたについて記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに保管してください。


脚パイプ
S/M(TSL-841/842)

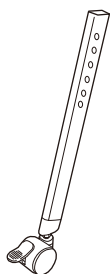


ダイニング脚パイプ
(TSL-844)

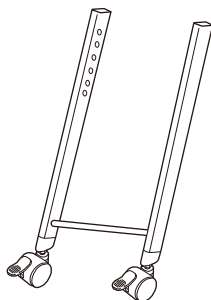


クッションS/M
(TSC-841/842)

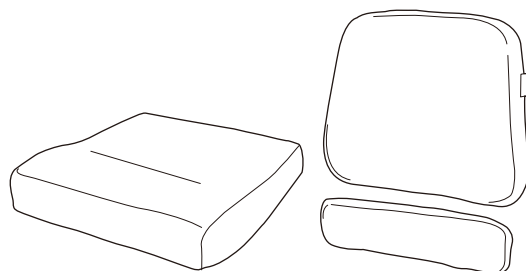


内転防止 パッドS/M/U
(TSI-841/842/843)

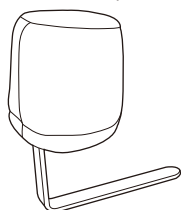


骨盤パッド(TSP-841)

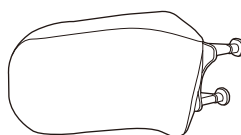


体幹パッド(TST-841)

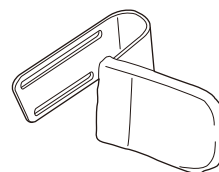


アームサポート
(TSA-841)

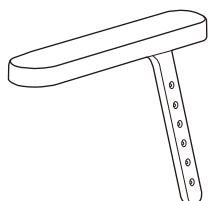


ヘッドサポート
(TSH-841)

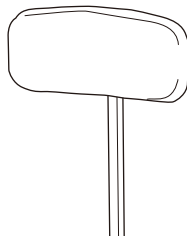

フットサポート(TSF-841)

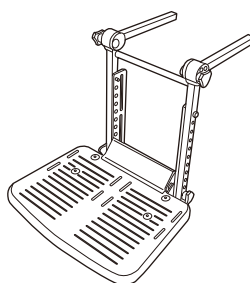

転倒防止パイプ
(TSFP-841)

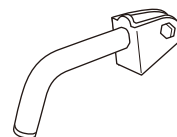

1. 目次・お使いになる前に

も く じ


1. 目次・商品説明	1
2. お使いになる前に	2
3. 各オプションの名称	3
4. 安全上のご注意	4
5. 各オプションの取付け・調節方法	7
6. キャスターロック方法	15
7. 各クッションの取外し方法	15
8. 日常のお手入れとご注意・お問い合わせ	17
9. 仕 様	18
10. 品質保証書・保証規定	19

バンビーナposiとは

タカノ商品において長い間ご愛顧いただいている「バンビーナチェア」、それに連なるシリーズラインナップとして、「バンビーナposi」が増えました。

バンビーナシリーズの暖かみあるデザインを活かしつつも、
お使いいただくお客様の座位をしっかりと保持し、さらに使いやすく、多機能に進化しました。
「posi」には「positioning (ポジショニング)」「positive (ポジティブ)」
といった意味を含めています。この商品に関わる多くの方々が、
その意味を感じ取っていただければ幸いです。

※バンビーナposiは肘当て部に自然の木を使用しております。
その為、木目や色味、節等に多少のばらつきがございます。
ご了承の上、自然の風合いをお楽しみください。

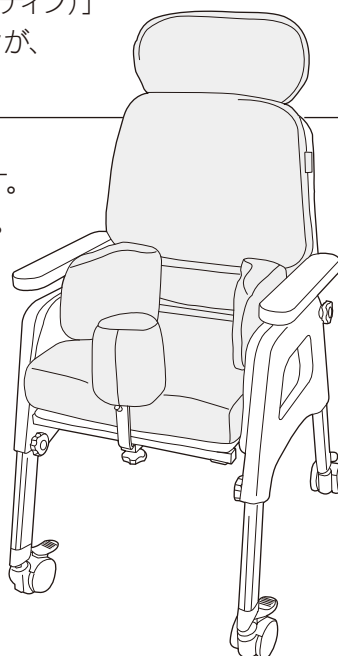

2.お使いになる前に

各バンピーナposiオプションを取り出して、梱包内容に漏れや破損がないことを確認してください。


●取扱説明書

□取扱説明書




●脚パイプSセット/Mセット

□脚パイプS/M×4 (A・B2個ずつ)

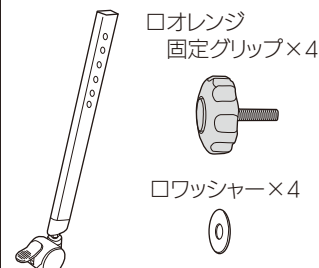


●ダイニング用脚パイプセット

□ダイニング用脚パイプ×2

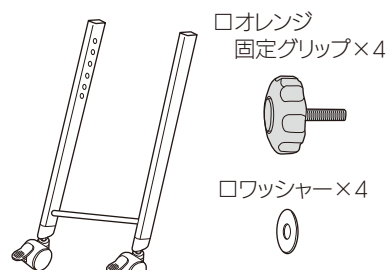

●アームサポートセット

□アームサポート
(左右1個ずつ)

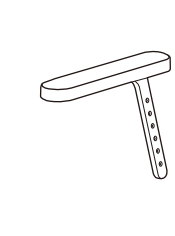


●クッションセット

□背クッション


□ランパークッション

□座クッション

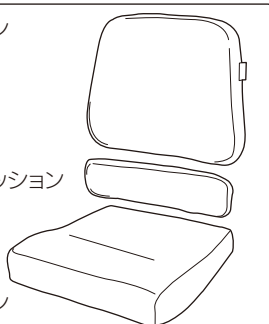


●内転防止/パッドセット

□内転防止/パッド(S/M/U)

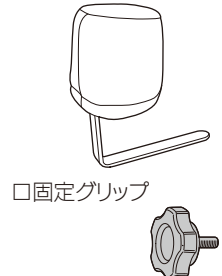


●ヘッドサポートセット

□ヘッドサポート

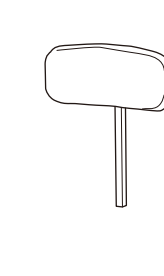

●骨盤/パッドセット

□骨盤/パッド
(左右1個ずつ)

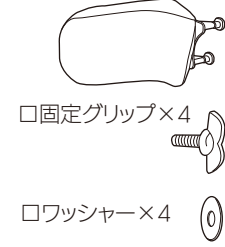

●フットサポートセット

□フットサポート


□巻フック×2

□六角ナット×2

□十字穴ボルト×2


□角根ボルト×4

□固定グリップナット
×4

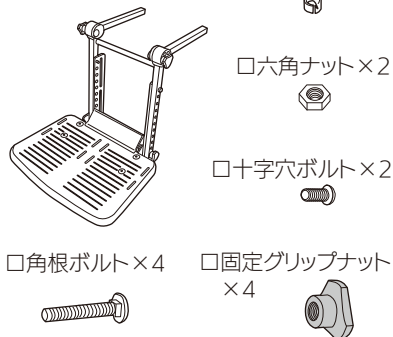

●体幹/パッドセット

□体幹/パッド×2 (左右1個ずつ)

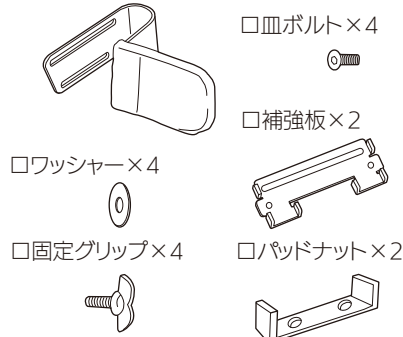

●転倒防止パイプセット

□転倒防止パイプ(左右1個ずつ)



※オプションの注文内容により梱包内容が異なります。梱包箱の注文内容チェック欄と照らし合わせながらご確認ください。

※不足部品がありましたら、使用せず下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

※部品の取付け、取外し作業を行う場合は、スパナやプラスドライバーが必要になる部品もございます。

7～14ページ「5.各オプションの取付・調節方法」をご確認いただき、該当の工具をご用意ください。

万一、梱包内容に不足や破損があった場合や不明な点は、お買い求めいただいた販売店、または下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

タカノお客様ご相談窓口  フリーダイヤル **0120-825-845**

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからでもご利用いただけます。)


※混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからおかけ直してください。

3.各オプションの名称

脚パイプ S TSL-841 M TSL-842


Sサイズ

脚パイプ
脚キャップ
キャスター

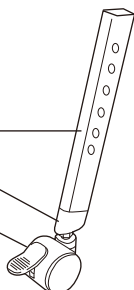

Mサイズ

脚パイプ
脚キャップ
キャスター

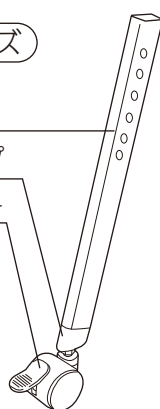


オレンジ固定グリップ



ワッシャー 0

ダイニング脚パイプ TSL-844

脚パイプ
脚キャップ
キャスター

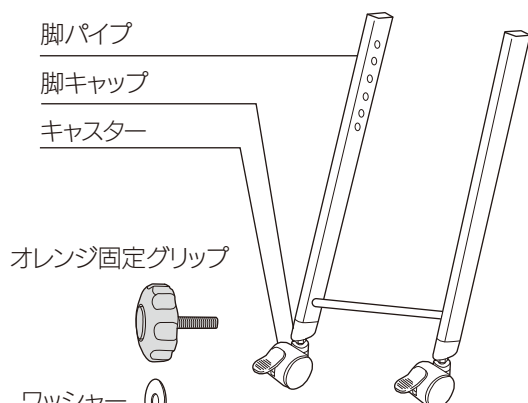

オレンジ固定グリップ


ワッシャー 0

フットサポート TSF-843

差込金具

角根ボルト

取付用固定
グリップナット

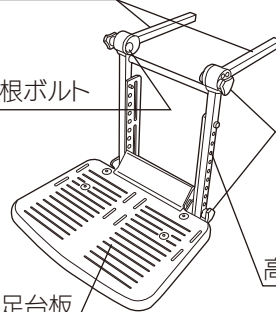


高さ調整フレーム

足台板

アームサポート

TSA-841

肘当て部
本体差込金具

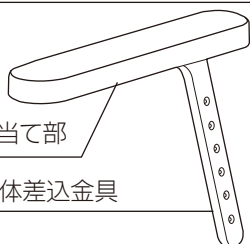

内転防止パッド

S TSI-841

M TSI-842

U TSI-843


内転防止パッドクッション

内転防止パッド
取付金具

固定グリップ




※U：ユニバーサル

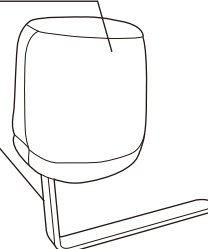


クッションセット S TSC-841


M TSC-842

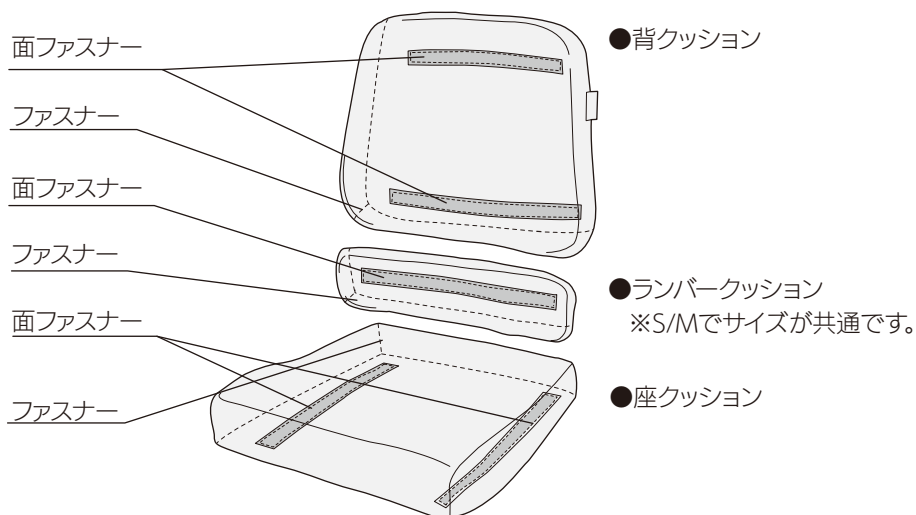


ヘッドサポート TSH-841

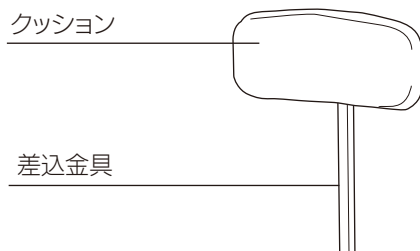


骨盤パッド TSP-841

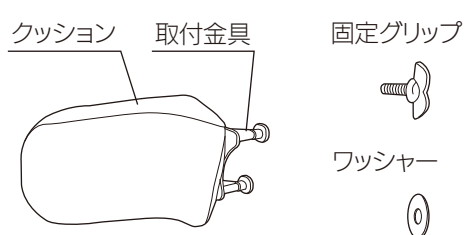

体幹パッド TST-841

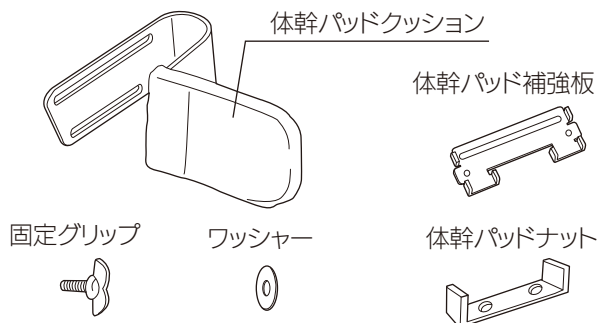

転倒防止パイプ TSFP-843

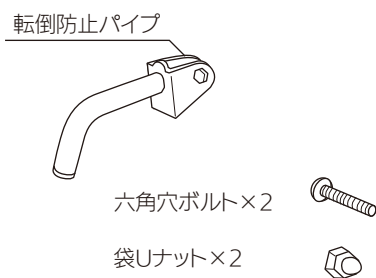

4. 安全上のご注意

製品を使用する上でご理解いただきたい警告があります。ここに記載した内容を無視した場合、使用者に重大な損害を被る恐れがあります。よくお読みの上、商品をご使用ください。



警告

取り扱いを誤ると、重大な事故につながる恐れがあります。
このような使い方はしないでください。

適応体重は S サイズ：25kg 以下、M サイズ：40kg 以下となります。
適応体重以上の方のご使用は製品の破損の恐れがありますのでご使用はおやめください。

椅子の上に立ったり、不安定な姿勢で腰掛けしないでください。転倒の恐れがあります。

使用前に、固定グリップやねじ類のゆるみがないか確認してください。

緊張等により反り返りが激しいお子様は転倒の危険がありますので、オプションの
転倒防止パイプを取付の上、使用中はお子様から目を離さないで下さい。


- 本商品は、お子さまの体位をサポートする為のいすです。遊具や乗り物・踏み台など、座る目的以外の使い方は絶対にしないでください。転倒や事故・破損の原因となります。
- 商品を破棄するときは、焼却しないでください。有害なガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。
- いすの上に立ったり、飛び跳ねたり、不安定な姿勢で腰掛けしないでください。
転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- 傾斜面では使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- この商品は一人用です。二人以上、同時に座らないでください。転倒や事故・破損の原因となります。
- ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- 固定グリップやスナップピンなどは専用のものを適正な本数で取り付けてください。
取付数が少ないと、破損等の原因となります。
- 本商品は車いすではありません。お子さまを座らせたまま長距離を移動させないでください。
転倒や事故・破損の原因になります。
- お子さまを座らせたまま段差を乗り越えないでください。転倒や事故・破損の原因になります。
- お子さまが座っている時や乗り降り時など、移動時以外は確実にキャスター全てをロックしてご使用ください。
ロックをせずに使用すると転倒や事故・破損の原因になります。
- フットサポートの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
- 各固定グリップやスナップピンなどは最後までしっかりと取り付けてください。使用中に外れて転倒する恐れがあります。
- 脚の高さは揃えてお使いください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- キャスターもしくは脚キャップが全て接地するようにお使いください。転倒や事故・破損の原因となります。
- 誰も座っていない状態でキャスターロックしてください。転倒や事故・破損の原因となります。
- フットサポートと脚は当たらないようにご使用ください。転倒や事故・破損の原因となります。
- 座クッションは前に出過ぎないように取り付けてください。フレームが無いところに座り転倒する恐れがあります。



注意

取り扱いを誤ると、傷害を負ったり故障の原因となる恐れがあります。ご使用の際にはご注意ください。

- 各サイズの対象者目安は「9.仕様」に記載しています。適正以上の体重・身長の方が座りますと転倒や事故・破損の原因となりますのでお控えください。
- 本商品は屋内用です。屋外でのご使用は、転倒や事故・破損の原因になります。
- 各部の調整をするときは、手や指を挟まないように操作してください。ケガの原因になります。
- 固定グリップやネジ、金具類はガタツキ、グラツキがないか使用前に点検してください。必要に応じて締め直してください。適正に固定されていないと転倒や事故・破損の恐れがあります。
- 肘や背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- 肘、座面、背もたれに物を載せないでください。転倒や、落下してケガや床面のキズの恐れがあります。
- 商品には、強い衝撃を与えないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 座った状態でいすを傾けないでください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- 幼児一人では、使用させないでください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- 座らせたままでの調整はしないでください。転倒や事故・破損の恐れがあります。
- この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。
- 動かす際は本体フレームを持ってください(下図参照)。背などを持つと緩みの原因となります。
- 直射日光や雨風の当たる場所・ストーブなどの熱が直接あたる場所・湿気・乾燥の著しい場所での使用や保管は避けてください。変形や変色・眼割れ、故障や破損の原因となります。
- 水などが付いた場合はすぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと故障やさび・変色の原因となります。
- 床面の平らな場所に置いてください。転倒や事故・破損の原因となります。
- キャスターをロックした状態で押さないでください。タイヤが摩耗すると同時にフロアの床にキズや汚れが付く恐れがあります。
- 各固定グリップにものを引っ掛けないでください。転倒や破損の原因になります。
- マットやじゅうたんの上で、取り付け・調節作業を行ってください。床を傷つける恐れがあります。
- 使用中または使用後に肌荒れ、発疹、発赤などの異常が表れた場合は使用を中止し、専門医に相談して指示に従ってください。
- 固定用グリップは3種類あります。それぞれ指定箇所に使用してください。誤った箇所に取り付けると、部品が外れてケガをする恐れがあります。
- Sサイズの脚にMサイズの背を組み合わせた場合、バランスが悪くなり転倒の恐れがあります。異なるサイズの組み合わせはおやめください。
- 脚を外した状態で座椅子として使用しないでください。バランスを崩し、転倒の恐れがあります。又、床を傷つける恐れがあります。

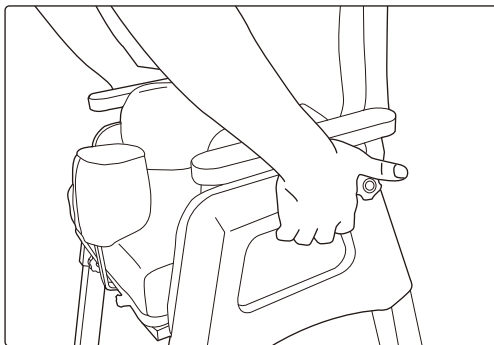

5.各オプションの取付け・調節方法

1.クッションS/Mの取付け方法


用意するもの：本体、クッションセット

●クッションセット

□背クッション

□ランバークッション

□座クッション

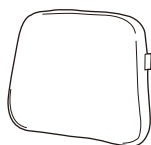



●座クッション

座板の面ファスナーと座クッションの面ファスナーが合うように取付けてください。

※クッションは薄い方を背側にしてください。

※座板と座クッションは後端を合わせてください。

(Mサイズは、座面に対し座クッションが少し前にでます)

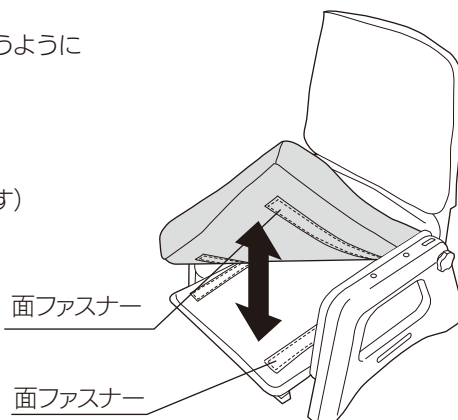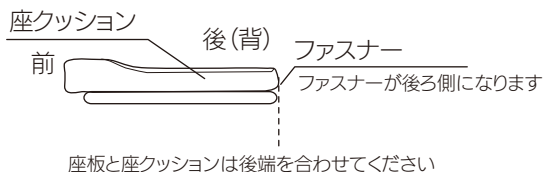


●ランバークッション

背下部にある面ファスナーとランバークッション

の面ファスナーが合うようにクッションを取付けてください。

クッションはファスナーが下になるように取付けてください。


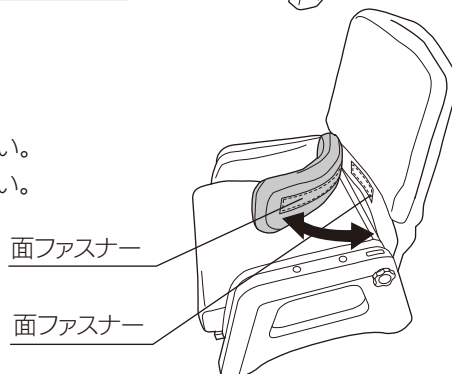


●背クッション

背上部にある面ファスナーと背クッションの面ファスナーが合うようにクッションを取付けてください。

クッションはファスナーが下になるように

取付けてください。

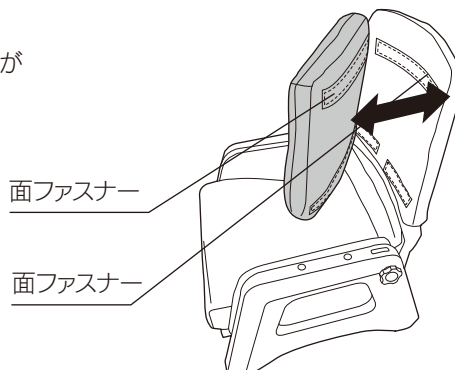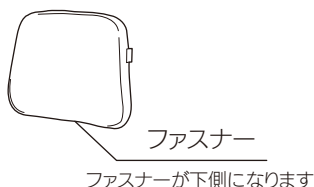

※クッションは洗濯することができます。洗濯する際は金具パーツから取外してください。
洗濯時の注意事項は18ページの「日ごろのお手入れ」をご参照ください。

2.脚パイプS/M取付け・調節方法


用意するもの: 本体、脚パイプS/Mセット

- ①本体の脚差込口に脚パイプを差し込みます（本体のAシールがある差込口にAの脚を差し込み、本体のBシールがある差込口にBの脚を差し込みます。脚パイプの長さ調節穴が内側になるように注意してください。）
- ②脚パイプの長さを確認し、長さ調節穴と固定穴の位置を合わせて、ワッシャーを付けた固定グリップで固定してください。
- ③前後左右4脚で長さが同一になるよう①～②の作業を行ってください。（脚の調節穴に数字が記載されています。それぞれの脚を同じ数字の穴に合わせてください。）

※脚はA・Bの2種類あります。



ご注意ください。

※キャスターロックの方法は
15ページをご参照ください。

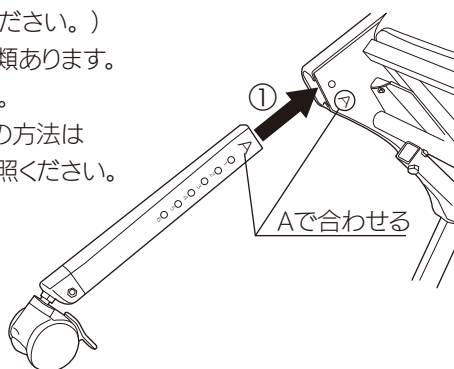

●脚パイプSセット/Mセット

□脚パイプS/M×4 (A/B2個ずつ)

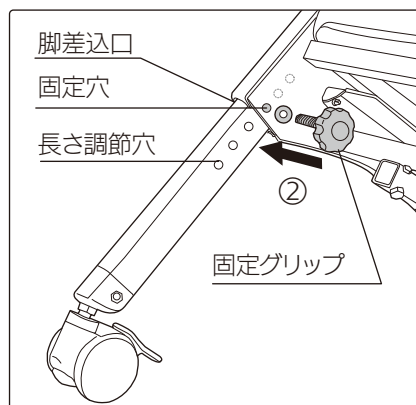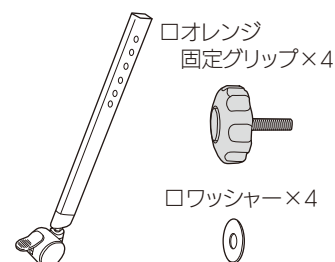

3.ダイニング用脚パイプ取付け・調節方法


用意するもの: 本体、ダイニング用脚パイプセット

- ①本体の脚差込口に脚パイプを差し込みます。（組付け詳細は2.脚パイプS/Mをご確認ください）
- ②脚パイプの長さを確認し、長さ調節穴と固定穴の位置を合わせて、ワッシャーを付けた固定グリップで固定してください。
- ③前後2脚で長さが同一になるよう①～②の作業を行ってください。（脚の調整穴に数字が記載されています。それぞれの脚を同じ数字の穴に合わせてください）

※脚にはA・Bのシールが
貼られています。



ご注意ください。

※キャスターロックの方法は
15ページをご参照ください。

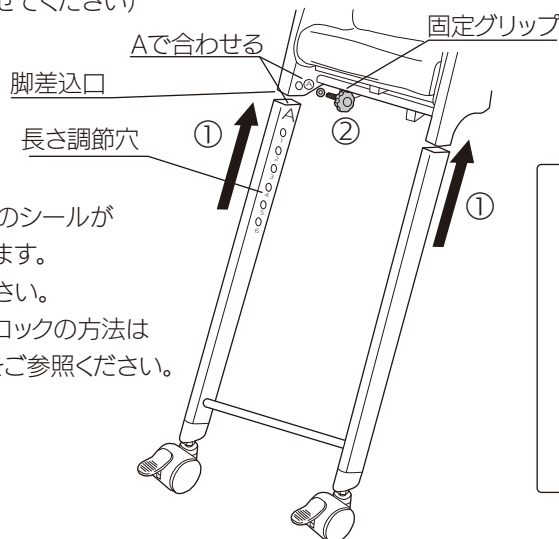

●ダイニング用脚パイプセット

□ダイニング用脚パイプ×2

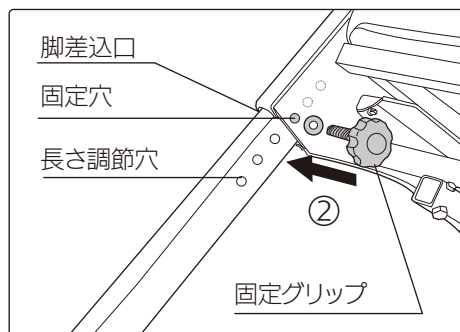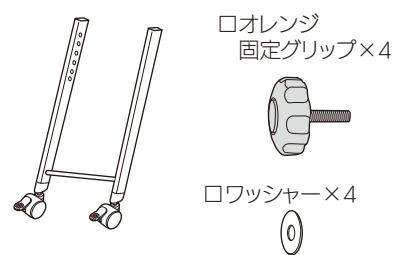

5.各オプションの取付け・調節方法



4.アームサポート取付け・調節方法

用意するもの：本体、アームサポートセット

- ①本体のアームサポート穴キャップを固定している固定グリップを緩め、アームサポート穴キャップを取り外します。
(アームサポート穴キャップは大切に保管してください)
 - ②アームサポート差込口に差込金具を差し込みます。左右があるので注意してください。
(アームサポート部の裏に R/L シールが付いています。右手側：R・左手側：L)
 - ③アームサポートの高さを確認し、長さ調節穴が固定グリップに当たるように合わせて、固定グリップで固定してください。
 - ④両アームサポートについて①～③の作業を行ってください。
- ※調節時は固定グリップを緩めてから③④の操作を行ってください。

●アームサポートセット

□アームサポート×2
(左右1個ずつ)

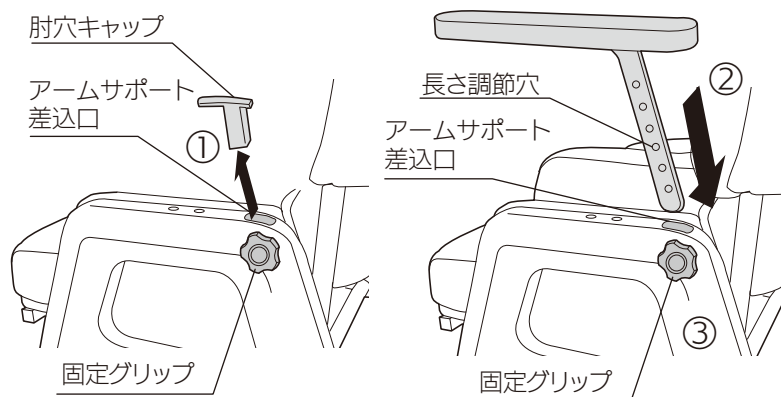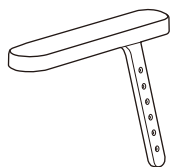


5.内転防止パッドの取付け・調節方法

用意するもの：本体、内転防止パッドセット


- ①本体座面裏にある内転防止パッド差込口に取付金具を差し込みます。
- ②内転防止パッドの位置を確認し、長さ調節穴と固定穴の位置を合わせて固定グリップで止めます。
- ③調節時は固定グリップを緩めてから②の操作を行ってください。

●内転防止パッドセット

□内転防止パッド

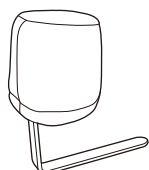


□固定グリップ

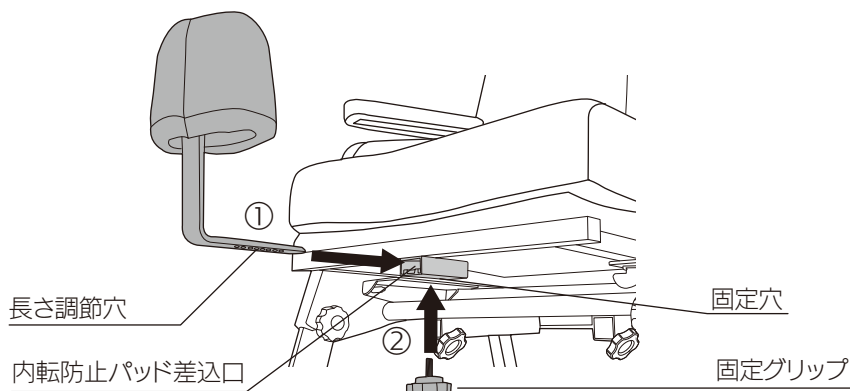

6. 骨盤パッドの取付け・調節方法 用意するもの：本体、骨盤パッドセット

※先にランバークッションを取り付けてください。

- ① 背裏カバーのクリップ3箇所を外し、背裏カバーを外します。
(外し方は下図参照)

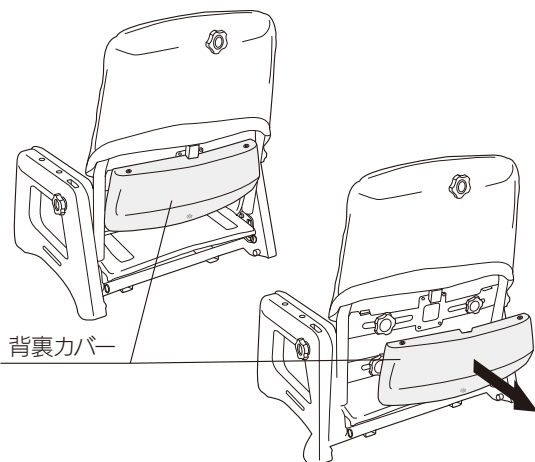

● 骨盤パッドセット


□ 骨盤パッド □ 固定グリップ×4




□ ワッシャー×4




先の尖ったもの (固定グリップ先端でも可) クリップ

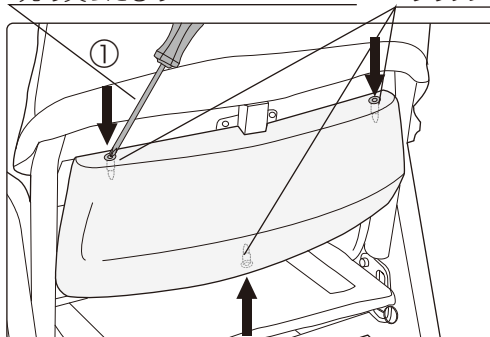

取り外し方

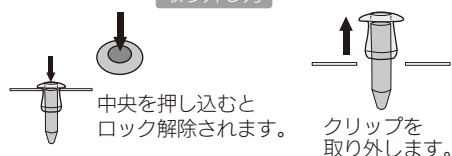

取り付け方

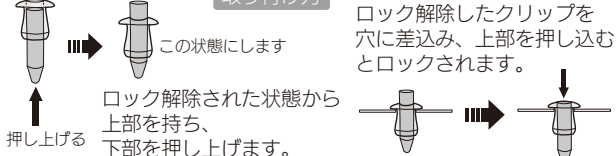


- ② 背フレーム下部の長さ調節穴に前から骨盤パッドを当て、後ろからワッシャーをつけた固定グリップを少しだけ回し入れ骨盤パッドを仮止めします。左右があるので注意してください。

(パッド金具部に R/L シールが付いています。右手側：R・左手側：L)


- ③ 骨盤パッドの位置を確認し、固定グリップで止めます。

- ④ 背裏カバーを元に戻します。


骨盤パッド 背クッション ランバークッション

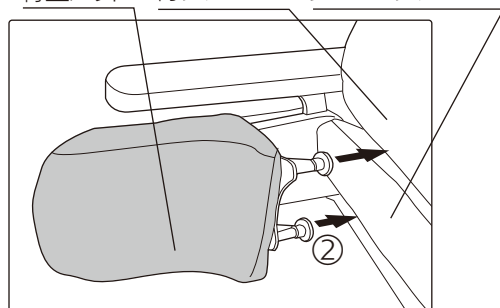


左用

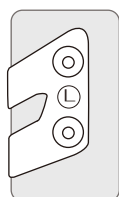

右用

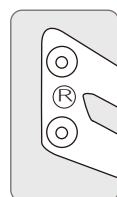

骨盤パッド

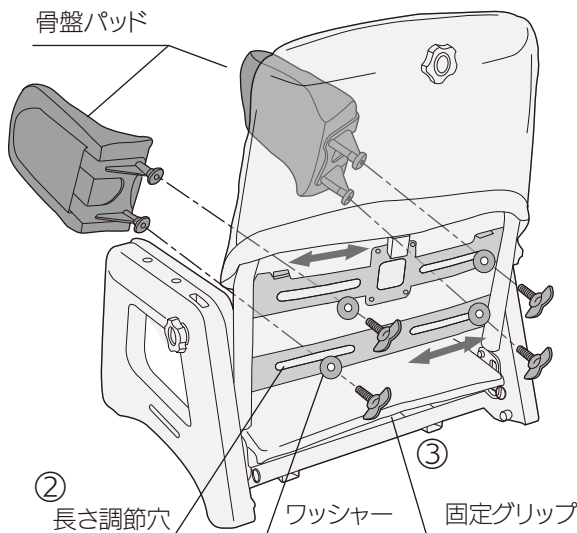



5.各オプションの取付け・調節方法

7.フットサポート取付け・調節方法

用意するもの：本体、フットサポートセット

用意する工具：スパナ(10mm)・+ドライバー(2番)

●フットサポートセット

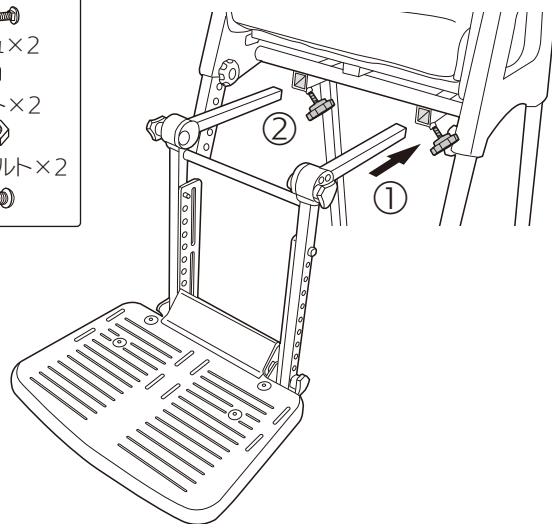
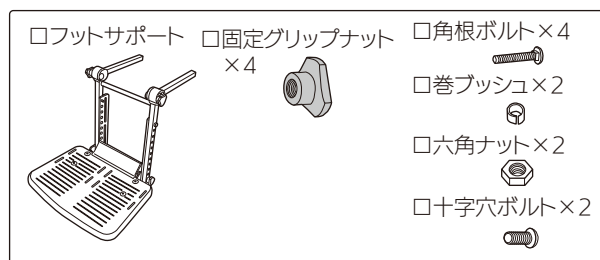


【前後(奥行方向)の調整】

- ①本体差込口に差込部を差し込みます。
- ②差込量を調節し、固定グリップを締めて固定します。

【フレームの角度調整】

上部の左右にある固定グリップナットと角根ボルトを外し、
 ひざ位置の回転角度を調整穴に合わせて調整し、再度固定します。

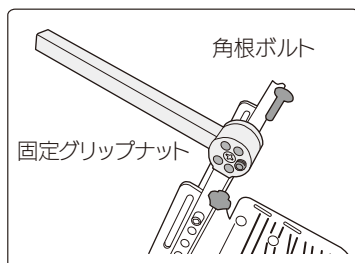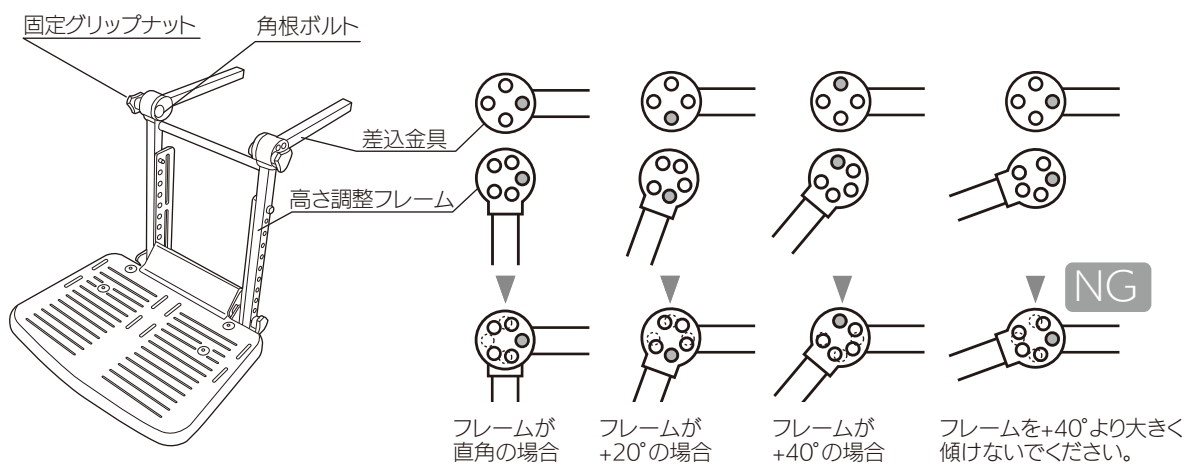

警告


フレームの角度を直角の位置から上げると転倒の恐れがあります。オプションの転倒防止パイプを前脚に取り付けてください



警告

フレームの角度は直角の位置から±40°となります。それ以上の角度変更は危険ですのでおやめください。

【足台板の高さ調整・角度調整】

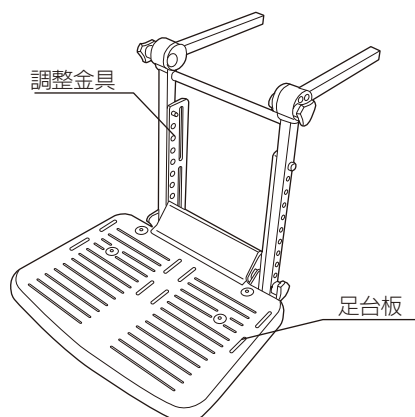

足台板の高さと角度は、調整金具の穴と足台金具の穴を組み合わせることで一度に行うことができます。下部固定グリップナットと角根ボルトを外し、足台板の高さと回転角度を調節して再度固定します。



警告




各ボルト・ナット・グリップは確実に締めてください。

高さ調整は、スリット内で行うことができます。上下2つのスリットを超えて高さを調節する場合は、現状のスリットから六角ナット・巻きブッシュ・十字穴付きボルトを外し、別のスリットに差し込んでから再度固定してください。



注意



調整時には指を挟まないようにご注意ください。

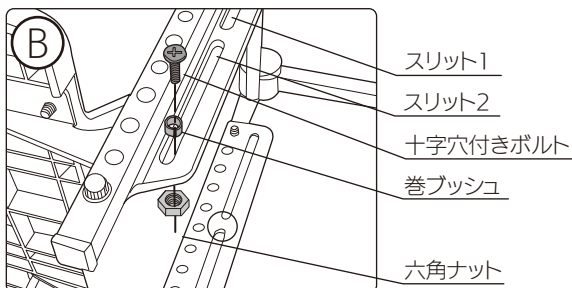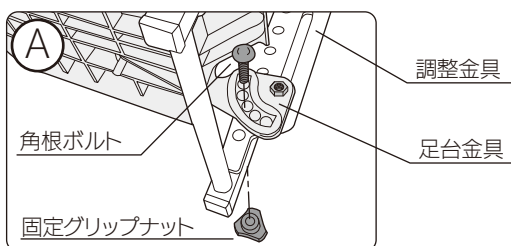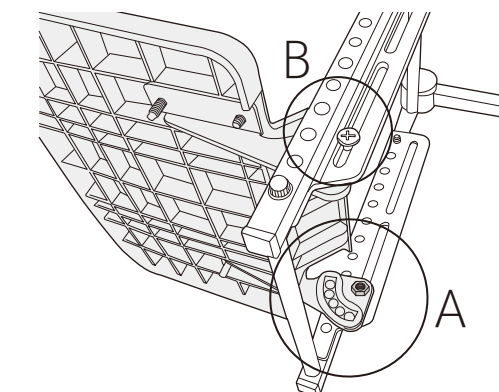

【フットサポート調整時のご注意】

フットサポートは、ダイニング脚と合わせてご使用ください。

ダイニング脚を一番短くした場合、フットサポートを一番下に下げると足台板が脚に当たりますのでご注意ください。また、フットサポートの差込、取り外し時にフットサポートとダイニング脚が当たる場合は、上部のグリップナット・角根ボルトを取り外し、フレームが可動する状態にすると、フットサポートと脚のあたりを避けることができます。

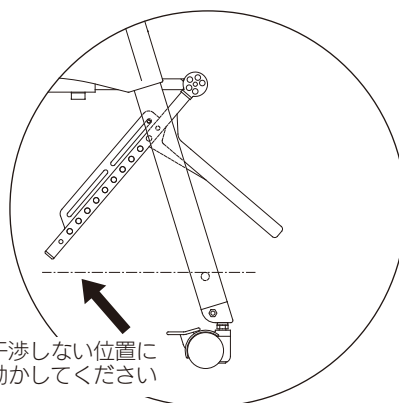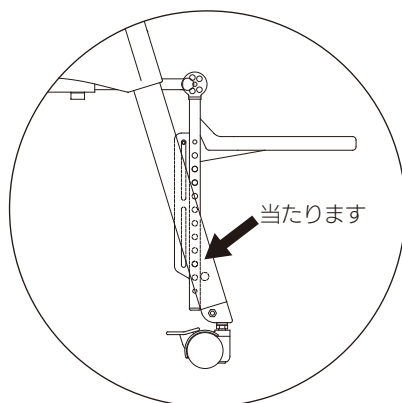

5.各オプションの取付け・調節方法

8.体幹パッド取付け・調節方法




用意するもの：本体、体幹パッドセット

用意する工具：+ドライバー（2番）

※先に本体にランバー・背クッションを取り付けてください。

- ①背力バーサイドにあるファスナーを開けます。
- ②背に補強板を皿ボルトで留めます。（+ドライバー）
- ③体幹パッドとパッドナットで補強板を挟み込むようにし、固定グリップを少しだけ回し入れ、体幹パッドを仮止めます。左右があるので注意してください。
（パッド金具部に R/Lシールが付いています。
右手側：R・左手側：L）
- ④体幹パッドの位置を確認し、固定グリップで止めます。

●体幹パッドセット

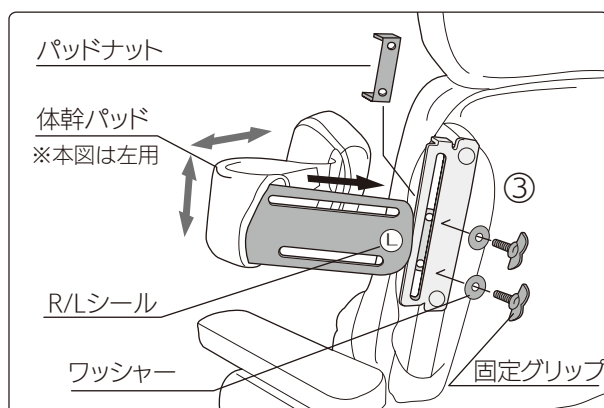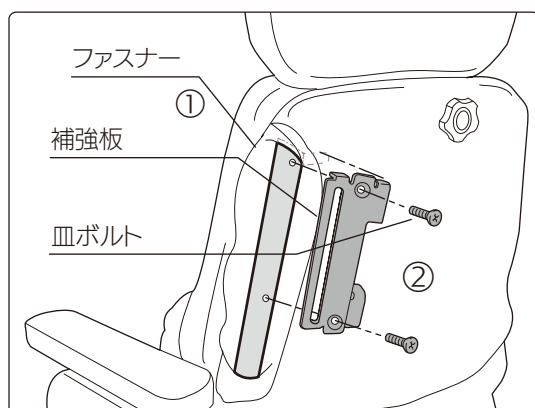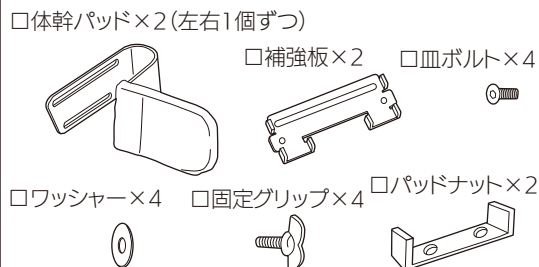

注意

取付け・調整時は、金具のエッジでケガ、指はさみ等にご注意ください。



注意

体幹パッドを外へ広げると、金具部が出てきます。金具部のエッジにご注意ください。

9.ヘッドサポート取付け・調節方法

用意するもの：本体、ヘッドサポートセット


①背力バー上部差込口にヘッドサポートの差込金具を差し込みます。

②位置を調節し固定グリップを締めて固定します。

※ヘッドサポートの長さには限界があります。

金具部分右側に貼っているシールが見えない範囲でお使いください。

●ヘッドサポートセット

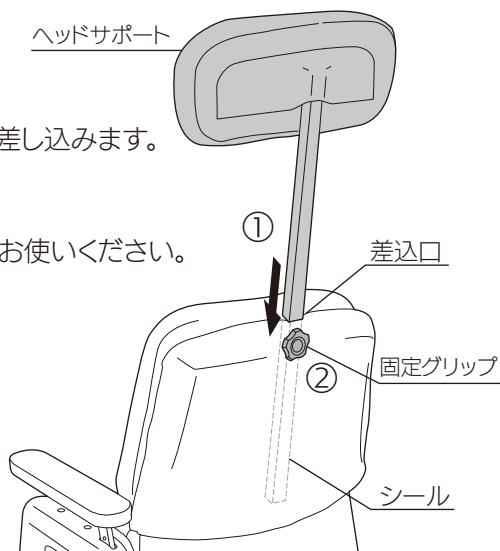

10.内転防止パッドUタイプ調整方法

用意するもの：内転パッドU(ユニバーサル)タイプ

用意する工具：スパナ(8mm)・+ドライバー(2番)

内転防止パッドU(ユニバーサル)タイプは、クッション部の奥行き調整が可能です。

①内転防止パッドUタイプのカバーを取外し、さらにクッション部を取り外します。


(詳細は15ページ参照)

②樹脂板と支柱パイプがボルト・ナットで留まっていますので、それを外します。

③樹脂板を引き出し、適切な位置に動かします。

④樹脂の穴と支柱パイプの穴を合わせ、ボルトを通し、ナットで固定します。

⑤樹脂板にクッション部を取り付け、カバーを取り付けます。

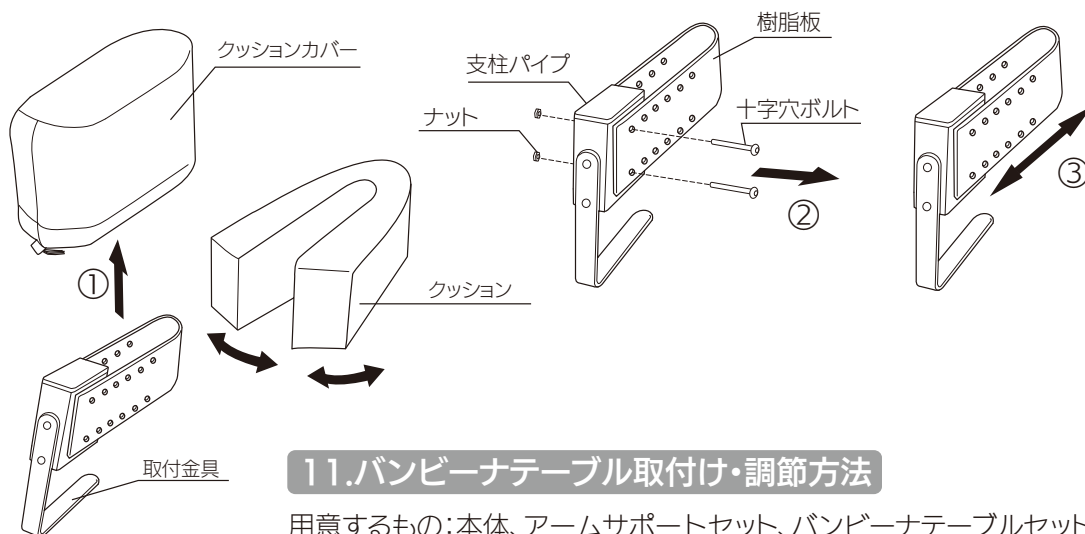

11.バンビーナテーブル取付け・調節方法

用意するもの：本体、アームサポートセット、バンビーナテーブルセット

当商品には別売りの「バンビーナテーブル(TT-C17)」を取付けることができます。

詳細はバンビーナテーブルの取扱説明書をご確認ください。

12.転倒防止パイプ取付方法

用意するもの：転倒防止パイプセット


用意する工具：+ドライバー(2番)

①転倒防止パイプの六角穴が内側につくように、脚キャップに取付ます。

左右があるので注意してください。


(パイプ下部にR/Lシールがついています。右手側：R・左手側：L)

②六角穴に袋ナットを差込み、逆側から十字穴ボルトを差込み、ドライバーで取り付けます。

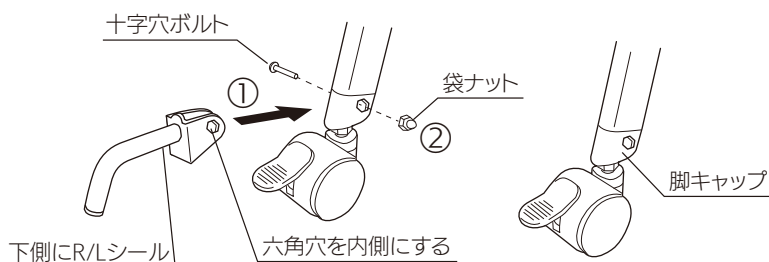

●転倒防止パイプセット

□転倒防止パイプ×2
(左右1個ずつ)

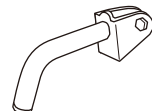

□袋ナット×2




□十字穴ボルト×2



6. キャスターロックのやり方

キャスターロック方法

- ロック付きキャスターのロックのやり方
キャスターについているペダルを
①の方向に押し下げるとロックします。
②の方向に押し下げるとロックが解除
されます。

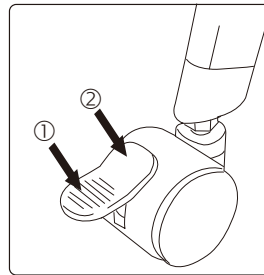

注意

キャスターロックをする際は、キャスターを外側に向けてください。内側に向けてロックをすると転倒しやすくなります。



注意

キャスターロックは、手で行ってください。足で強く踏み込むと破損する恐れがあります。



注意

移動時以外は確実にキャスター全てをロックしてご使用ください。ロックをせずに使用すると、転倒や事故・破損の原因になります。



注意

お子さまを座らせての長距離の移動はお控えください。また、お子さまを座らせて傾斜や段差のある場所で動かすのはお控えください。転倒・ケガの恐れがあります。

7. 各クッションの取外し方法

※クッションは洗濯することができます。洗濯する際は金具パーツから取り外してください。

洗濯時の注意事項は17ページの「日ごろのお手入れ」をご参照ください。



注意

カバーの取り外しの際、金具のエッジでのケガや指挟み等にご注意ください。


1. 座・ランバー・背クッションの取外し方法

- ①取外しやすいところを掴み、ゆっくりとクッションを剥がしてください。

2. 内転防止パッドクッションの取外し方法

- ①クッションカバーの内側に入れ込んであるカバー口紐の留め具と、口紐のあまり部分を引き出し、留め具を緩めて口紐を伸ばします。
- ②クッションカバーの口を緩めたらそのまま取り外します。
- ③クッションは面ファスナーで金具に付いているので、剥がすように取り外します。
- ④外したクッションをクッションカバーに押し込み、洗濯してください。


※クッションを取付の際は、前後にご注意ください。

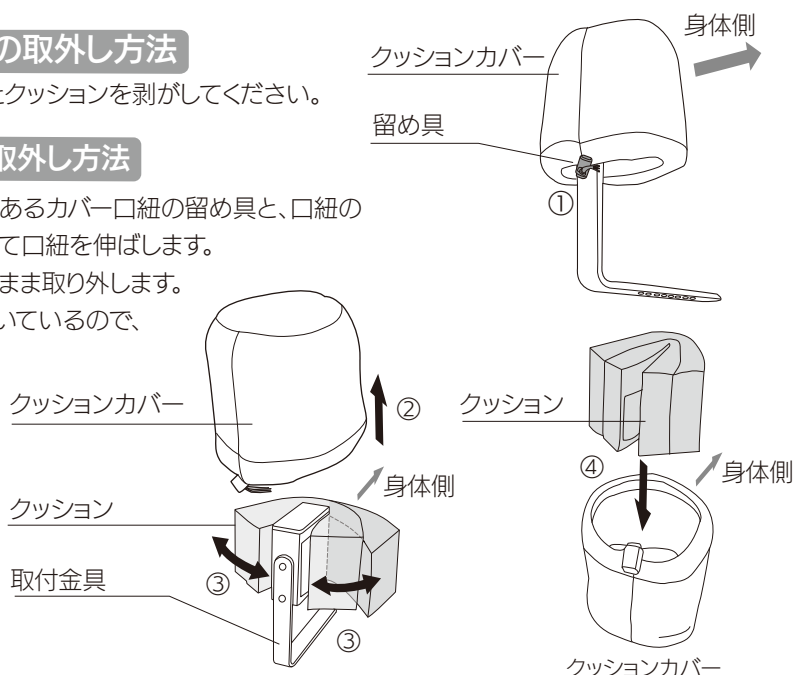

7.各クッションの取外し方法



3.骨盤パッドクッションの取外し方法

- ①クッションと取付金具の間の面ファスナーを剥がしてください。
- ②クッション先端部を持って取付金具から引き抜いてください。

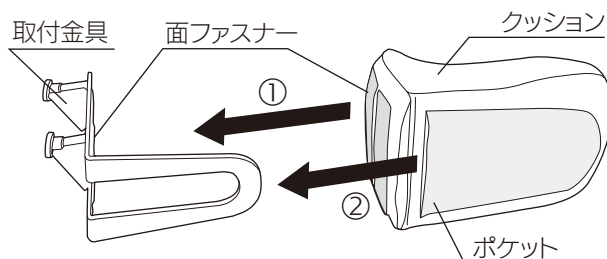


4.体幹パッドクッションの取外し方法

- ①クッションカバーの面ファスナー部を剥がしてください。
 - ②取付金具からクッションを引き抜いてください。
- ※金具はクッション内側のポケットに入っています。

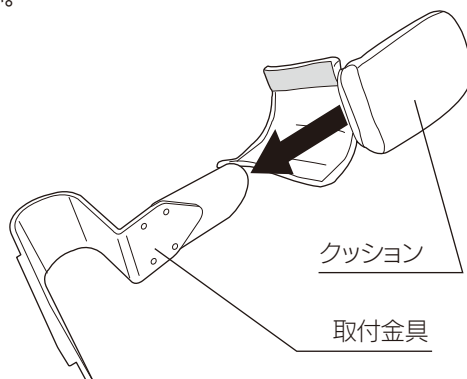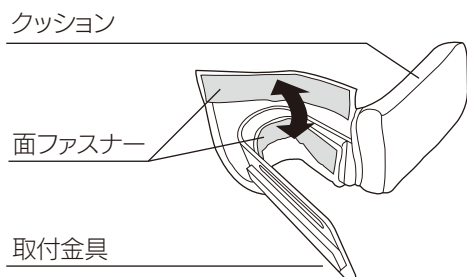

5.ヘッドサポートクッションの取外し方法

- ①クッション後部のポケットを開けてください。
- ②面ファスナーをはがしながら差し込金具を引き抜いてください。

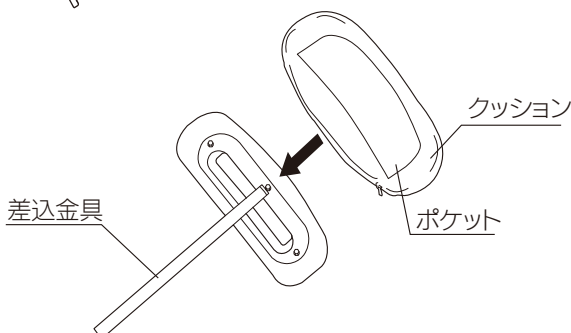


6.キャスター取外し方法


用意するもの:脚パイプS/M or ダイニング用脚パイプセット
用意する工具:スパナ(14番)

スパナでキャスターの六角ネジ部をスパナで掴み、回してねじ部を脚キャップから取り外します。

※ばね座金・平座金はキャスターに付いておりませんので、なくさないように保管してください。

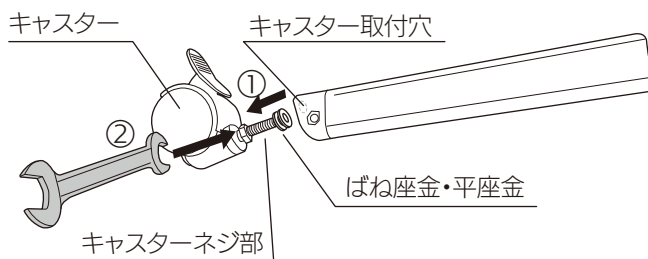

キャスターを差し込む際は
差し込角度にご注意ください。

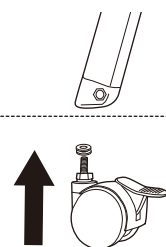

注意

キャスターは取り外し可能ですが、キャスターなしで使用する場合は脚キャップが床等を傷つけないように、市販のすべり止めシールやアジャスター(M8)をつけてください。

8. 日頃のお手入れと注意・お問い合わせ

〈汚れを落とすときの注意〉

- 水にぬれたまま放置しないでください。
- シンナー等の有機溶剤の使用は絶対にしないでください。目割れや変色の原因になります。

1. クッション部

本製品のクッション部はカバーごと洗濯機に入れて洗うことができます。カバーのみを洗濯する場合は、ファスナーを閉じて洗ってください。液温30℃以下にて中性洗剤でソフト洗いしてください。ねじって絞ったりせずに短時間で脱水してください。乾燥後は形を整えて日陰で平干しの上、完全に乾かしてください。乾燥機にもそのまま入れていただけます。クッションが固定されないサイズの乾燥機でご使用ください。施設等での消毒はオゾン消毒やアルコール消毒等を行い、家庭での消毒はアルコールを含ませた布等で拭いてください。頻繁な消毒は避け、月に一度ほどとしてください。カバーのわずかな汚れは柔らかい布に中性洗剤を含ませ、軽く拭きとってください。



注意

クッションの中身のみで洗わないでください。変形・劣化の恐れがあります。アイロンがけはしないでください。ドライクリーニングや塩素系の漂白はしないでください。

2. 木部・金属部・樹脂部

日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。(化学ぞうきんなどは使用しないでください)
万一汚れたときは、中性洗剤を3～5%位にぬるま湯で薄め、柔らかい布をひたし、固く絞って表面をたたくように拭き取ってください。その後水でひたした布を固く絞って洗淨液を拭き取り、柔らかい乾いた布で軽く拭いたあと、自然乾燥させてください。

3. 上張り地・布/レザー部

日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。(化学ぞうきんなどは使用しないでください)

4. 長期保管場所

高温・多湿の場所には保管しないでください。カビやシミ、ワレの原因になります。

また、直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、乾燥の著しい場所での保管も避けてください。
変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。



注意

使用前に、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は工具等で締め付けてください。

仕様の詳細や調節方法、お手入れのやり方、アフター部品など不明な点は、お問い合わせいただいた販売店、または下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

タカノお客様ご相談窓口



フリー
ダイヤル

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

※混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからおかけ直してください。

9. 仕 様

(単位 mm)


		バンピーナposi			
測定箇所		Sサイズ	Sダイニング	Mサイズ	Mダイニング
①	全幅(肘付) ※1	445(450)		445(450)	
②	全奥行 ※2・3	440~500【無段階】	620~780【無段階】	500~560【無段階】	620~780【無段階】
③	全 高 ※3・4	535~635【20mm ×6段階】	800~900【20mm ×6段階】	715~815【20mm ×6段階】	880~980【20mm ×6段階】
④	座の幅	340		340	
⑤	座の奥行	220~320【無段階】		250~350【無段階】	
⑥	座の高さ ※3・5	250~350【20mm ×6段階】	500~600【20mm ×6段階】	350~450【20mm ×6段階】	515~615【20mm ×6段階】
⑦	キャスター部高さ	70		70	
⑧	座前と座後の厚みの差	20		20	
⑨	座後面から肘の高さ	130~230【20mm×6段階】		115~215【20mm×6段階】	
⑩	座後面から背上的高さ	320		385	
⑪	背もたれの角度	90°~110°【5°×5段階】		90°~110°【5°×5段階】	
⑫	内転パッドの差込量	80【10mm×9段階】		50【10mm×6段階】	
⑬	内転パッドリタイプの調節量	70【14mm×6段階】		70【14mm×6段階】	
⑭	骨盤パッド幅	140~290【無段階】		140~290【無段階】	
⑮	体幹パッド幅 ※6	130~270【無段階】		130~270【無段階】	
⑯	座面から体幹パッド上の高さ ※7	215~260【無段階】		295~340【無段階】	
⑰	体幹パッド角度	-20°~20°(垂直に対して)【無段階】		-20°~20°(垂直に対して)【無段階】	
⑱	背上からヘッドサポート上の高さ	140~240【無段階】		140~240【無段階】	
⑲	フットサポートの引き出し量	95【無段階】		95【無段階】	
⑳	フットサポートから座前面の高さ ※8	215~395【20mm×10段階】		230~410【20mm×10段階】	
㉑	フットサポートのレッグ角度	-40°~40°(水平に対して)【20°×5段階】		-40°~40°(水平に対して)【20°×5段階】	
㉒	フットサポート角度	-40°~40°(水平に対して)【20°×5段階】		-40°~40°(水平に対して)【20°×5段階】	
●	重量 ※9	11kg~15.5kg	12.8kg~19.3kg	12kg~16.5kg	13.3kg~19.8kg
対象者目安 ※対象者目安は座面の高さを基準として当てはめております。あくまでも目安としてご覧ください。					
■ 身長/体重		~125cm/~25kg		~145cm/~40kg	

※1：キャスター回転範囲は除く ※2：ダイニングはフットサポートの可動含む ※3：背を一番立てた状態

※4：ヘッドサポートを除く ※5：座前の寸法 ※6：パッドの位置が最上位、垂直の場合

※7：パッドの位置が最狭、垂直の場合 ※8：フットサポートが水平の場合 ※9：最軽量は、パッド類なし

※寸法表には、転倒防止パイプは含まない。 ※体幹パッド、骨盤パッドは3次元形状の為、調整範囲は目安とする。

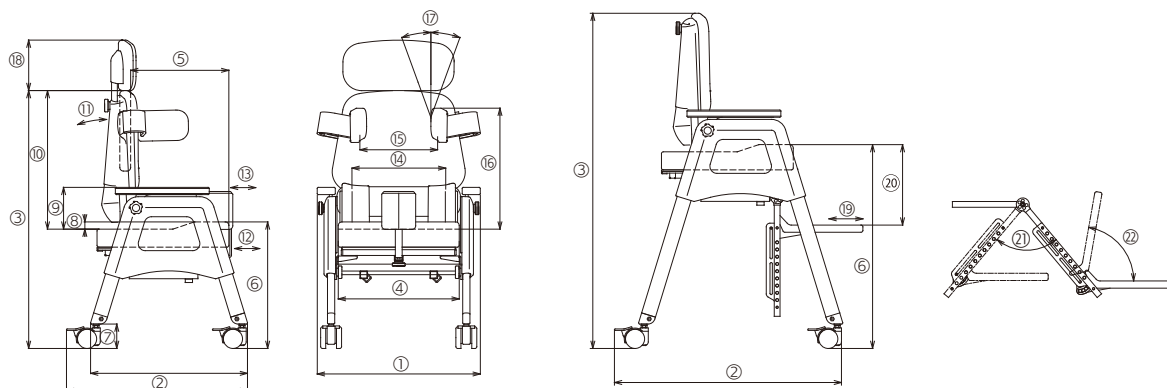

品質保証書

本商品については上面記載の「保証規定」により正常な使用状況において故障が生じた場合に限りお買上げの日より「1年間」無償にて修理いたします。

機 種			
お 客 様	ご住所	〒 TEL.	
	(フリガナ) お名前		
お買上げ日		年 月 日	保 証 有効期間 お買上げ日より (保証の規定による) 1年間
取扱販売店名・住所・電話番号			
製造元	 タカノ株式会社 タカノハートワークス オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331 TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203		

保証規定

I. 保証の範囲

- 保証期間中に品質の不完全に基づく故障を生じた場合はこの保証書により無料で修理いたします。
 - 保証期間はお買上げ後1年間です。
 - 但し、次の場合は保証中でも有料になります。
 - 使用方法の誤り、重大な不注意、手入れ不良による故障の場合。
 - 製品に改造を加えた場合の故障。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変等、ならびに公害による故障または損傷。
 - 保証書にお買上げ店名の記載、捺印のない場合。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 消耗品(キャスター等)は保証期間対象外となります。
- 以上の保証は本製品を国内に設置した場合に限りです。
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

II. サービスのご用命

保証期間中、万一故障が生じた場合はお買上げの販売店へ保証書を添えてお申し出下さい。

III. ご注意

保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 保証書は、記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼下さい。お買上げ年月日、販売店名など必ずご確認ください、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。
- 転居・贈答品などでお買上げの販売店に修理を依頼できない場合は、タカノ(株)までお問い合わせください。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



心を形にするテクノロジー、あります。

TAKANO HeartWorks. タカノ株式会社 タカノハートワークス

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331 TEL.0265-72-3157 FAX.0265-72-3203
 URL <http://www.takano-hw.com/> <http://www.takano-net.co.jp/>