

SSP 取扱説明書


ごあいさつ このたびは、タカノ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ・この説明書にはシーティングサポートパッドを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。
- ・ご使用前によくお読みの上、正しく安全な取り扱い方法を十分理解されてからお使いください。
- ・この説明書は、いつでも出して見ることができるよう、大切に保管してください。
- ・お求めいただきました商品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。


1. 特徴

- ・車いす上やベッド上で、各部サポートとしてお使いいただけるパッドです。
実際にお使いになる方と、セラピストの方の両方をサポートするパッドです。
- ・サイドサポートやランバーサポート、座角調整等お使いいただけます。
- ・ぼこぼこタイプ（TC-SP11）は、気持ちが良いところに当ててお使いください。

2. 仕様

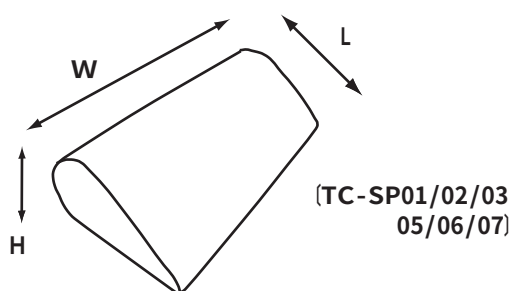

(TC-SP01/02/03
05/06/07)

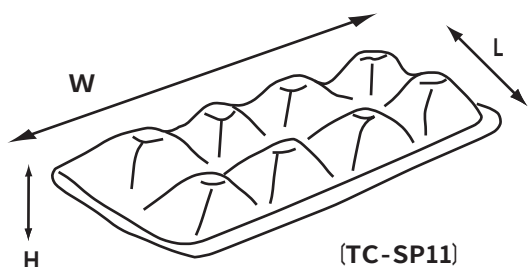


(TC-SP11)

- TC-SP01・02・03・05・06・07は、裏面に滑り止めがついています。
- TC-SP01・02・03・05・06・07は、カバーを取り外すことができます。（TC-SP11は、はずせません）
- どのタイプも固定するための紐がついています。

品 番	かたち	W	D	H	重量
TC-SP01	厚い40	400	180	75	270g
TC-SP02	厚い35	350	180	75	240g
TC-SP03	厚い15	150	180	75	120g
TC-SP05	薄い40	400	180	45	175g
TC-SP06	薄い35	350	180	45	160g
TC-SP07	薄い15	150	180	75	80g
TC-SP11	ぼこぼこ	410	220	55	150g

- 素材：本体 ウレタンフォーム
 カバー [TC-SP01・02・03・05・06・07]
 ポリエステル [裏面耐水加工]
 [TC-SP11] ポリエステル

3. ご使用方法

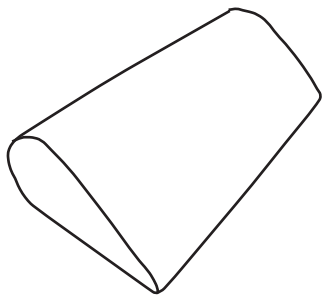

- サイドサポートやランバーサポートとして、また座面の角度調整、円背のすき間に入れていただいたりなど、自由にお使いください。
- 車いすへの固定は、紐をお使いください。

⚠ 注意

- ・パッドを折り曲げて使用しないでください。
- ・パッドを置く向き、方向を確認してから使用してください。
- ・カバーのファスナーを閉じる際に、中身のクッション材にファスナーがかまないように軽く押し込みながら閉じて下さい。
- ・火気には近づけないようにしてください。

4. お手入れの方法

- TC-SP01・02・03・05・06・07は、カバーがとりはずせます。
(TC-SP11は取りはずしできません)
- ・TC-SP01・02・03・04・05・06・07は、カバーを取りはずすことができます。
汚れた場合など、はずして洗濯していただくことができます。液温30℃以下にて中性洗剤でネットに入れて洗濯して下さい。
- ・乾燥機もお使いいただけます。
- ・カバーには、耐水加工を施していますので、少量の水気や汚れなどは柔らかい布に中性洗剤を含ませ、軽く拭きとってください。
(縫い目から水分等が浸透することがありますので、完全な防水ではありません)
- ・中身のウレタンフォームは洗わないでください。水分や紫外線に弱いので、劣化や割れてしまうことがあります。

⚠ 注意

- ・アイロンがけはしないでください。
- ・ドライクリーニングや塩素系の漂白はしないでください。



袋: PE



説明書・ダンボール

■お問い合わせ先

 心を形にするテクノロジー、あります。 **TAKANO HeartWorks タカノ株式会社**

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331
TEL. 0265-72-3157 FAX. 0265-72-3203

タカノお客様ご相談窓口



フリーダイヤル

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～ 17:00 携帯電話・PHSからご利用いただけます。)

※ 混雑時にはつながりにくい場合があります。 時間をおいてからお掛け直してください。