

— タカノ車いす用クッション —

にこにこクッション（背用） 取り扱い説明書

ごあいさつ このたびは、タカノ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ・この説明書にはにこにこクッションを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。
- ・ご使用前によくお読みの上、正しく安全な取り扱い方法を十分理解されてからお使いください。
- ・この説明書は、いつでも出して見ることができるよう、大切に保管してください。
- ・お求めいただきました商品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。


1. 特徴

- ・このクッションは、通気性と水分透過性に優れた素材のクッション材と、カバーを使用しています。そのためムレにくく、洗濯も容易で、いつでも清潔にお使いいただけます。
- ・布のカバーは、抗菌防臭加工を施し、*青色SEKマーク認証合格品です。また、伸縮性に優れ、汗をすばやく吸収→放湿します。
- ・クッション材・カバーともにポリエステル100%でリサイクルも可能素材です。

*青色SEKマーク：

繊維製品新機能評価協議会が抗菌防臭加工品について、効果・耐久性・経口毒性・皮膚刺激性を審査し、一定の基準をクリアした加工品に対して、その品質を保証するマークです。青色は、抗菌防臭加工製品についてつけられます。

2. 仕様

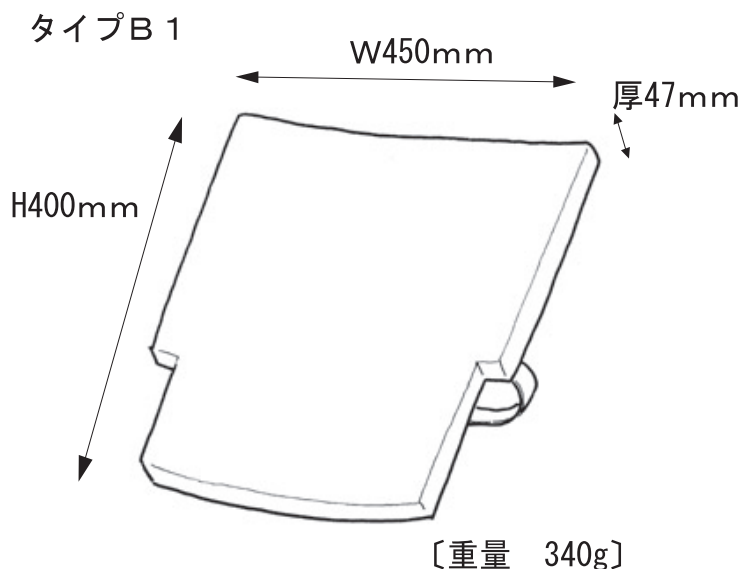


- クッション後端は、車いすバックサポートの形状に沿うような形(R形状)になっています。
- 車いすの背もたれのフレームに、肩甲骨が当たらないような形状になっています。
- 車いすにはひもで固定できるようになっています。

- ・ 素材：クッション ポリエステル100%
カバー ポリエステル100%

3. ご使用方法

- 幅が広い方が肩甲骨側、狭い方がお尻側になります。
- 置く方向、向きを確認して置いてください。
- 車いすへの固定にはひもを縛ってください。

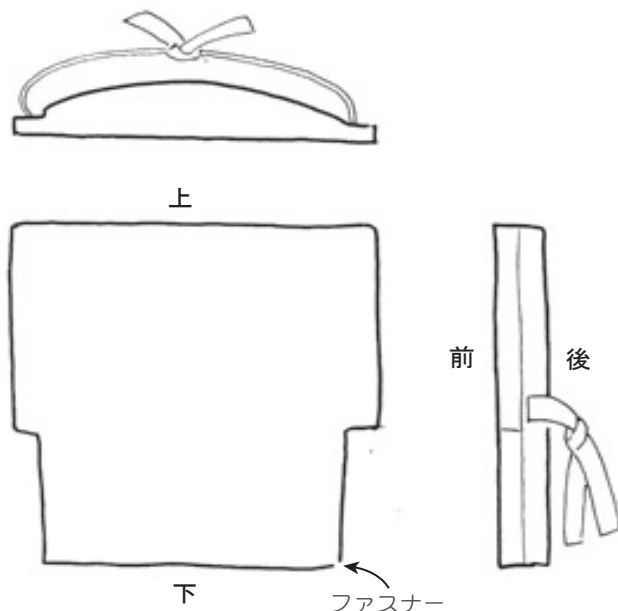

⚠ 注意

- ・クッションを折り曲げて使用しないで下さい。
- ・車いすに使用する場合には、にこにこクッション座面用と一緒にお使いください。必要に応じて専門家のアドバイスを受けて下さい。
- ・クッションを置く向き、方向を確認してから使用してください。
- ・カバーのファスナーを閉じる際に、中身のクッション材にファスナーがかまないように、軽く押し込みながら閉じてください。
- ・火気には近づけないようにして下さい。

4. お洗濯の方法

- にこにこクッションは、カバーをはずさずにそのまま丸洗いをすることができます。

- ・大型乾燥機の場合は、クッションの中身をださずに、そのまま常温30℃以下にて中性洗剤で洗濯して下さい。そのまま入らない洗濯機の場合や、汚れがひどい場合には、クッション材をカバーから取り出し、それぞれ（カバー・クッション材）をネットに入れて洗濯して下さい。また、ひもは軽く縛ってください。
- ・脱水は、ねじって絞ったりせずに短時間で脱水して下さい。カバーからはずして洗濯した場合は、絡みを防ぐためネットに入れたまま脱水して下さい。
- ・乾燥時は、形を整えて平干しして下さい。また乾燥後はカバーに入れてご使用下さい。
- ・カバーのみ洗濯する場合は、ファスナーを閉じて洗して下さい。
- ・乾燥機にもそのまま入れていただけます。また天日に干していただくことをお勧めします。
- ・消毒は、そのまま蒸気で110℃×30分程度は可能ですが、月に1度位とし、頻繁な消毒は避けて下さい。
- ・カバーのわずかな汚れは柔らかい布に中性洗剤を含ませ、軽く拭きとって下さい。

⚠ 注意

- ・アイロンがけはしないで下さい。
- ・ドライクリーニングや塩素系の漂白はしないで下さい。



袋: PE



説明書
ダンボール

■お問い合わせ先

 心を形にするテクノロジー、あります。
TAKANO HeartWorks タカノ株式会社
〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331
TEL. 0265-72-3157 FAX. 0265-72-3203

タカノお客様ご相談窓口



フリーダイヤル

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～ 17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

※ 混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからお掛け直してください。