

# タカノクッション R

## 取扱説明書

**ごあいさつ** このたびは、タカノ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ・この説明書にはタカノクッションRを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。
- ・ご使用前によくお読みの上、正しく安全な取り扱い方法を十分理解されてからお使いください。
- ・この説明書は、いつでも出して見るできるよう、大切に保管してください。
- ・お求めいただきました商品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。

## 1. 特徴


- ・このクッションは、かたさの異なるウレタンフォームを組み合わせた多面構造体です。体圧分散性と姿勢保持に優れたクッションです。
- ・形状の異なるタイプで、座面用6種類・背もたれ用1種類をご用意しております。
- ・軽量なので、取り扱いも楽に行えます。

## 2. 仕様

幅40cm×奥行42.5cm（タイプ1～6）


※奥行はR形状先端までの長さです。側面の奥行は40cmとなります。

幅40cm×奥行40cm（タイプ背）

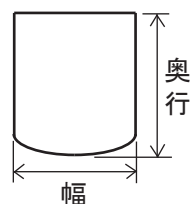

<p>●タイプ1 (TC-R081)</p> <p>・脚を保持する形状です。</p> <p>【重量：650g】</p>	<p>●タイプ2 (TC-R082)</p> <p>・両サイドが厚い形状です。</p> <p>【重量：720g】</p>	<p>●タイプ3 (TC-R043)</p> <p>・前方が厚い形状です。</p> <p>【重量：500g】</p>	<p>●タイプ4 (TC-R064)</p> <p>・フラットな形状です。</p> <p>【重量：550g】</p>
<p>●タイプ5 (TC-R045)</p> <p>・フラットで薄い形状です。</p> <p>【重量：380g】</p>	<p>●タイプ6 (TC-R082)</p> <p>・脚を保持する形状で薄いです。</p> <p>【重量：410g】</p>	<p>●タイプ背 (TC-R010)</p> <p>・背もたれ用です。</p> <p>【重量：330g】</p>	<p>【材質】</p> <p>本体：ウレタンフォーム カバー：ポリエステル （裏面ラミネート加工）</p> <p>【推奨車いすサイズ】 38～40cm</p>

### 3. ご使用方法

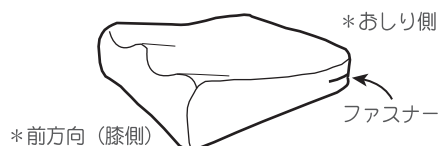

- カバー底面の滑り止めがついている面を必ず下にして車いす上に置いて使用してください。
- 左図のように、カバーのファスナー部がおしり側になるようにして置いてください。  
裏面の取っ手に「前」表示がありますので、取っ手が前になるように置いてください。

- 車いすに使用する場合は、クッションの厚みで座面が高くなります。アームサポート、フットサポート等の高さをご確認ください。
- 必要に応じて作業療法士、理学療法士、ケアマネージャー等の専門家のアドバイスを受けてください。

### 4. お手入れの方法

#### ■カバー

- 本体から取り外して、ネットに入れて、液温30℃以下にて中性洗剤で洗濯してください。
- 乾燥機のご使用もできます。

#### ■クッション本体

- 汚れなどは、柔らかい布に中性洗剤を含ませ、軽くふき取ってください。
- 水分が本体のウレタンフォームに浸透してしまった場合は、風通しの良い場所で日陰干ししてください。
- 本体のウレタンフォームの汚れには、固く絞ったタオルで汚れをふき取ってください。



### 5. 使用上の注意

- 誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- 切断したり、穴をあけたりしないでください。
- 火気や高温な場所には近づけないでください。

- 本製品は、完全防水ではありません。  
万が一水分が浸入した場合は、お手入れ方法に沿って手入れを行ってください。
- クッションを折り曲げて使用しないで下さい。

### 6. 保管方法

- 直射日光の当たる場所で保管しないでください。劣化を早めます。
- クッションの上に重量物を置いたまま保管しないでください。  
変形・破損の恐れがあります。



袋：PE



説明書  
ダンボール

#### ■お問い合わせ先



〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331  
TEL. 0265-72-3157 FAX. 0265-72-3203

タカノお客様ご相談窓口



フリー  
ダイヤル

0120-825-845

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～ 17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

※ 混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからお掛け直しください。