

# にこにこクッション 取扱説明書

**ごあいさつ** このたびは、タカノ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ・この説明書にはにこにこクッションを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。
- ・ご使用前によくお読みの上、正しく安全な取り扱い方法を十分理解されてからお使い下さい。
- ・この説明書は、いつでも出して見ることができるよう、大切に保管して下さい。
- ・お求めいただきました商品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。

## 1. 特徴


- ・このクッションは、通気性と水分透過性に優れた素材のクッション材と、カバーを使用しています。そのためムシにくく、洗濯も容易で、いつでも清潔にお使いいただけます。
- ・特有の三次元形状とポリエステルファイバーによって、座位保持と体圧分散性の優れたクッションです。
- ・布のカバーは、抗菌防臭加工を施し、\*青色SEKマーク認証合格品です。また、伸縮性に優れ、汗をすばやく吸収→放湿します。
- ・クッション材・カバーともにポリエステル100%でリサイクルも可能素材です。

\*青色SEKマーク


繊維製品新機能評価協議会が抗菌防臭加工品について、効果・耐久性・経口毒性・皮膚刺激性を審査し、一定の基準をクリアした加工品に対して、その品質を保証するマークです。青色は、抗菌防臭加工製品についてつけられます。

## 2. 仕様

タイプS1・S2

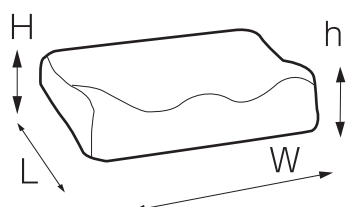

タイプS3・S4

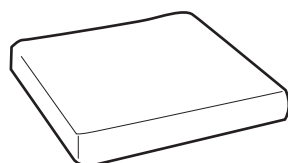

- クッション後端は、車いすバックサポートの形状に沿うような形(R形状)になっています。
- にこにこクッションは、上部クッションと下部クッション、布カバーで構成されています。クッション材に表示されています「上・うしろ」「下・うしろ」を確認し、しっかりと合わせてお使い下さい。

上部クッション



下部クッション

タイプ	品番	W	D	H	h	重量(g)
S1	TC-S1	400	425	80	110	655g
S2	TC-S2	400	425	60	80	630g
S3	TC-S3	400	425	80	-	640g
S4	TC-S4	400	425	60	-	625g

- ・素材：クッション ポリエステル100%  
カバー ポリエステル100%  
(裏面滑り止め軟質アクリル樹脂加工)

### 3. ご使用方法



- カバー底面の滑り止め加工面（平滑面側）を必ず下にして車いす上に置いて使用して下さい。
- 左図のように、カバーのファスナー部がおしり側になるようにして置いてください。

#### ⚠ 注意

- ・クッションを折り曲げて使用しないで下さい。
- ・車いすに使用する場合は、座高が高くなります。アームサポート、フットサポート等の高さをご確認下さい。また必要に応じて専門家のアドバイスを受けて下さい。
- ・クッションの上で飛び跳ねたりしないで下さい。
- ・中身のクッション成形品がずれる場合は、カバーから取り出して正しい位置に入れ直して下さい。
- ・上部・下部のクッションは必ず凹凸部を合わせて使用して下さい。
- ・カバーのファスナーを閉じる際に、中身のクッション材にファスナーがかまないようにクッション後端を軽く押し込みながら閉じて下さい。
- ・火気には近づけないようにして下さい。

### 4. お手入れ方法

- にこにこクッションは、カバーをはずさずにそのまま丸洗いすることができます。

- ・大型洗濯機の場合は、クッションの中身をださずに、そのまま液温30℃以下にて中性洗剤で洗濯して下さい。そのまま入らない洗濯機の場合や、汚れがひどい場合は、クッション材をカバーから取り出し、それぞれ（カバー・クッション上部材・下部材）をネットに入れて洗濯して下さい。
- ・脱水は、ねじって絞ったりせずに短時間で脱水して下さい。カバーからはずして洗濯した場合は、絡みを防ぐためネットにいれたまま脱水して下さい。
- ・乾燥機は、形を整えて平干しして下さい。また乾燥機は、クッションの上部材と下部材を確実に合わせ、カバーに入れてご使用下さい。
- ・カバーのみ洗濯する場合は、ファスナーを閉じて洗って下さい。
- ・乾燥機にもそのまま入れていただけます。また天日に干していただくことをお勧めします。
- ・消毒は、そのまま蒸気で110℃×30分程度は可能ですが、月に一度位とし、頻繁な消毒は避けて下さい。
- ・カバーのわずかな汚れは柔らかい布に中性洗剤を含ませ、軽く拭きとって下さい。

#### ⚠ 注意

- ・アイロンがけはしないで下さい。
- ・ドライクリーニングや塩素系の漂白はしないで下さい。



袋：PE



説明書  
ダンボール

#### ■お問い合わせ先

 心を形にするテクノロジー、あります。  
**TAKANO HeartWorks** **タカノ株式会社**  
〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331  
TEL. 0265-72-3157 FAX. 0265-72-3203

タカノお客様ご相談窓口



フリー  
ダイヤル

**0120-825-845**

(受付時間 土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

※ 混雑時にはつながりにくい場合があります。時間をおいてからお掛け直してください。