

# タカノクッション

# MOLA<sup>モーラ</sup>

## ＼新発売！

# スリムタイプ

## MOLA

イスづくり60年、クッションづくり30年の技術とノウハウを集結！  
現場のさまざまなお悩みをMOLAが網羅的に解決します！

待望の薄型が  
登場しました！



このような方にお勧めです

- ・ やせ型の方
- ・ 足こぎをされる方
- ・ 低床の車いすをお使いの方
- ・ 薄型で合うクッションがない方

### 4層構造

ムレにくい

**アウターカバー**

防水仕様

**インナーカバー**

モチり

**ラテックス**

スリットがポイント！

**モールドウレタン**



### Check Point!

究極の柔らかさ

**モールドウレタン**

+


人体の表面硬度に近い

**ラテックスフォーム**

↓

大腿部  
4cm以下 薄型クッションの

**ハイクラス体圧分散を実現**

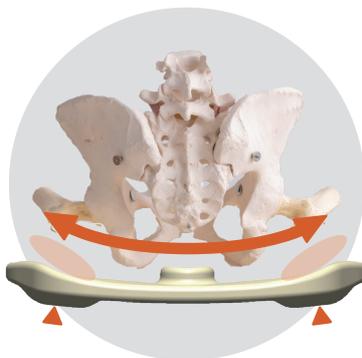

### サイドマウンテン形状

尾骨部や坐骨結節部は除圧しながら、広い面積で支えることで高い体圧分散効果を実現



### 裏面に10個のスリット

クッション裏面に10個のスリット加工を施し、大腿部裏への圧迫感を軽減

お手入れ方法



アウターカバーは洗濯で。



インナーカバーは外さず清拭で簡単お手入れ。

薬品消毒OK！


# 一般的なクッションとの体圧分散効果の比較

測定器：BodiTrak2Pro 座シートタイプ


被験者：160cm 50kg 女性

**MOLA**  
タカノクッションMOLA  
スリムタイプ


着座

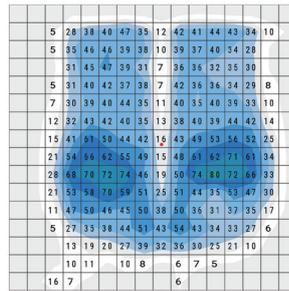

15分後

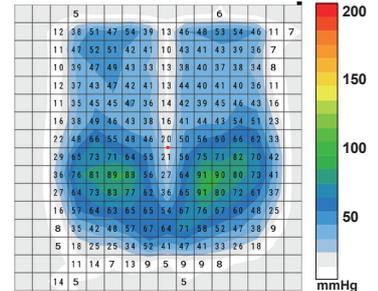


着座時はもちろん、座ってから15分後の圧力分散において薄型クッションのハイクラスな除圧効果が確認できました。

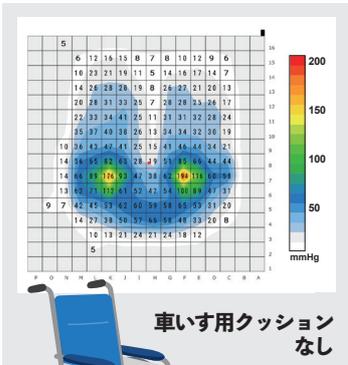


一般的なクッション  
(ジェル+ウレタン)

着座

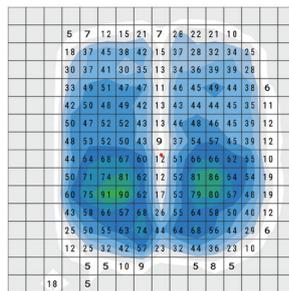

15分後

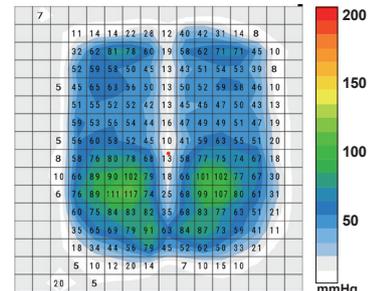

## Check Point!

高耐久性 (5年※自社基準)




クッションの本体は高耐久素材のラテックスとモールドウレタンを使用しています

2層カバーで衛生的



アウターカバーはムレにくく快適に使えます。インナーカバーは防水カバー・防水ファスナーで汚染を防ぎます。

車いすに合せやすい

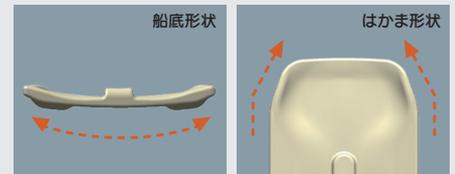

最新の車いすにも合せやすい「船底形状」と「はかま形状」を採用しました。

製品名

タカノクッションMOLA スリムタイプ

希望小売価格

22,000円 税込み価格 (20,000円 税抜き価格)

製品重量 (kg)

約0.8

品番

TC-ML40S

JANコード

4523725014368

サイズ (mm)

W400×D400×H35(坐骨部) 40(大腿部) 45(端部)

TAISコード

00297-000126

心を形にするテクノロジー、あります。 **TAKANO HeartWorks** タカノ株式会社

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331

<https://www.takano-hw.com>

**0120-825-845**

TEL 0265-72-3157 FAX 0265-72-3203

[fukushi@takano-net.co.jp](mailto:fukushi@takano-net.co.jp)

【受付時間】土日祝日除く 月～金曜日 9:00～17:00

rev.2\_2025.05