

乗り降りしやすい

らくらく移乗 車いす

乗助さん[®]Ⅱ

のりすけ

腰を
上げるだけで
らくらく移乗



ご利用者の離床機会を増やし、介護者の負担を減らします!!

人材確保等支援助成金 対象機器

介護保険レンタル対象品 (移動用リフト)

乗助さんは、NEDO (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構) の助成を受けて開発しました。

らくらく移乗 車いす

乗助さんⅡ[®]

のりすけ

TNB-F TAISコード:01239-000007

ポータブルトイレをご利用の方に…

らくらく移乗 車いす

乗助さんⅡ[®] ワイド

のりすけ

TNB-WF TAISコード:01239-000008


かんたんに
座面取り付け!!



レバーを倒して
座面を出す



座面高は調整可能

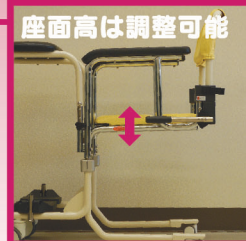

●移乗のしかた

詳しい使い方は **乗助さんⅡ** で検索



端座位の利用者に
フレームを差し込みます。



背面に座面ユニットを
取り付けます。




利用者の腰を上げ、
レバーで座面を出します。




そのまま腰を降ろせば
移乗完了。

●仕 様


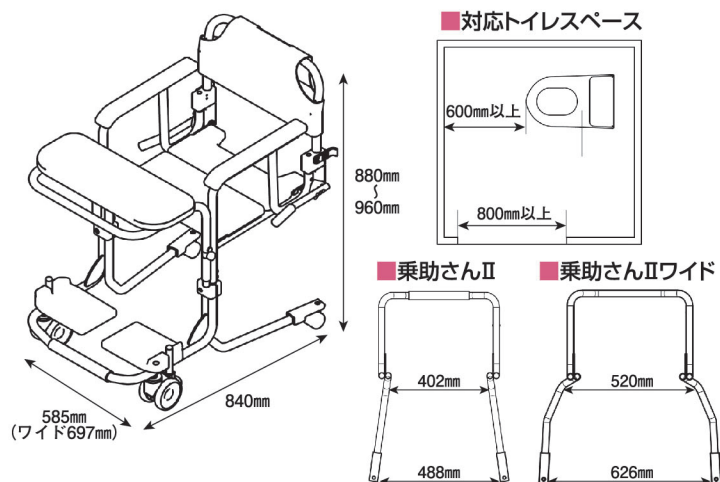


■対応トイレスペース

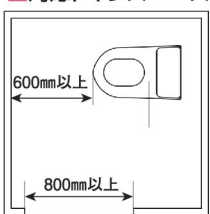

■乗助さんⅡ

■乗助さんⅡワイド

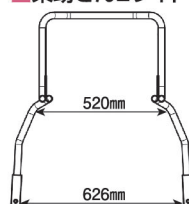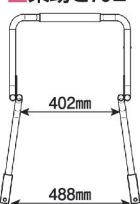

寸 法	幅585mm×奥行840×高さ880～960mm (乗助さんⅡ) 幅697mm×奥行840×高さ880～960mm (乗助さんⅡワイド)
重 量	20kg (本体16.5kg/座面ユニット3.5kg)
最大使用者体重	100kg
使用対象者	自力もしくは補助があれば、座位姿勢、及び立ち上がりができる方
座面高	480mm～560mm (5段階調整)
有効座面幅	410mm
対応ベッド・トイレ高さ	510mm以下
対応ベッドベース フレーム高さ	75mm以上
対応トイレスペース	間口 800mm以上/便器と前面壁の間隔 600mm以上
キャスター径	前輪100mm/後輪50mm

特許取得済

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

企画・製造元 **アイデアライフケア 株式会社**

販売元 **タカノ株式会社**

〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331
TEL 0265-72-3157 FAX 0265-72-3203
Email fukushi@takano-net.co.jp

乗助さんⅡ使い方動画はこちら!

<https://www.takano-hw.com/heartworks/products/stretcher/norisuke2>



専用サイト

●お問い合わせ